





## **Oxycure Concentrator Kröber O2 - Kröber O2 v4.0**

### *Gebruiksaanwijzing*

#### **Het toestel aanschakelen : samengevatte instructies.**

1. Aan/Uit knop indrukken 
2. Aantal liters instellen met tweede knop 
  - 1- Knop blijven indrukken tot de gegevens op het scherm knipperen;
  - 2- Knop loslaten;
  - 3- Knop draaien tot het gewenste aantal liters bereikt is;
  - 4- Knop terug indrukken ter bevestiging van het debiet.
3. Voor meer details, zie gebruiksaanwijzing op keerzijde.

#### **Periodiek onderhoud.**

1. Eerste dag van de maand:
  - 1- Stoffilter vervangen (afkoeling)
  - 2- Toestel schoonmaken met een licht bevochtigde doek
  - 3- Neusbril (neuscanule) vervangen
  - 4- Bevochtiger volledig vervangen
2. Om de 6 maanden:
  - 1- Ingangfilter vervangen + de handelingen onder punt 1 hierboven.

***Wij danken u dat u voor een Oxycure concentrator gekozen heeft.***



Gamma Oxycure, van Links naar Recht.

*Draagbare Oxycure Concentratoren.*

*Draagbare Oxycure Concentrator – Oxus  
Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G3  
Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G2  
Draagbare Oxycure Concentrator – SimplyGo  
Draagbare Oxycure Concentrator – Eclipse5*

*Oxycure Concentratoren.*

*Oxycure Concentrator - Kröber*

*Oxycure flessen (zuurstofgas).*

*Oxycure fles B2 – 0,4 m<sup>3</sup>  
Oxycure fles B2 – 1,0 m<sup>3</sup>*

*Oxycure Reservoirs (vloeibare zuurstof).*

*Oxycure reservoir van vloeibare zuurstof - 25,6 m<sup>3</sup>  
Oxycure draagbare reservoir van vloeibaar zuurstof (1,0 m<sup>3</sup>)  
Oxycure draagbare reservoir van vloeibare zuurstof (0,5 m<sup>3</sup>)*

**Meer informatie op [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)**



Oxycure Belgium nv.

Business Park Fernelmont

L. Genicot, 9

B-5380 Fernelmont

Belgium

Tel. + 32 081 22 15 90

Fax + 32 081 22 15 99

<http://www.oxycure.be>

e-mail: [oxycure@oxycure.be](mailto:oxycure@oxycure.be)

---

## **OPENINGSUREN**

Maandag tot en met vrijdag

09.00 – 12.30 en 13.30 – 18.00

---

## **WACHTDIENST**

**0800 980 68**

U kunt ons 7 dagen op 7, 24 uren op 24 opbellen.

Deze dienst is uitsluitend voorbehouden voor de dringende installatie van toestellen en voor de herstelling van onze toestellen.

### **Als u de wachtdienst oproept:**

1. Spreek uw naam, telefoonnummer en een korte boodschap (reden van uw oproep) in;
2. De wachtdienst belt u binnen de 20 minuten terug;
3. Indien u geen bericht van de wachtdienst zou hebben gekregen na 20 minuten, gelieve een nieuwe boodschap achter te laten.

### **Opmerkingen**

1. De technische tussenkomsten (herstellingen) zijn inbegrepen in de prijs van de bijstand en van de huur.
2. Leveringen van goederen buiten de kantooruren zijn betalend.

# TERUGBETALING VAN DE OXYCURE CONCENTRATOR

De Oxycure concentrator is beschikbaar :

## 1. Bij uw apotheker, op voorschrift van een huisarts of een specialist.

Op grond van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2002, gewijzigd op 01 juli 2012, is de Oxycure concentrator terug betaalbaar op voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist voor :

- **de behandeling van een acute hypoxemie.**  
Maximale duur:3 maanden op 12, opeenvolgend of niet (van datum tot datum).  
Met de machtiging van de adviserende geneesheer.
- **palliatieve zorgen.**  
Onbepaalde duur  
Met de machtiging van de adviserende geneesheer.

### → UW ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN :

Om de vergoeding van het RIZIV te krijgen moet u met uw ziekenfonds of verzekering in orde zijn en :

- De machtiging van de adviserende geneesheer aan uw apotheker geven.
- In het begin van elke maand een voorschrift aan uw apotheker bezorgen.
- Het voorschrift met volgende gegevens afleveren :

<i>Oxycure</i>	<i>Voorbeeld</i>	<i>Oxycure</i>
<i>Startdatum van de behandeling</i>	<i>JJ/MM/AA</i>	<i>10/10/2014</i>
<i>Debiet en dagelijkse duur</i>		<i>2 LPM / 12 uren</i>
<i>Bevochtiger</i>		<i>Bevochtiger</i>

*Derdebetalersregeling toepasbaar (voor palliatieve zorgen)*

### → DE OXYCURE BEHANDELING BEVAT :

Benaming	Publieke prijs/maand	Bedrag ten laste van de patiënt
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving. Het afhalen van het materiaal op het einde van de behandeling.	31,80	0,00
De Oxycure concentrator De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling. De Oxycure 24u/24 – 7d/7 wachtdienst in geval van technische storingen.	90,10	0,00
De bevochtiger	5,51	0,00
Een draagbare reservefles (max. 1 m <sup>3</sup> )	0,00	0,00
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door uw apotheker		0,00

→ DE VERVANGING VAN DE ZUURSTOFFLES(SEN) gebeurt op medisch voorschrift, zonder vergoeding, zoals voorzien door het K.B. van 21/01/2001 (wijzigingen op 01/07/2012).

Libellé	Prix public par mois	Montant à votre charge
Medische zuurstof (/m <sup>3</sup> )	5,55	5,55
Huur van de flessen (forfait)	26,60	26,60
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door uw apotheker	-	-

## 2. In een dienst pneumologie op voorschrift van een longarts of kinderarts.

In het kader van de "Overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis voor ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie" is de Oxycure concentrator volledig vergoed voor een vernieuwbare periode van een jaar.

### → **UW ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN :**

- Bewijskrachtig onderzoek in een dienst pneumologie met de machtiging van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.
- Met roken ophouden.

### → **DE OXYCURE BEHANDELING BEVAT :**

Benaming	Bedrag ten laste van de patiënt
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving. Het afhalen van het materiaal op het einde van de behandeling.	0,00
De Oxycure concentrator De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling. De Oxycure 24u/24 – 7d/7 wachtdienst in geval van technische storingen.	0,00
De bevochtiger (1 per maand)	0,00
Een draagbare reservefles (stroomonderbreking)	0,00
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling	0,00

## 3. Bij uw apotheker voor een "Oxycure Prepaid 3" behandeling op voorschrift van een huisarts of een specialist.

Indien u geen recht (meer) heeft op de vergoeding van uw behandeling maar toch nog zuurstof nodig heeft volgens advies van de behandelende geneesheer, stellen we u onze formule '**Concentrator Oxycure Prepaid 3**' voor, zonder terugbetaling.

Het gebruik van de "**Oxycure Prepaid 3**" is elektronisch beperkt tot drie maanden en 999 uren. Om de drie maanden of wanneer het tijdskrediet opgebruikt is, laden wij de teller van de « **Concentrator Oxycure Prepaid 3** » tegen advies van uw arts en apotheker weer op. Deze formule staat garant voor de kwaliteit van de behandeling die identiek is aan degene met een Oxycure concentrator.

Omschrijving	Publieke Prijs Incl. 6%
Oxycure Concentrator Prepaid 3	192,44
Bevochtiging	11,02
Installatie	31,80

## 1. WAARSCHUWINGEN

---

De concentrator Oxycure mag enkel op doktersvoorschrift gebruikt worden.

De zuurstof die dit toestel afgeeft, is een geneesmiddel. Mochten er zich tijdens de therapie neveneffecten voordoen of mocht het welzijn sterk beperkt worden, raadpleeg onmiddellijk een arts.

Opgelet.

Dit document is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Deze gebruiksaanwijzing is beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits. Hij staat op onze site [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be) of kan aangevraagd worden bij onze klantendienst.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

---

De concentrator OXYCURE draagt het CE-keurmerk en voldoet aan alle normen die opgelegd zijn door de Europese Gemeenschap.

Dit toestel produceert zuurstof. Zuurstof versnelt de verbranding en veroorzaakt onmiddellijk brandwonden indien deze in contact wordt gebracht met oliën of vetten, zelfs met verzorgingscrèmes. Gelieve tijdens het gebruik van dit toestel, voor uw eigen veiligheid en deze van uw omgeving, volgende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven:

- 1. Niet roken.**
- 2. Het toestel buiten bereik van elke warmtebron, blote vlam of vonk gebruiken. Een afstand van minimum 2 meter is aangeraden.**
- 3. Het toestel, de toebehoren en uw gezicht moeten vetvrij zijn (geen zalven, crèmes, olie, enz.)**
- 4. Het toestel nooit opendoen, demonteren (risico op elektrocutie) of de etiketten nooit verwijderen**
- 5. Het toestel nooit afdekken**
- 6. Het toestel droog houden**

## 3. INCIDENTEN

---

Wat moet ik doen als mijn neusbril of zuurstofslang vuur vat?

*Dit kan gebeuren telkens wanneer zuurstof gebruikt wordt (gasvormige zuurstof in flessen, vloeibare zuurstof), als de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden.*


1. Verwijder de zuurstofslang van het toestel.
2. Schakel het toestel uit.
3. Doof de vlammen, met een deken bijvoorbeeld.
4. Verlucht de kamer tot alle rook en geuren verdwenen zijn.

## 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Oxycure – Kröber concentrator

<b>Fabrikant</b>	<b>Kröber Medizintechnik GmbH.</b> D-56332 Dieblich - Tel. +49 2607 9404	
<b>Model</b>	<b>Kröber O<sup>2</sup></b>	<b>Kröber O<sup>2</sup> v4.0</b>
MPG classificatie	IIa	IIa
Beveiligingsklasse	II	II
Spanning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Zekeringen : net : kaart	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V
Werkings temperatuur	10° à 40 ° C	10° à 40 ° C
Werkingsdruk (atmosferisch)	700 à 1060 mbar	700 à 1060 mbar
Afmetingen (H x P x L, in cm)	53,5 x 20,3 x 52 cm (zonder wielen)	53,5 x 20,3 x 52 cm (zonder wielen)
Gewicht	19,8 kg	16,0 Kg
Volumetrisch debiet	1 à 5 lpm (liters/min)	1 à 5 lpm (liters/min)
Nominale concentratie (Versie N51)	0,1 - 4 l/min 95% ±3% >4 - 5 l/min 85% ±3% 5 - 6 l/min 75% ±3%	0,1 - 4 l/min 95% ±3% >4 - 5 l/min 85% ±3% -
Alarmen (akoestisch et visueel)	Hoge temperatuur Stroomonderbreking Debiet Zuurstofconcentratie Systeem	Hoge temperatuur Stroomonderbreking Debiet Zuurstofconcentratie Systeem
Statusdisplay	Zuurstodebiet	Zuurstodebiet
<b>Geluidsterkte</b>	<b>35 dB(A)</b>	<b>31,1 dB(A)</b>
Verbruik	307 – max. 350 W	Max. 280 W
Keuringen	CE 0197	CE0197


## 5. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

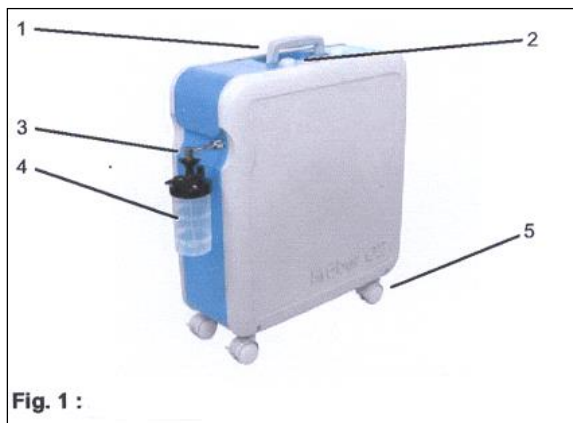


- 1. Handgreep
- 2. Bedieningspaneel (scherm en knoppen)
- 3. Zuurstofuitgang en hoekstuk
- 4. Bevochtiger
- 5. Wielen



- 6. Stroomkabel
- 7. Afneembaar rooster en stoffilter (afkoeling)

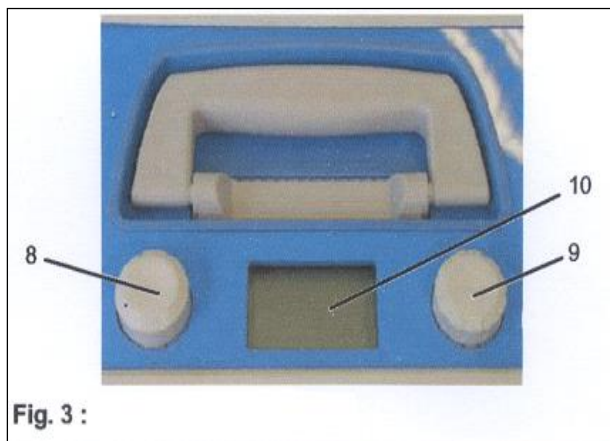

- 8. Schakelaar aan / uit
- 9. Debietknop
- 10. Scherm

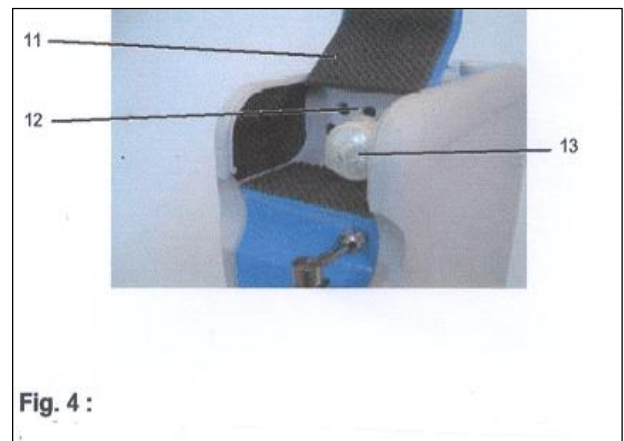

- 11. Deksel voor onderhoudsvak
- 12. Zekeringen
- 13. IngangsfILTER (inlaat)



## 6. NODIGE TOEBEHOREN

De onderstaande toebehoren moeten of kunnen met de concentrator Oxycure gebruikt worden. Uw assistent zal u helpen om ze te kiezen naargelang uw behoeften en wensen.

<b>Filters en toebehoren voor de Oxycure concentrator</b>		<b>Publieke prijs</b>
0116	Ingangfilter Kröber	6,89
0143	Stoffilter (afkoeling, 6 stks.)	6,36
0113	Fijnfilter Kröber (uitlaat)	6,89
0132	CPAP aansluiting 22F/22M/6mm	9,54
<b>Canules et maskers</b>		
4004-446	Neuscanule volwassenen SP (+1,8 m tube)	1,59
4004-784	Neuscanule volwassenen CP (+1,8 m tube)	3,18
4004-768	Neuscanule volwassenen FP (+1,8 m tube)	3,18
4004-800	Neuscanule volwassenen CFP (+1,8 m tube)	3,18
4004-453	Neuscanule K pediatriesch (+1,8 m darm)	3,18
4004-461	Neuscanule KK neonatal (+1,8 m darm)	3,18
4004-479	Zuurstofmasker volwassenen	2,44
4004-487	Zuurstofmasker pediatriesch	2,44
4004-834	Zuurstofmasker tracheotomie volwassenen	3,18
4004-867	Zuurstofmasker tracheotomie pediatriesch	3,18
4004-495	Zuurstofmasker HC100% High Concentration	3,18
<b>Verleng tubes en toebehoren</b>		
4004-875	Zuurstofveiligheidstube - 2,0 m	1,48
4004-883	Zuurstofveiligheidstube - 5,0 m	5,30
4004-891	Zuurstofveiligheidstube - 10,0 m	6,36
4004-909	Zuurstofveiligheidstube - 15,0 m	6,89
4004-917	Water trap	4,50
4004-537	Verbindingsstuk tube recht 5/5 mm	0,85
4004-859	Verbindingsstuk tube recht "swivel" 5/5 mm	2,60
4004-545	Verbindingsstuk darm T 6 mm	0,85
4004-842	Verbindingsstuk darm met moer op Kr-O2	13,67
<b>Bevochtigers en toebehoren</b>		
0139	Aansluiting RVS 90° voor bevochtiging	31,27
4004-792	Homecare bevochtiger 100 ml	4,03
4004-776	Homecare Bevochtiger 350 ml	4,03
4004-578	Bevochtiger Aquapack - Respiflo 325 ml	10,60
4004-586	Support voor bevochtiger	12,72
4004-552	Aansluiting 90°PE voor bevochtiger	4,77

De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling (zuurstofbrillen of zuurstofmaskers, bevochtigers, stoffilters, ingangfilter) worden geleverd bij de installatie en worden terugbetaald tot een aantal van één stuk per maand.

Oxycure levert de toebehoren bij de installatie voor een behandeling van 3 maanden. Na deze periode stuurt Oxycure u automatisch en gratis de nodige toebehoren voor de behandeling voor de 6 volgende maanden. Aan het einde van de behandeling moeten de ongebruikte toebehoren worden teruggegeven aan Oxycure. Indien niet worden ze gefactureerd aan hierboven vermelde prijzen.

Voor een optimale toepassing van de therapie en een perfecte werking van het toestel adviseren wij de toebehoren maandelijks te vervangen. Zie punt 14.

## 7. PLAATS VAN HET TOESTEL

---

De optimale werking van de concentrator Oxycure is pas mogelijk als de plaats van het toestel aan de volgende punten voldoet :

- Op een stevige en vlakke vloer, in een droge en goed verluchte omgeving.  
→ *Vermijd kleine ruimte of een badkamer.*
- Buiten warme of koude luchtstromen, buiten directe zonnestrallen.  
→ *Vermijd het toestel achter een raam of glazen deur te plaatsen.*
- Nooit het toestel afdekken.
- Op minimaal 30 cm afstand van de muur, gordijnen of andere grote voorwerpen (bv. meubels), om een normale luchtinlaat te waarborgen.
- Op een redelijke afstand van een warmtebron (2 meter).

## 8. HET TOESTEL OPSTARTEN


---

***De Oxycure – Kröber concentrator heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren. Het scherm kan gedurende deze periode een alarm tonen.***

***Als het alarm na 10 minuten aan blijft, bel onze dienst.***


### **Indien u gebruik maakt van een bevochtiger**

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan en sluit aan op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het hoekstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (zie foto 2).
3. Schroef de beker van de bevochtiger los en vul hem met water (stadswater, gedistilleerd water of Aqua Purificata), tussen het minimum en het maximum.
4. Schroef de beker weer op de houder. Zorg dat hij niet lekt. Als er hier een lek is, zal de gebruiker geen zuurstof krijgen.
5. Bevestig de neusbril (canule) aan het hoekstuk.
6. Koppel de neusbril (canule) of de zuurstofslang (verlengslang) aan de uitlaat van de bevochtiger.
7. Druk op de knop Aan / Uit (Fig. 3, 8 pagina 8).
8. Regel het debiet. Zie § 9 pagina 11.

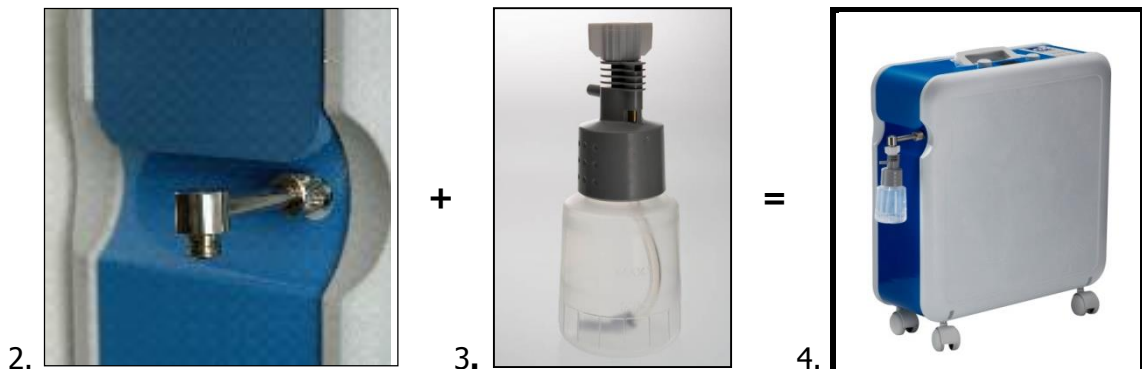

### **Indien u geen gebruik maakt van een bevochtiger**

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan (Beschrijving p. 8, Fig.2, 6) en sluit aan op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het conische tussenstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (foto 2 hieronder).
3. Schroef de kegelpunt van de hoekverbinder ( foto 5 hieronder )
4. Sluit de zuurstofslang aan op het conische tussenstuk.
5. Sluit de neusbil aan de zuurstofslang met het bijgeleverde aansluitstuk.
6. Schakel het toestel aan (Fig. 3, 8 pagina 8).
7. Regel het debiet.

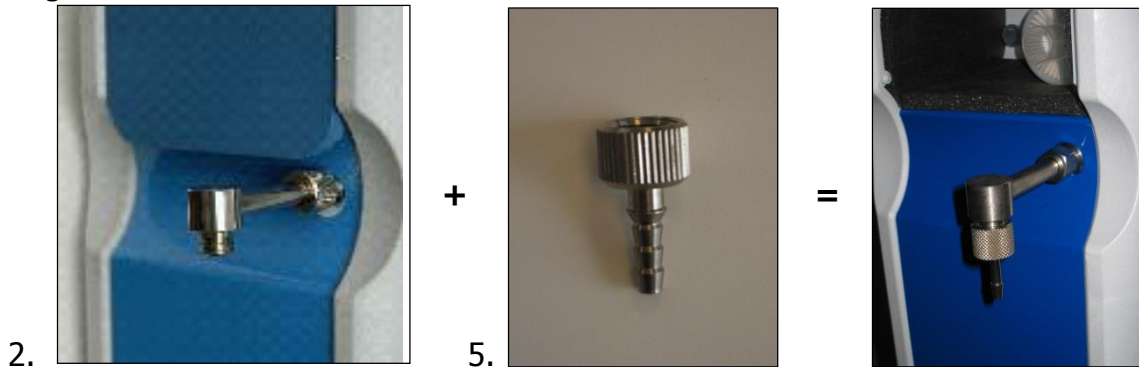

## **9. HET DEBIET INSTELLEN**

---

1. Duw enkele seconden op de debietknop (Fig. 3, 9 pagina 8) tot de aanduiding van het debiet (de cijfers) knippert.
2. Als de cijfers op het scherm beginnen te knippen (Fig. 3, 10 pagina 8), laat de knop los.
3. Draai de knop naar links om het debiet te verminderen, naar rechts om het debiet te verhogen.
4. Als de gewenste instelling verschijnt, druk de debietknop kort in om uw keuze te bevestigen. De gevraagde waarde verschijnt op het scherm. Het toestel zal het debiet aan de gewenste waarde aanpassen.

## **10. MELDING OP HET SCHERM**

---

Na de automatische testprocedure (diverse weergaves - test gedurende 20 tot 30 seconden) verschijnt het afgestelde debiet (voorbeeld: 2,0 lpm voor 2 liter per minuut) en het aantal werkuren van het toestel.

Wanneer de controlemodule een alarm detecteert, verschijnt het type gedetecteerde probleem op het scherm, met de knipperende melding "ERROR".



Zie in dat verband de volgende paragrafen





8. "Toestel opstarten".
- 11.A "Handige weetjes voor het gebruik".
- 11.B "Maatregelen bij alarm".

## 11. A. HANDIGE TIPS VOOR HET GEBRUIK

<b>Het toestel geeft een alarm signaal bij het opstarten.</b>	<p><i>Dit is normaal.</i></p> <p>Het toestel heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren. Het scherm kan gedurende deze periode een alarm tonen.</p> <p>Als het alarm na 10 minuten aan blijft, bel onze dienst.</p>
<b>Het toestel draait normaal, zonder alarm, produceert belletjes in de bevochtiger, maar u krijgt geen zuurstof.</b>	<p><i>De oorzaak hiervan is lekkage aan het geheel 'bevochtiger-zuurstofslang-zuurstofbril'.</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ga na of het hoekstuk (foto 2, p. 8) goed vastgeschroefd is.</li><li>2. Ga na of de bevochtiger goed vastgeschroefd is op het hoekstuk.</li><li>3. Ga na of de beker van de bevochtiger goed en volledig vastgeschroefd is.</li></ol> <p><b>De zuurstof kan enkel uit de bevochtiger door de aangesloten neusbril of zuurstofslang als de bevochtiger juist en hermetisch afgesloten is.</b></p>
<b>U krijgt water in de neusbril.</b>	<p><i>Dit is condensatie: de verwarmde en bevochtigde zuurstof (20-25°) gaat in een zuurstofslang die op een koude vloer loopt. Oplossingen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Ga na of de zuurstofslang niet meer over de koude vloer loopt.</li><li>2. Gebruik het toestel enige tijd zonder water in de bevochtiger.</li><li>3. Bestel een «Water trap» die het probleem gaat oplossen door het water in een kleine buis op te vangen.</li></ol>

## 11. B. MAATREGELEN BIJ ALARM

MELDING OP HET SCHERM → ALARM TYPE	TE TREFFEN MAATREGELEN
 <p>→ Debietalarm</p> <p>(Code_LPM)</p>	<p><i>De geproduceerde zuurstof kan niet tot bij de gebruiker omdat een van de toebehoren fout aangesloten is of niet meer werkt. Maatregelen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laat het toestel draaien om de volgende testprocedure uit te voeren.</li> <li>2. De bevochtiger loskoppelen van het toestel (hoekstuk van roestvrij staal). Als het alarm stopt, weet u zeker dat het probleem te zoeken is bij de toebehoren <u>NA</u> het toestel en <u>ga naar punt 3.</u> Als het alarm aanhoudt, bel de technische dienst op (het nummer staat op het toestel).</li> <li>3. Koppel alle toebehoren los. Verwijder de neusbril (canule), de zuurstofslang en de bevochtiger van het toestel.</li> <li>4. Schakel ze dan weer één na één aan in de volgende volgorde: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Bevochtiger</li> <li>. Slang (verlengslang)</li> <li>. Neusbril</li> </ul>                     Op die manier kunt u bepalen welk toebehoren problemen stelt. <ul style="list-style-type: none"> <li>. Zo nodig de bevochtiger vervangen.</li> <li>. Nagaan of de zuurstofbril (canule) of de zuurstofslang niet verstopt of geplooid is, of vastzit tussen een deur of onder de poot van een stoel. Maak de toebehoren vrij of vervang ze zondig. Als het alarm aanhoudt, teruggaan naar punt 3.</li> </ul> </li> <li>5. <u>B</u>el de technische dienst.</li> </ol>
 <p>→ Temperatuuralarm</p> <p>(Code_T°)</p>	<p><i>De werkingstemperatuur van het toestel is te hoog. Maatregelen:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het toestel uit om beschadiging te voorkomen.</li> <li>2. Ga na of het toestel staat waar en zoals het hoort en of er ongehinderd lucht in het toestel kan.</li> <li>3. Controleer de stoffilter, vervang zondig.</li> <li>4. Het toestel weer aanschakelen.</li> <li>5. Als het alarm aanhoudt, het toestel uitschakelen om het niet te beschadigen.</li> <li>6. Tijdelijk de reservefles gebruiken die Oxycure leverde.</li> <li>7. De technische dienst bellen.</li> </ol>

 <p>→ Stroomonderbreking</p> <p>Code_AC</p>	<p><i>Er is geen stroom meer.</i> <u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ga na of de stroomkabel wel goed aangesloten is op een stopcontact.</li> <li>2. Controleer de zekeringen van uw woning.</li> <li>3. Test een ander elektrisch toestel op hetzelfde stopcontact.</li> <li>4. Als het alarm aanhoudt, tijdelijk de reservefles gebruiken.</li> <li>6. Onze technische dienst opbellen.</li> </ol>
 <p>→ Zuurstofalarm (O<sup>2</sup> is het symbool voor zuurstof)</p> <p>(Code_O2)</p>	<p><i>De multifunctionele sensor heeft een lage zuurstofconcentratie gemeten (&lt; 82%).</i> <b><i>Uw toestel geeft nog altijd zuurstof af, maar in een lagere concentratie.</i></b> <u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de bevochtiger en de zuurstofslangen op lekken.</li> <li>2. Bel de technische dienst.</li> </ol>
 <p>→ Sensoralarm</p> <p>(Code_SE)</p>	<p><i>De multifunctionele sensor kan het debiet en de zuurstofconcentratie niet bepalen.</i> <u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tijdelijk de reservefles gebruiken.</li> <li>2. Melden aan de technische dienst.</li> </ol>
 <p>→ Algemeen alarm</p> <p>(Code_ERR)</p>	<p><i>Toestel defect. De productie van zuurstof is onderbroken.</i> <u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het toestel onmiddellijk uitschakelen.</li> <li>2. De technische dienst oproepen.</li> </ol>

## 12. ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN OXYCURE

### ▪ De saturatiemeter

De saturatiemeter is een toestel dat het zuurstofgehalte in het bloed meet. De saturatiemeter helpt te bepalen of een zuurstoftherapie nodig of efficiënt is.

#### Modellen.

- MD300 C13, voor individueel gebruik.
- MD300 C63, voor professioneel gebruik.
- MD300 C5, voor pediatrisch gebruik.

- Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan.  
Raadpleeg onze website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)



MD300 C63

### ▪ De kleine Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen



De Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen, met ingebouwde ontspanner, is DE oplossing bij een stroomonderbreking. Eén m<sup>3</sup> geeft een autonomie van 8 uren 20 minuten op 2 LPM.

#### Modellen.

- |    |                    |
|----|--------------------|
| B5 | 1,0 m <sup>3</sup> |
| B2 | 0,4 m <sup>3</sup> |

- Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan.  
Raadpleeg onze website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)

### ▪ De Oxycure draagbare concentrator – Inogen, Simply Go

De Oxycure draagbare concentrator is een draagbaar en autonoom medisch hulpmiddel dat het equivalent van 1 tot 5 liter zuurstof per minuut produceert. De Oxycure draagbare concentrator is compact en licht en heeft een bijna onbeperkte autonomie. Hij werkt zowel met een oplaadbare batterij als op stroom (wisselstroom 110-240 volt) of in een auto (gelijkstroom 12 volt), zonder enige onderbreking als van energiebron wordt gewisseld. De Oxycure draagbare concentrator is uitgerust met een spaarventiel (op verzoek).

De Oxycure draagbare concentrator is over het algemeen niet geschikt voor gebruik tijdens de slaap.



- Meer informatie op [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)  
of bij onze klantendienst



### 13. OPVOLGING VAN UW THERAPIE

---

<b>Uw Oxycure assistent</b>


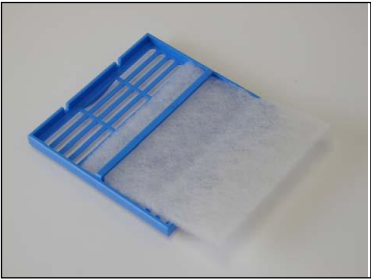

*Vraag uw arts om hieronder de voorgeschreven opeenvolgende doses te noteren.*

<b>Datum</b>	<b>Liters per minuut (LPM)</b>	<b>Uren per dag</b>	<b>Opmerkingen</b>

**Opmerkingen.**



## 14. PERIODIEK ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER

PERIODICITEIT	ACTIES
Elke dag <i>(Sterk aangeraden)</i>	De bevochtiger schoonmaken en ontsmetten met een ontsmettingsproduct (te koop in de handel) of met een oplossing van 10% azijn en 90% water. Het water van de bevochtiger vervangen.
Elke dag <i>(Sterk aangeraden)</i>	De neuscanule reinigen (met de opening naar onder): met warm zeepwater of met een oplossing van water (90%) en azijn (10%). Zorgvuldig spoelen en laten drogen vóór hergebruik.
<b>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</b>	<p><b>De stoffilter vervangen (afkoeling)</b> De filter met lauw water met een beetje zeep schoonmaken, goed uitspoelen en laten drogen voor hergebruik. De aldus schoongemaakte filter kan de volgende maand hergebruikt worden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<b>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</b>	Neuscanule (of bril) of masker vervangen. Bevochtiger vervangen.
<b>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</b>	Onderhoud van het toestel met een licht bevochtigde doek (mild huishoudelijk onderhoudsproduct).
<b>Elke 6 maanden of om de 5.000 uren maximum Op uitdrukkelijk verzoek van Oxycure (Verplicht)</b>	<p><b>Inlaatfilter vervangen</b> (automatisch door Oxycure om de 6 maanden geleverd). De filter lichtjes draaien in tegengestelde wijzerzin en trekken. De nieuwe filter op de greep vervangen.</p> 

## **VERPLICHT PROGRAMMA VOOR DE VERVANGING VAN DE TOEBEHOREN**

**Gelieve het onderstaand programma voor de vervanging van de toebehoren te volgen en het aantal uren van de concentrator Oxycure op die datum te vermelden.**

Met deze gegevens kan uw arts de loop van uw behandeling opvolgen.

<b>Maand</b>	<b>Acties op de eerste dag van de maand</b>	<b>Aantal uren van de concentrator Oxycure</b>
1 INSTALLATIE OP		
2	<u>Vervangen:</u> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken	
3		

**In de loop van de 4<sup>de</sup> maand bezorgt Oxycure de toebehoren voor de behandeling van de 6 volgende maanden.**

4	<u>Vervangen:</u> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken	
5		
6		
7	<b>INGANGSFILTER EN TOEBEHOREN VERVANGEN</b>	
8	<u>Vervangen:</u> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken	
9		
10		
11		
12		

### ▪ **Toebehoren voor een bijkomende behandeling van 6 maanden.**

Na de eerste drie maanden krijgt u een doos met de toebehoren voor een bijkomende behandeling van zes maanden. Deze dienst is in de terugbetaling inbegrepen.