



Oxycure Reserve Concentrator Kröber O2 - R

Gebruiksaanwijzing



BEPERKT GEBRUIK : 50 UREN

Het toestel aanschakelen : samengevatte instructies.

Van zodra u dit reservetoestel in werking zet, Oxycure opbellen om een Oxycure concentrator te bestellen die terugbetaalbaar is op naam van de patiënt.

1. Aan/Uit knop indrukken I/O
2. Aantal liters instellen met tweede knop !
 - 1- Knop blijven indrukken tot de gegevens op het scherm knippen;
 - 2- Knop loslaten;
 - 3- Knop draaien tot het gewenste aantal liters bereikt is;
 - 4- Knop terug indrukken ter bevestiging van het debiet.
3. Voor meer details, zie gebruiksaanwijzing op keerzijde.

Periodiek onderhoud

1. Eerste dag van de maand:
 - 1- Stoffilter vervangen (afkoeling)
 - 2- Toestel schoonmaken met een licht bevochtigde doek
 - 3- Neusbril (neuscanule) vervangen
 - 4- Bevochtiger volledig vervangen
2. Om de 6 maanden:
 - 1- Ingangfilter vervangen + de handelingen onder punt 1 hierboven.

Wij danken u dat u voor een Oxycure concentrator gekozen heeft.



Gamma Oxycure, van Links naar Recht.

Draagbare Oxycure Concentratoren.

Draagbare Oxycure Concentrator – Oxus
Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G3
Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G2
Draagbare Oxycure Concentrator – SimplyGo
Draagbare Oxycure Concentrator – Eclipse5

Oxycure Concentratoren.

Oxycure Concentrator - Kröber

Oxycure flessen (zuurstofgas).

Oxycure fles B2 – 0,4 m³
Oxycure fles B2 – 1,0 m³

Oxycure Reservoirs (vloeibare zuurstof).

Oxycure reservoir van vloeibare zuurstof - 25,6 m³
Oxycure draagbare reservoir van vloeibaar zuurstof (1,0 m³)
Oxycure draagbare reservoir van vloeibare zuurstof (0,5 m³)

Meer informatie op www.oxycure.be



Oxycure Belgium nv.

Business Park Fernlmont

L. Génicot, 9

B-5380 Fernelmont

Belgium

Tel. + 32 081 22 15 90

Fax + 32 081 22 15 99

<http://www.oxycure.be>

e-mail: oxycure@oxycure.be

OPENINGSUREN

Maandag tot en met vrijdag

09.00 – 12.30 en 13.30 – 18.00

WACHTDIENST

0800 980 68

U kunt ons 7 dagen op 7, 24 uren op 24 opbellen.

Deze dienst is uitsluitend voorbehouden voor de dringende installatie van toestellen en voor de herstelling van onze toestellen.

Als u de wachtdienst oproept:

1. Spreek uw naam, telefoonnummer en een korte boodschap (reden van uw oproep) in;
2. De wachtdienst belt u binnen de 20 minuten terug;
3. Indien u geen bericht van de wachtdienst zou hebben gekregen na 20 minuten, gelieve een nieuwe boodschap achter te laten.

Opmerkingen

1. De technische tussenkomsten (herstellingen) zijn inbegrepen in de prijs van de bijstand en van de huur.
2. Leveringen van goederen buiten de kantooruren zijn betalend.

1. WAARSCHUWINGEN

De concentrator Oxycure mag enkel op doktersvoorschrift gebruikt worden.

De zuurstof die dit toestel afgeeft, is een geneesmiddel. Mochten er zich tijdens de therapie neveneffecten voordoen of mocht het welzijn sterk beperkt worden, raadpleeg onmiddellijk een arts.

Het gebruik van deze Oxycure reserveconcentrator is elektronisch beperkt tot 50 uur.

Gelieve bij het opstarten van dit reservetoestel Oxycure op te bellen om een Oxycure concentrator te bestellen op naam van de patiënt.

Oxycure wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze procedure niet wordt gevolgd.

Na uw oproep organiseert Oxycure op het moment dat u het best past en in functie van de dringendheid :

1. De levering en installatie van de Oxycure concentrator die terugbetaalbaar is op naam van uw patiënt of bewoner.
2. Het vervangen van uw reserveconcentrator door een reserveconcentrator met een autonome werking van 50 uur.

Opgelet.

Dit document is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Deze gebruiksaanwijzing is beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits. Hij staat op onze site www.oxycure.be of kan aangevraagd worden bij onze klantendienst.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De concentrator OXYCURE draagt het CE-keurmerk en voldoet aan alle normen die opgelegd zijn door de Europese Gemeenschap.

Dit toestel produceert zuurstof. Zuurstof versnelt de verbranding en veroorzaakt onmiddellijk brandwonden indien deze in contact wordt gebracht met oliën of vetten, zelfs met verzorgingscrèmes. Gelieve tijdens het gebruik van dit toestel, voor uw eigen veiligheid en deze van uw omgeving, volgende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven:

1. **Niet roken.**
2. **Het toestel gebruiken buiten bereik van elke warmtebron, blote vlam of vonk. Een afstand van minimum 2 meter is aangeraden.**
3. **Het toestel, de toebehoren en uw gezicht moeten vetvrij zijn (geen zalven, crèmes, olie, enz.).**
4. **Het toestel nooit opendoen, demonteren (risico op elektrocutie) of de etiketten nooit verwijderen.**
5. **Het toestel nooit afdekken.**
6. **Het toestel droog houden.**

3. INCIDENTEN

Wat moet ik doen als mijn neusbril of zuurstofslang vuur vat?

Dit kan gebeuren telkens wanneer zuurstof gebruikt wordt (gasvormige zuurstof in flessen, vloeibare zuurstof), als de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden.


1. Verwijder de zuurstofslang van het toestel.
2. Schakel het toestel uit.
3. Doof de vlammen, met een deken bijvoorbeeld.
4. Verlucht de kamer tot alle rook en geuren verdwenen zijn.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

Oxycure – Kröber Reserve concentrator

| | |
|------------------------------------|---|
| Fabrikant | Kröber Medizintechnik GmbH. D-56332 Dieblich Tel. +49 2607 9404 |
| Model | O² - R |
| BEPERKT GEBRUIK | 50 Uren |
| MEDDEV classificatie | IIa |
| Beveiligingsklasse | II |
| Spanning | 230 V, 50 Hz |
| Zekeringen : net : kaart | 2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V |
| Werkings temperatuur | 10° à 40 ° C |
| Werkingsdruk (atmosferisch) | 700 à 1060 mbar |
| Afmetingen (H x P x L, in cm) | 53,5 x 20,3 x 52 cm (zonder wielen) |
| Gewicht | 19,8 kg |
| Volumetrisch debiet | 1 à 5 lpm (liters/min) |
| Nominale concentratie (Versie N51) | 0,1 - 4 l/min 95% -3% >4 - 5 l/min 85% ±3% 5 - 6 l/min 75% ±3% |
| Alarmen (akoestisch en visueel) | Hoge temperatuur Stroomonderbreking Debiet Zuurstofconcentratie Systeem |
| Statusdisplay | Zuurstodebiet |
| Geluidsterkte | 35 dB(A) |
| Verbruik | 307 – max. 350 W |
| Keuringen | CE 0197 |


5. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

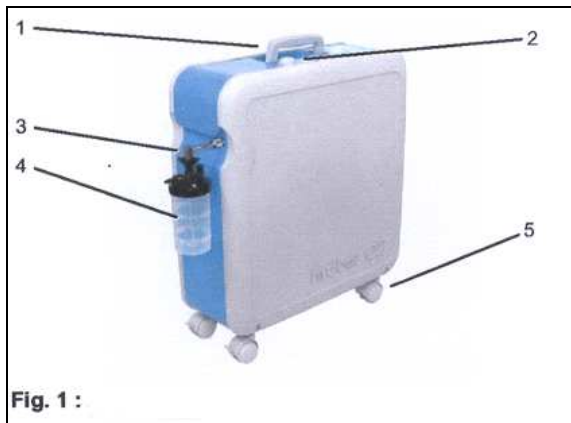


1. Handgreep
2. Bedieningspaneel (scherm en knoppen)
3. Zuurstofuitgang en hoekstuk
4. Bevochtiger
5. Wielen



6. Stroomkabel
7. Afneembaar rooster en stoffilter (afkoeling)

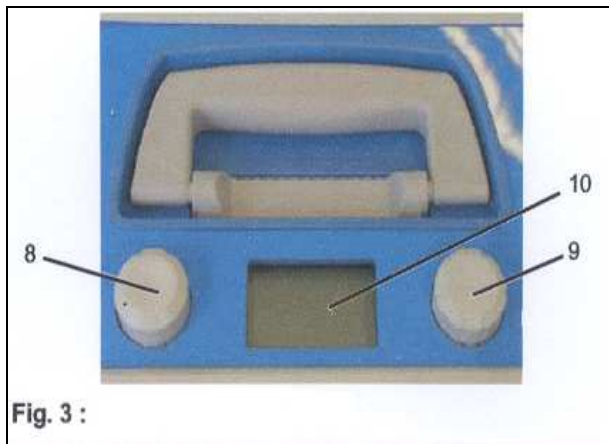


8. Schakelaar aan / uit
9. Debietknop
10. Scherm

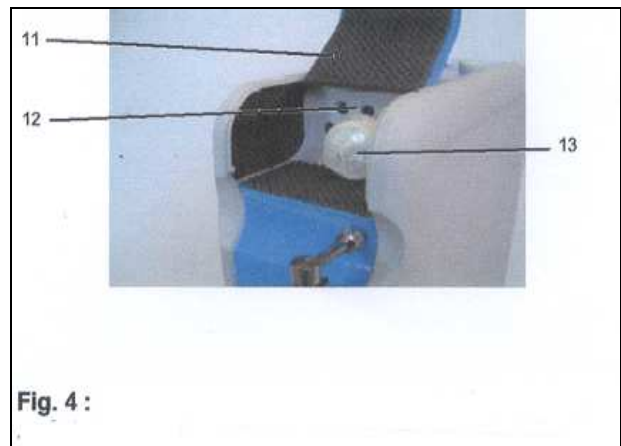

11. Deksel voor onderhoudsvak
12. Zekeringen
13. Ingangfilter (inlaat)

De Oxycure reserveconcentrator is voorzien van twee rode stickers op de zijkanten.

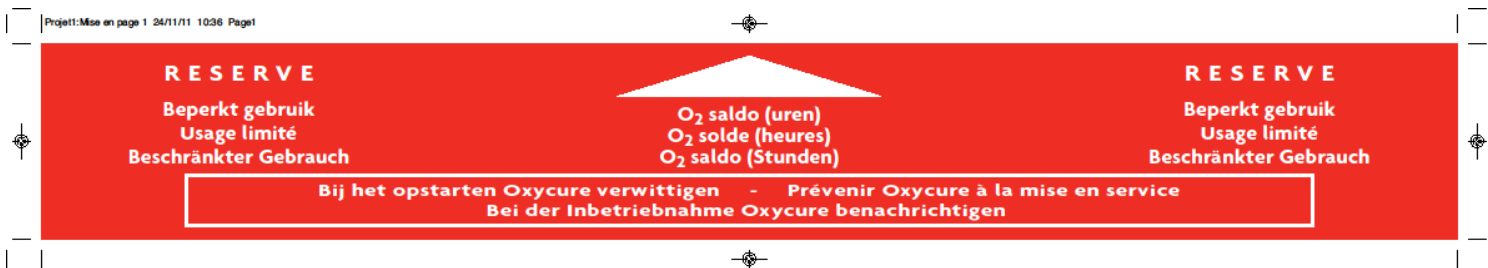

6. NODIGE TOEBEHOREN

De onderstaande toebehoren moeten of kunnen met de concentrator Oxycure gebruikt worden.

| Filters en toebehoren voor de Oxycure concentrator | | Publieke prijs |
|---|--|-----------------------|
| 0116 | Ingangsfiler Kröber | 6,89 |
| 0143 | Stofffilter (afkoeling, 6 stks.) | 6,36 |
| 0113 | Fijnfilter Kröber (uitlaat) | 6,89 |
| 0132 | CPAP aansluiting 22F/22M/6mm | 9,54 |
| Canules et maskers | | |
| 4004-446 | Neuscanule volwassenen SP (+1,8 m tube) | 1,59 |
| 4004-784 | Neuscanule volwassenen CP (+1,8 m tube) | 3,18 |
| 4004-768 | Neuscanule volwassenen FP (+1,8 m tube) | 3,18 |
| 4004-800 | Neuscanule volwassenen CFP (+1,8 m tube) | 3,18 |
| 4004-453 | Neuscanule K pediatrisch (+1,8 m darm) | 3,18 |
| 4004-461 | Neuscanule KK neonatal (+1,8 m darm) | 3,18 |
| 4004-479 | Zuurstofmasker volwassenen | 2,44 |
| 4004-487 | Zuurstofmasker pediatrisch | 2,44 |
| 4004-834 | Zuurstofmasker tracheotomie volwassenen | 3,18 |
| 4004-867 | Zuurstofmasker tracheotomie pediatrisch | 3,18 |
| 4004-495 | Zuurstofmasker HC100% High Concentration | 3,18 |
| Verleng tubes en toebehoren | | |
| 4004-875 | Zuurstofveiligheidstube - 2,0 m | 1,48 |
| 4004-883 | Zuurstofveiligheidstube - 5,0 m | 5,30 |
| 4004-891 | Zuurstofveiligheidstube - 10,0 m | 6,36 |
| 4004-909 | Zuurstofveiligheidstube - 15,0 m | 6,89 |
| 4004-917 | Water trap | 4,50 |
| 4004-537 | Verbindingsstuk tube recht 5/5 mm | 0,85 |
| 4004-859 | Verbindingsstuk tube recht "swivel" 5/5 mm | 2,60 |
| 4004-545 | Verbindingsstuk darm T 6 mm | 0,85 |
| 4004-842 | Verbindingsstuk darm met moer op Kr-O2 | 13,67 |
| Bevochtigers en toebehoren | | |
| 0139 | Aansluiting RVS 90° voor bevochtiging | 31,27 |
| 4004-792 | Homecare bevochtiger 100 ml | 4,03 |
| 4004-776 | Homecare Bevochtiger 350 ml | 4,03 |
| 4004-578 | Bevochtiger Aquapack - Respiflo 325 ml | 10,60 |
| 4004-586 | Support voor bevochtiger | 12,72 |
| 4004-552 | Aansluiting 90°PE voor bevochtiger | 4,77 |

De toebehoren die nodig zijn voor de toepassing van de therapie (brillen of zuurstofmaskers) worden meegeleverd bij de installatie van dit reservetoestel, met uitzondering van de bevochtiger.

Oxycure raadt aan om de toebehoren bij elke nieuwe patiënt te vervangen.

Zie eveneens punt 14.

7. PLAATS VAN HET TOESTEL

De optimale werking van de concentrator Oxycure is pas mogelijk als de plaats van het toestel aan de volgende punten voldoet :

- Op een stevige en vlakke vloer, in een droge en goed verluchte omgeving.
→ *Vermijd kleine ruimte of een badkamer.*
- Buiten warme of koude luchtstromen, buiten directe zonnestralen.
→ *Vermijd het toestel achter een raam of glazen deur te plaatsen.*
- Het toestel nooit afgedekken.
- Op minimaal 30 cm afstand van de muur, gordijnen of andere grote voorwerpen (bv. meubels), om een normale luchtinlaat te waarborgen.
- Op een redelijke afstand van een warmtebron (2 meter).

8. HET TOESTEL OPSTARTEN

De Oxycure – Kröber concentrator heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren. Het scherm kan gedurende deze periode een alarm tonen.

Als het alarm na 10 minuten aan blijft, bel onze dienst.


Indien u gebruik maakt van een bevochtiger

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan en sluit aan op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het hoekstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (zie foto 1).
3. Schroef de beker van de bevochtiger los en vul hem met water (stadswater, gedistilleerd water of Aqua Purificata), tussen het minimum en het maximum.
4. Schroef de beker weer op de houder. Zorg dat hij niet lekt. Als er hier een lek is, zal de gebruiker geen zuurstof krijgen.
5. Bevestig de bevochtiger aan het hoekstuk.
6. Koppel de neusbil (canule) of de zuurstofslang (verlengslang) aan de uitlaat van de bevochtiger.
7. Druk op de knop Aan / Uit (Fig. 3, 8).
8. Regel het debiet. Zie § 9.



Indien u geen gebruik maakt van een bevochtiger

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan (Beschrijving p. 6, Fig.2,6) en sluit aan op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het conische verbindingstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (foto 2 hieronder).
3. Schroef de kegelpunt van de hoekverbinder (foto 5 hieronder)
4. Sluit de zuurstofslang aan op het conische verbindingstuk.
5. Sluit de neusbril aan op de zuurstofslang met het bijgeleverde aansluitstuk.
6. Schakel het toestel aan (Fig. 3, 8).
7. Regel het debiet.

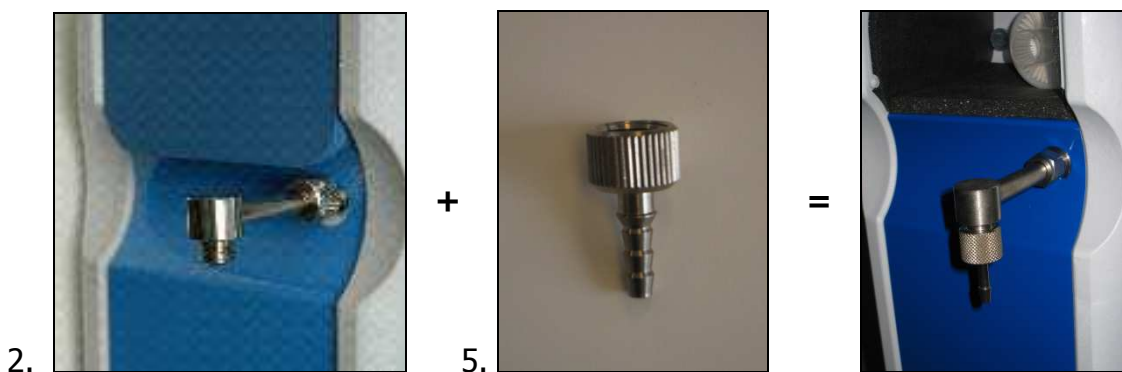


9. HET DEBIET INSTELLEN.

1. Duw enkele seconden op de debietknop (Fig. 3, 9) tot de aanduiding van het debiet (de cijfers) knippert.
2. Als de cijfers op het scherm beginnen te knipperen (Fig. 3, 10), laat de knop los.
3. Draai de knop naar links om het debiet te verminderen, naar rechts om het debiet te verhogen.
4. Als de gewenste instelling verschijnt, druk de debietknop kort in om uw keuze te bevestigen. De gevraagde waarde verschijnt op het scherm. Het toestel zal het debiet aan de gewenste waarde aanpassen.


10.A. MELDINGEN OP HET SCHERM (uitsluitend voor de reserve concentrator).

Na de automatische testprocedure (diverse weergaves - test gedurende 20 tot 30 seconden) verschijnt (achtereenvolgens) :

1. Het ingestelde debiet (bijvoorbeeld : « 2,0 lpm » voor 2 liter per minuut).
2. Het totale aantal werkingsuren van het apparaat.
3. Het saldo van het aantal gebruiksuren en het ingestelde debiet, als volgt :

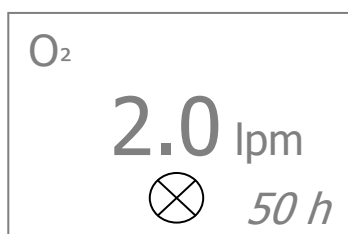

4. Wanneer de 50 reserve-werkingsuren zijn opgebruikt, zal de reserveconcentrator geen zuurstof meer leveren. Op het controlescherm verschijnt :

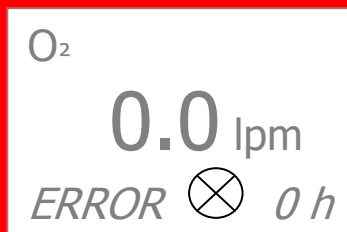

Belangrijke nota.

Het scherm toont geen minuten. Wanneer het scherm een uur toon (1 h), ligt de effectieve werkingsreserve van het toestel tussen 1 en 59 minuten.

10.B. ANDERE MELDINGEN OP HET SCHERM.



Wanneer de controlemodule een alarm detecteert, verschijnt het type gedetecteerde probleem op het scherm, met de knipperende melding "ERROR".






Zie in dat verband de volgende paragrafen "8. "Toestel opstarten", 11.A "Handige tips voor het gebruik", 11.B "Maatregelen bij alarm".

11. A. HANDIGE TIPS VOOR HET GEBRUIK .

| | |
|--|--|
| <p>Het toestel geeft een alarm signaal bij het opstarten.</p> | <p><i>Dit is normaal.</i></p> <p>Het toestel heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren. Het scherm kan gedurende deze periode een alarm tonen.</p> <p>Als het alarm na 10 minuten aan blijft, bel onze dienst.</p> |
| <p>Het toestel draait normaal, zonder alarm, produceert belletjes in de bevochtiger, maar u krijgt geen zuurstof.</p> | <p><i>De oorzaak hiervan is lekkage aan het geheel 'bevochtiger-zuurstofslang-zuurstofbril'.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ga na of het hoekstuk (foto 2, p. 8) goed vastgeschroefd is. 2. Ga na of de bevochtiger goed vastgeschroefd is op het hoekstuk. 3. Ga na of de beker van de bevochtiger goed en volledig vastgeschroefd is. <p>De zuurstof kan enkel uit de bevochtiger door de aangesloten neusbril of zuurstofslang als de bevochtiger juist en hermetisch afgesloten is.</p> |

11. B. MAATREGELEN BIJ ALARM

| MELDING OP HET SCHERM → ALARM TYPE | TE TREFFEN MAATREGELEN |
|--|--|
|  <p>→ Debietalarm</p> <p>(Code_LPM)</p> | <p><i>De geproduceerde zuurstof kan niet tot bij de gebruiker omdat een van de toebehoren fout aangesloten is of niet meer werkt. <u>Maatregelen:</u></i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laat het toestel draaien om de volgende testprocedure uit te voeren. 2. De bevochtiger loskoppelen van het toestel (hoekstuk van roestvrij staal). Als het alarm stopt, weet u zeker dat het probleem te zoeken is bij de toebehoren <u>NA</u> het toestel en <u>ga naar punt 3.</u> Als het alarm aanhoudt, bel de technische dienst op (het nummer staat op het toestel). 3. Koppel alle toebehoren los. Verwijder de neusbil (canule), de zuurstofslang en de bevochtiger van het toestel. 4. Schakel ze dan weer één na één aan in de volgende volgorde: <ul style="list-style-type: none"> . Bevochtiger . Slang (verlengslang) . Neusbil Op die manier kunt u bepalen welk toebehoren problemen stelt. <ul style="list-style-type: none"> . Zo nodig de bevochtiger vervangen. . Nagaan of de zuurstofbil (canule) of de zuurstofslang niet verstopt of geplooid is, of vastzit tussen een deur of onder de poot van een stoel. Maak de toebehoren vrij of vervang ze zonodig. Als het alarm aanhoudt, teruggaan naar punt 3. 5. <u>Bel</u> de technische dienst. |
|  <p>→ Temperatuuralarm</p> <p>(Code_T°)</p> | <p><i>De werkingstemperatuur van het toestel is te hoog. <u>Maatregelen:</u></i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het toestel uit om beschadiging te voorkomen. 2. Ga na of het toestel staat waar en zoals het hoort en of er ongehinderd lucht in het toestel kan. 3. Controleer de stoffilter, vervang zonodig. 4. Het toestel weer aanschakelen. 5. Als het alarm aanhoudt, het toestel uitschakelen om het niet te beschadigen. 6. Tijdelijk de reservefles gebruiken die Oxycure leverde. 7. De technische dienst bellen. |
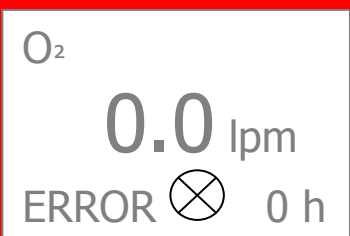
| | |
|---|--|
|  <p>→ Stroomonderbreking</p> <p>Code_AC</p> | <p><i>Er is geen stroom meer.</i></p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ga na of de stroomkabel wel goed aangesloten is op een stopcontact. 2. Controleer de zekeringen van uw woning. 3. Test een ander elektrisch toestel op hetzelfde stopcontact. 4. Als het alarm aanhoudt, tijdelijk de reservefles gebruiken. 6. Onze technische dienst opbellen. |
|  <p>→ Zuurstofalarm (O² is het symbool voor zuurstof) (Code_O2)</p> | <p><i>De multifunctionele sensor heeft een lage zuurstofconcentratie gemeten (< 82%).</i></p> <p><i>Uw toestel geeft nog altijd zuurstof af, maar in een lagere concentratie.</i></p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de bevochtiger en de zuurstofslangen op lekken. 2. Bel de technische dienst. |
|  <p>→ Sensoralarm (Code_SE)</p> | <p><i>De multifunctionele sensor kan het debiet en de zuurstofconcentratie niet bepalen.</i></p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdelijk de reservefles gebruiken. 2. Melden aan de technische dienst. |
|  <p>→ Algemeen alarm (Code_ERR)</p> | <p><i>Toestel defect. De productie van zuurstof is onderbroken.</i></p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het toestel onmiddellijk uitschakelen. 2. De technische dienst oproepen. |
|  <p>→ Einde van de reserve-werkingsuren.</p> | <p>Einde van de 50 reserve-werkingsuren.</p> <p><u>Te nemen maatregelen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het toestel (compressor) uitschakelen door op de aan/uit-knop te duwen. 2. Onmiddellijk de wachtdienst opbellen. |

12. ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN OXYCURE.

▪ De saturatiemeter

De saturatiemeter is een toestel dat het zuurstofgehalte in het bloed meet. De saturatiemeter helpt te bepalen of een zuurstoftherapie nodig of efficiënt is.

Modellen.

MD300 C13, voor individueel gebruik.
MD300 C63, voor professioneel gebruik.
MD300 C5, voor pediatrisch gebruik.



MD300 C63

- Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan.
Raadpleeg onze website www.oxycure.be

▪ De kleine Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen



De Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen, met ingebouwde ontspanner, is DE oplossing bij een stroomonderbreking. Eén m³ geeft een autonomie van 9 uren op 2 LPM.

Modellen.

| | |
|----|--------------------|
| B5 | 1,0 m ³ |
| B2 | 0,4 m ³ |

- Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan.
→ Raadpleeg onze website www.oxycure.be

▪ De Oxycure draagbare concentrator – Inogen, Simply Go

De Oxycure draagbare concentrator is een draagbaar en autonoom medisch hulpmiddel dat het equivalent van 1 tot 5 liter zuurstof per minuut produceert. De Oxycure draagbare concentrator is compact en licht en heeft een bijna onbeperkte autonomie. Hij werkt zowel met een oplaadbare batterij als op stroom (wisselstroom 110-240 volt) of in een auto (gelijkstroom 12 volt), zonder enige onderbreking als van energiebron wordt gewisseld. De Oxycure draagbare concentrator is uitgerust met een spaarventiel.

De Oxycure draagbare concentrator is over het algemeen niet geschikt voor gebruik tijdens de slaap.


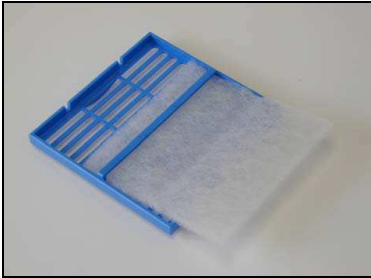



→ Meer informatie op www.oxycure.be
of bij onze klantendienst



14. PERIODIEK ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER

Uw reserve toestel wordt maximum om de 50 werkingsuren vervangen. Er is periodiek onderhoud nodig. Ter informatie, is het onderhoud van een Oxycure concentrator, voor een continu gebruik, als volgt :

| PERIODICITEIT | ACTIES |
|--|---|
| Elke dag <i>(Sterk aangeraden)</i> | De bevochtiger schoonmaken en ontsmetten met een ontsmettingsproduct (te koop in de handel) of met een oplossing van 10% azijn en 90% water. Het water van de bevochtiger vervangen. |
| Elke dag <i>(Sterk aangeraden)</i> | De neuscanule reinigen (met de opening naar onder): met warm zeepwater of met een oplossing van water (90%) en azijn (10%). Zorgvuldig spoelen en laten drogen vóór hergebruik. |
| Elke eerste dag van de maand (verplicht) | <p>De stoffilter vervangen (afkoeling) De filter met lauw water met een beetje zeep schoonmaken, goed uitspoelen en laten drogen voor hergebruik. De aldus schoongemaakte filter kan de volgende maand hergebruikt worden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> |
| Elke eerste dag van de maand (verplicht) | Neuscanule (of bril) of masker vervangen. Bevochtiger vervangen. |
| Elke eerste dag van de maand (verplicht) | Onderhoud van het toestel met een licht bevochtigde doek (mild huishoudelijk onderhoudsproduct). |
| Elke 6 maanden of om de 5.000 uren maximum Op uitdrukkelijk verzoek van Oxycure (Verplicht) | <p>Inlaatfilter vervangen (automatisch geleverd door Oxycure om de 6 maanden). De filter lichtjes draaien in tegengestelde wijzerzin en trekken. De nieuwe filter op de greep vervangen.</p>  |

OPMERKINGEN.

