



Oxycure Reserve-Konzentrator Kröber O2 - R

Gebrauchsanweisung



Beschränkter Gebrauch : 50 Stunden

Inbetriebnahme : Zusammenfassung der Anweisungen.

Nach der Inbetriebnahme dieses Reservegerätes rufen Sie bitte Oxycure an, um im Namen des Patienten einen rückerstattungsfähigen Oxycure-Konzentrator zu bestellen.

1. Ein/Aus-Schalter drücken I/O
2. Den Durchfluss mit dem zweiten Schalter einstellen !
 - 1- Den Schalter/Regler gedrückt halten, bis die Daten auf dem Bildschirm blinken;
 - 2- Den Druck nachlassen;
 - 3- Den Regler bis zum Erhalt des gewünschten Durchflusses drehen;
 - 4- Erneut auf den Regler drücken, um Ihre Einstellung zu bestätigen;
3. Für weitere Details siehe Gebrauchsanweisung auf der Rückseite.

Periodische Wartung.

1. Am 1. Tag des Monats:
 - 1- Den Grobstaubfilter (Schaumgummifilter, zur Abkühlung) ersetzen;
 - 2- Das Gerät mit einem leicht feuchten, weichen Tuch reinigen;
 - 3- Die Nasenbrille (Sauerstoffbrille) ersetzen;
 - 4- Den Befeuchter ersetzen.
2. Alle 6 Monate:
 - 1- Den EingangsfILTER ersetzen + die Tätigkeiten des Punktes 1 oben.

Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für einen Oxycure-Konzentrator entschieden haben.



Oxycure-Sortiment, von links nach rechts.

Tragbare und portable Oxycure-Konzentratoren.

*Tragbarer Oxycure-Konzentrator – Oxus
Tragbarer Oxycure-Konzentrator – Inogen G3
Tragbarer Oxycure-Konzentrator – Inogen G2
Tragbarer Oxycure-Konzentrator – SimplyGo
Tragbarer Oxycure-Konzentrator – Eclipse5*

Oxycure-Konzentratoren.

Oxycure-Konzentrator - Kröber

Oxycure-Flaschen (gasförmiger Sauerstoff).

*Oxycure-Flasche B2 – 0,4 m³
Oxycure-Flasche B2 – 1,0 m³*

Oxycure-Tanks (flüssiger Sauerstoff).

*Oxycure-Tank für flüssigen Sauerstoff - 25,6 m³
Oxycure-Tank für flüssigen Sauerstoff (1,0 m³)
Tragbarer Oxycure-Tank für flüssigen Sauerstoff (0,5 m³)*

Weitere Informationen unter www.oxycure.be



Oxycure Belgium AG

Business Park

L. Génicot, 9

B-5380 Fernelmont

Belgien

Tel. + 32 (0)81 22 15 90

Fax + 32 (0)81 22 15 99

<http://www.oxycure.be>

E-Mail: oxycure@oxycure.be

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag

09.00 – 12.30 und 13.30 – 18.00 Uhr

BEREITSCHAFTSDIENST

0800 98 0 68

Unser Bereitschaftsdienst ist ein Dauerdienst (die ganze Woche lang – rund um die Uhr).

Er ist ausschließlich der dringenden Aufstellung von Geräten und der Reparatur unserer Geräte vorbehalten.

Anruf an den Bereitschaftsdienst

- Lassen Sie eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter und geben Sie kurz den Grund für Ihren Anruf an;
- Die Bereitschaft wird Sie innerhalb von 20 Minuten wieder anrufen;
- Wenn Sie die Bereitschaft nicht innerhalb von 20 Minuten wieder anruft, hinterlassen Sie eine weitere Nachricht.

Anmerkungen

1. Die technischen Eingriffe (Reparaturen) sind im Preis für Unterstützung und in der Leihgebühr enthalten.
2. Die Lieferungen von Artikeln außerhalb der Geschäftszeiten sind kostenpflichtig.

1. WARNHINWEISE

Die Verwendung des Oxycure-Konzentrators darf nur auf Anweisung des zuständigen Arztes erfolgen.

Der von diesem Gerät erzeugte Sauerstoff ist ein Medikament. Falls während der Therapie Nebenwirkungen oder starke Einschränkungen des Wohlbefindens auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

Die Verwendung dieses Oxycure-Reserve-Konzentrators ist elektronisch auf 50 Stunden beschränkt.

Bitte rufen Sie Oxycure schon ab der Inbetriebnahme dieses Reservegerätes an, um im Namen des Patienten einen Oxycure-Konzentrator zu bestellen.

Oxycure lehnt bei Nichteinhaltung dieses Verfahrens jede Haftung ab.

Nach Ihrem Anruf organisiert Oxycure zu Ihrem Besten und je nach der Dringlichkeit:

1. Die Lieferung und den Einbau des rückerstattungsfähigen Oxycure-Konzentrators im Namen Ihres Patienten oder Residenten (Bewohners).
2. Den Ersatz Ihres Reservekonzentrators durch einen Reservekonzentrator mit einer Funktionsautonomie von 50 Stunden.

Dieses Dokument bezieht sich auf das Bedienerhandbuch des Herstellers. Dieses Handbuch steht in deutscher, englischer und französischer Sprache zur Verfügung; Sie können es auf unserer Website www.oxycure.be oder auf Nachfrage bei unserem Kundendienst konsultieren.

2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

Der Oxycure-Konzentrator trägt die Marke CE und erfüllt alle in der Europäischen Gemeinschaft geltenden Normen.

Dieses Gerät erzeugt Sauerstoff. Sauerstoff beschleunigt die Verbrennung und kann die augenblickliche Entzündung von Fetten, sogar von Salben und Pomaden hervorrufen! Während der Verwendung dieses Gerätes ist es für Ihre Sicherheit und die Ihrer Umgebung zwingend erforderlich, die folgenden Sicherheitsanweisungen zu beachten:

1. **Nicht rauchen**
2. **Das Gerät von allen Wärmequellen, offenem Feuer und Funken fernhalten (2 Meter)**
3. **Das Gerät, die Zubehörteile und das Gesicht müssen frei von Fetten, Ölen, usw. (Pomade, Salbe) sein**
4. **Das Gerät niemals öffnen, auseinanderbauen (Gefahr des Stromschlags oder die Etikettierung des Gerätes abnehmen)**
5. **Das Gerät niemals abdecken**
6. **Das Gerät trocken halten**

3. ZWISCHENFÄLLE

Was soll ich tun, wenn meine Nasenkanüle oder mein Sauerstoffschlauch Feuer fängt?

Dieser Zwischenfall kann bei jeder Verwendung von Sauerstoff passieren (gasförmiger Sauerstoff in Flaschen, flüssiger Sauerstoff), wenn die Sicherheitsanweisungen nicht eingehalten werden.

1. Den Schlauch von der Flasche abziehen.
2. Das Gerät ausschalten.
3. Die Flammen zum Beispiel mit einer Decke ersticken.
4. Das Zimmer bis zum Verschwinden des Rauches oder des Geruchs lüften.

4. TECHNISCHE DATEN

Oxycure-Kröber Reserve-Konzentrator.

Hersteller	Kröber Medizintechnik GmbH D-56332 Dieblich Tel. +49 2607 9404
Modell	O2 / R
Beschränkter Gebrauch	50 Stunden
Klassifizierung MEDDEV	IIa
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Sicherungen netzseitig : Karte (intern)	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V
Betriebstemperatur	10° bis 40 ° C
Atmosphärischer Betriebsdruck	700 bis 1060 mbar
Abmessungen (H x P x L, in cm)	53,5 x 20,3 x 52 cm (ohne die Lenkrollen)
Gewicht	19,8 kg
Volumenstrom	1 à 5 lpm (Liter/min)
Nennkonzentrationen (Version N51)	0,1 bis 4 l/min 95% -3% >4 bis 5 l/min 85% ±3% 5 bis 6 l/min 75% ±3%
Alarme (akustische und optische)	Hohe Temperatur Stromunterbrechung Durchfluss Sauerstoffkonzentration System
Statusanzeige	Sauerstoffdurchfluss
Schalldruckpegel	35 dB(A)
Leistungsaufnahme	307 – max. 350 W
Zulassungen	CE 0197

5. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

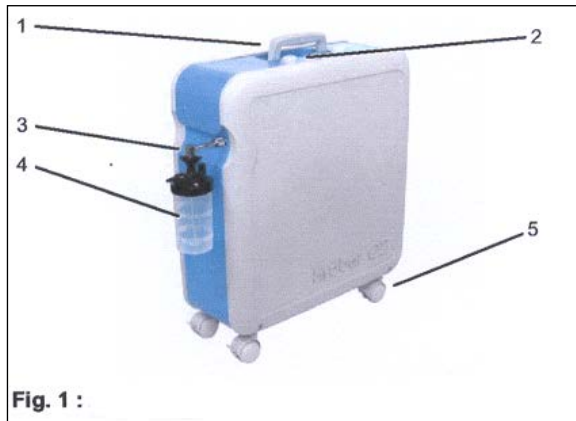


Fig. 1 :

1. Tragegriff
2. Bedienfeld und LC-Display
3. Sauerstoffausgang und Winkelanschluss
4. Befeuchter
5. Lenkrollen



Fig.2

6. Netzkabel
7. Festes Gitter und Grobstaubfilter (Kühlung)

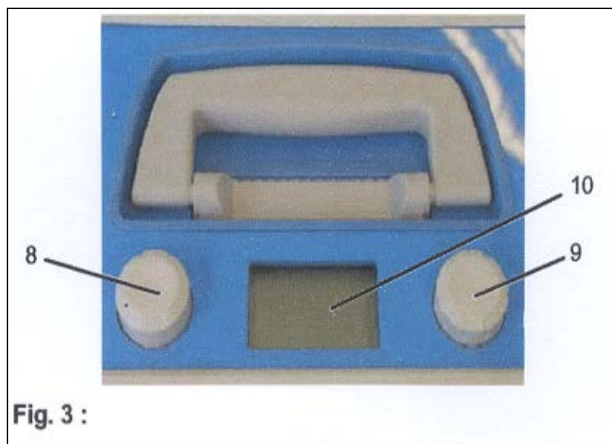


Fig. 3 :

8. Ein/Aus-Schalter
9. Volumenstrom-Einstellregler
10. LC-Display

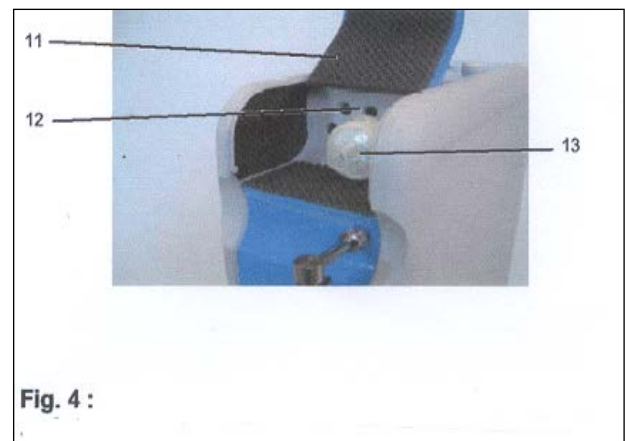


Fig. 4 :

11. Service-Klappe
12. Sicherungen
13. Eingangfilter (Ansaugen)

Der Oxycure-Reserve-Konzentrator unterscheidet sich durch zwei rote Aufkleber auf den Seiten.



6. ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

Die unten aufgeführten Zubehörteile müssen oder können mit dem Oxycure-Konzentrator verwendet werden.

Filter und Zubehör für den Oxycure-Konzentrator		Endverkaufspreis
0116	Krüber-EingangsfILTER	6,89
0143	Grobstaub-KühlfILTER (6 Stück)	6,36
0113	Ausgangs-FeinfILTER	6,89
0132	Anschluss CPAP 22F/22M/6mm	9,54
Nasenbrillen (Kanülen und Masken)		
4004-446	Nasenbrille (Kanüle) für Erwachsene SP (+1,8 m Schlauch)	1,59
4004-784	Brille für Erwachsene CP (+1,8 m Schlauch)	3,18
4004-768	Brille für Erwachsene FP (+1,8 m Schlauch)	3,18
4004-800	Brille für Erwachsene CFP (+1,8 m Schlauch)	3,18
4004-453	K-Brille, pädiatrisch (+1,8 m Schlauch)	3,18
4004-461	KK-Brille, für Neugeborene (+1,8 m Schlauch)	3,18
4004-479	Sauerstoffmaske für Erwachsene (+1,8 m Schlauch)	2,44
4004-487	Sauerstoffmaske, pädiatrisch (+1,8 m Schlauch)	2,44
4004-834	Sauerstoffmaske für Tracheotomie, Erwachsene	3,18
4004-867	Sauerstoffmaske für Tracheotomie, Kinder	3,18
4004-495	Sauerstoffmaske HC100% High Concentration	3,18
Schläuche und Schlauchzubehör		
4004-875	Sicherheitsschlauch - 2,0 m	1,48
4004-883	Sicherheitsschlauch - 7,5 m	5,30
4004-891	Sicherheitsschlauch - 10,0 m	6,36
4004-909	Sicherheitsschlauch - 15,0 m	6,89
4004-917	Wasserabscheider (Water Trap)	4,50
4004-537	Schlauchanschluss, gerade 5/5 mm	0,85
4004-859	Desgl., schwenkbar ("swivel") 5/5 mm	2,60
4004-545	Schlauchanschluss T 6/6/6 mm	0,85
4004-842	Schlauchanschluss mit Mutter s/Kr-O2	13,67
Befeuchter und Zubehör		
0139	Inox-Anschluss 90° zur Befeuchtung	31,27
4004-792	Wiederverwendbarer Homecare-Befeuchter 100 ml	4,03
4004-776	Wiederverwendbarer Befeuchter 350 ml	4,03
4004-578	Befeuchter Aquapack - Respiflo 325 ml	10,60
4004-586	Träger für Befeuchter	12,72
4004-552	PE-Anschluss 90° für Befeuchter	4,77

Das zur Durchführung Ihrer Therapie erforderliche Zubehör (Brillen oder Sauerstoffmasken, Befeuchter, Grobstaubfilter) werden bei der Aufstellung dieses Reservegerätes geliefert, mit Ausnahme des Befeuchters.

Für eine perfekte Anwendung der Therapie und ein optimales Funktionieren des Gerätes empfiehlt Oxycure, die Zubehörteile bei jedem Patientenwechsel auszutauschen.

Siehe auch Punkt 14.

7. STANDORT DES GERÄTS

Das gute Funktionieren (Funktionstüchtigkeit) des Gerätes ist nur möglich, wenn das Gerät an einer Stelle aufgestellt wird, die allen unten aufgeführten Punkten entspricht.

Das Gerät muss aufgestellt werden:

- Auf einem festen und ebenen Untergrund, an einer trockenen und gut belüfteten Stelle.
→ *kleine Abstellräume und Badezimmer vermeiden!*
- Vor warmen oder kalten Luftströmungen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt.
→ *die Aufstellung des Gerätes vor einem Fenster oder einer Glastür vermeiden.*
- Das Gerät NIEMALS abdecken.
- Mit einem Mindestabstand von 30 cm von Mauern, Wänden, Vorhängen und anderen größeren Gegenständen (z.B. Möbeln) aufstellen, um ein normales Ansaugen der Umgebungsluft durch das Gerät zu gewährleisten.
- Mit entsprechendem Abstand von Heizquellen (2 Meter).

8. INBETRIEBNAHME

Der Oxycure-Konzentrator von Kröber benötigt ca. 10 Minuten, um die Gesamtheit seiner Parameter zu stabilisieren. In dieser Zeit kann ein Alarm auf dem Bildschirm erscheinen.

Bleibt dieser Alarm nach 10 Minuten bestehen, rufen Sie bitte unseren Kundendienst (Support Service) an.


▪ Wenn Sie einen Befeuchter verwenden

1. Das mitgelieferte Netzkabel an der Rückseite des Gerätes anschließen und es in eine Steckdose stecken (230 Volt, 50 Hz).
2. Den Winkeladapter an den Sauerstoffausgang des Gerätes schrauben (Foto 2 unten).
3. Den Becher des Befeuchters abschrauben und ihn zwischen Tiefstand und Höchststand mit Wasser füllen (Leitungswasser, destilliertes Wasser oder „Aqua purificata“);
4. Den Becher wieder auf den Träger schrauben und dabei auf die Dichtigkeit achten. Bei Leckage in diesem Bereich wird der Sauerstoff nicht zum Benutzer gelangen.
5. Den Befeuchter an den Winkelanschluss anschrauben.
6. Nasenbrille (Kanüle) oder Sauerstoffschlauch (Verlängerung) mit dem Auslass des Befeuchters verbinden.
7. Den Ein/Aus-Schalter drücken (Fig.3, 8 Seite 5).
8. Den Durchfluss einstellen. Siehe § 9.



▪ Wenn Sie keinen Befeuchter verwenden:

1. Das mitgelieferte Netzkabel an der Rückseite des Gerätes (Beschreibung S.5, Fig.2, 6) ans Netz anschließen (230 Volt, 50 Hz).
2. Den Winkelanschluss an den Sauerstoffauslass des Gerätes schrauben (Foto 2 unten).
3. Konischen Anschluss an den Winkelanschluss schrauben (Foto 5 unten).
4. Den Sauerstoffschlauch mit dem konischen Anschluss verbinden.
5. Nasenbrille mit der mitgelieferten Anschlussstülle an den Sauerstoffschlauch anschließen.
6. Das Gerät in Betrieb setzen (Fig.3, 8 Seite 5)
7. Den Durchfluss einstellen.

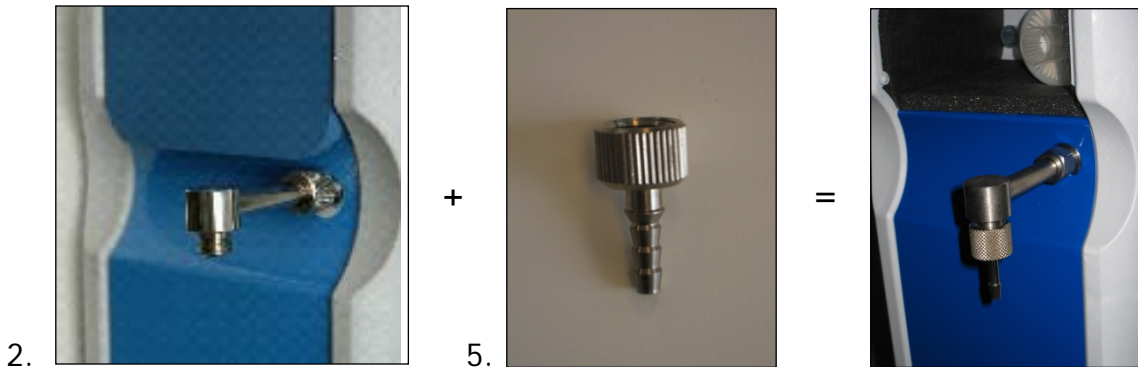


9. EINSTELLUNG DES SAUERSTOFF-VOLUMENSTROMS

1. Einige Sekunden lang auf den Volumenstrom-Einstellregler (Fig.3, 9 Seite 8) drücken, bis die Volumenstromangabe (die Ziffern) blinkt;
2. Wenn die Volumenstromangabe auf dem LC-Display blinkt (Fig.3, 10 Seite 8), den Druck auf dem Regler zurücknehmen;
3. Den Einstellregler zur Verminderung des Volumenstrom nach links, zur Erhöhung nach rechts drehen;
4. Ist der gewünschte Wert erreicht, kurz einmal auf den Einstellregler drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen; der gewünschte Wert wird auf dem Display angezeigt. Das Gerät passt den Durchfluss an den gewünschten Wert an.


10.A. ANZEIGE AUF DEM DISPLAY (nur Reserve-Konzentrator).

Nach seinem Testverfahren wird auf dem Bildschirm nacheinander Folgendes angezeigt:

1. Der eingestellte Durchfluss (zum Beispiel: „2,0 lpm“ für 2 Liter pro Minute).
2. Die Gesamtzahl der Betriebsstunden des Gerätes.
3. Der Saldo der Zahl der Betriebsstunden und der eingestellte Durchfluss, wie folgt:

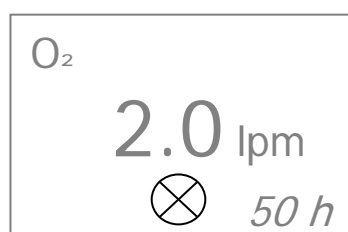

4. Wenn die Funktionsreserve des Gerätes erschöpft ist, liefert der Reserve-Konzentrator keinen Sauerstoff mehr. Der Kontroll-Bildschirm zeigt dann Folgendes an:

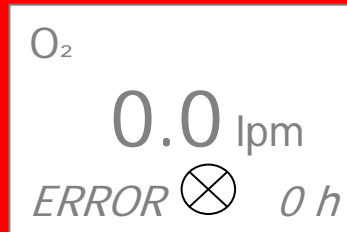

Wichtige Anmerkung:

Der Bildschirm zeigt nicht die Minuten an. Wenn der Bildschirm 0 Stunden (0 h) anzeigt, beträgt die effektive Betriebsreserve des Gerätes 1 bis 59 Minuten.

10.B. ANDERE ANZEIGEN AUF DEM BILDSCHIRM.

Bei einem vom Kontrollmodul entdeckten Alarm erscheint die Art des entdeckten Problems auf dem Bildschirm mit der Angabe "ERROR" blinkend auf dem LC-Display.

Lesen Sie dazu die Abschnitte 8. "Inbetriebnahme",



11.A "Tipps und Tricks zur Verwendung",






11.B. "Im Alarmfall zu ergreifende Maßnahmen".

11.A. TIPPS UND TRICKS ZUR VERWENDUNG

<p>Das Gerät löst bei seiner Inbetriebnahme Alarm aus</p>	<p><i>Das ist normal. Das Gerät benötigt 10 Minuten, um die Gesamtheit seiner Parameter zu stabilisieren.</i></p> <p><i>Wenn dieser Alarm nach 10 Minuten bleibt, rufen Sie bitte unseren Kundendienst (Support Service) an.</i></p>
<p>Das Gerät funktioniert normal ohne Alarm, erzeugt „Blasen im Befeuchter“, aber Sie erhalten keinen Sauerstoff.</p>	<p><i>Das ist auf ein Problem der Dichtigkeit der Gruppe „Befeuchter – Sauerstoffschlauch – Nasenbrille“ zurückzuführen.</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrollieren, ob der Winkelanschluss (Foto 2, S. 8) korrekt auf das Gerät geschraubt ist; 2. Kontrollieren, ob der Befeuchter gut auf diesen Schaft geschraubt ist; 3. Kontrollieren, ob der Befeuchter korrekt angeschraubt und ob der Becher gut geschlossen ist. Der Sauerstoff kann nur durch den Sauerstoffschlauch oder die Nasenbrille aus dem Befeuchter entweichen, wenn der Befeuchter korrekt und hermetisch geschlossen ist.

11.B. IM ALARMFALL ZU ERGREIFENDE MASSNAHMEN

ANZEIGE AUF DEM DISPLAY ALARMTYP	GEGENMASSNAHMEN
 <p>→ Sauerstoffmangel-Alarm</p> <p>(Code_LPM)</p>	<p><i>Der erzeugte Sauerstoff gelangt nicht zum Benutzer, nachdem ein Zubehörteil falsch positioniert wurde oder fehlerhaft ist.</i></p> <p><u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät in Betrieb lassen, um das unten aufgeführte Kontrollverfahren durchzuführen; 2. Den Befeuchter vom Gerät abtrennen (Edelstahl-Winkelanschluss abschrauben). Wenn der Alarm aufhört, liegt das Problem im Bereich derjenigen Zubehörteile, die <u>HINTER</u> dem Gerät liegen; zu <u>Punkt 3</u> übergehen. Wenn der Alarm weitergeht, den technischen Service anrufen (die Nummer befindet sich auf dem Gerät). 3. Alle Zubehörteile abbauen. Die Nasenbrille (Kanüle), den Sauerstoffschlauch und den Befeuchter des Gerätes abnehmen. 4. Die Zubehörteile eines nach dem anderen in der folgenden Reihenfolge wieder anbringen: <ul style="list-style-type: none"> . Befeuchter . Schlauch (Verlängerung) . Nasenbrille Das wird es Ihnen erlauben, festzustellen, welches Zubehörteil Probleme macht. <ul style="list-style-type: none"> . Den Befeuchter erforderlichenfalls ersetzen. . Überprüfen, dass die Kanüle (Nasenbrille) oder der Sauerstoffschlauch nicht verstopft, geknickt, in einer Tür oder unter einem Stuhlbein festgeklemmt ist. Die Zubehörteile befreien oder erforderlichenfalls ersetzen. Bleibt der Alarm bestehen, kehren Sie zum Punkt 3 zurück. 5. Den technischen Service anrufen.
 <p>→ Temperatur-Alarm</p> <p>(Code_T°)</p>	<p><i>Die Temperatur im Innenraum des Gerätes ist zu hoch.</i></p> <p><u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät ist sofort auszuschalten, um seine Beschädigung zu vermeiden. 2. Es ist zu kontrollieren, ob der Standort richtig ist und ein ungehinderter Lufteintritt in das Gerät möglich ist. 3. Grobstaubfilter überprüfen, nötigenfalls ersetzen. 4. Das Gerät wieder in Betrieb nehmen. 5. Bleibt der Alarm bestehen, Gerät ausschalten, um seine Beschädigung zu vermeiden. 6. Vorübergehend die von Oxycure gelieferte Reserveflasche verwenden.

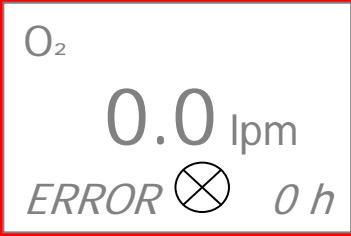	7. Den technischen Service anrufen.
 <p>→ Netzausfall-Alarm (Code_AC)</p>	<p><i>Die Stromversorgung des Gerätes ist unterbrochen.</i> <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prüfen, ob das Netzkabel sicher in der Steckdose steckt. 2. Die Sicherungen Ihrer Wohnung kontrollieren. 3. Ein anderes elektrisches Gerät in derselben Steckdose ausprobieren. 4. Bleibt der Alarm bestehen, vorübergehend die Reserveflasche verwenden. 5. Unseren technischen Service anrufen.
 <p>→ Sauerstoff-Alarm (O²) (Code_O2)</p>	<p><i>Der Multifunktionssensor hat eine Sauerstoffkonzentration unter 82% entdeckt.</i> <i>Ihr Gerät liefert immer noch Sauerstoff, aber dessen Konzentration hat abgenommen.</i> <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Befeuchter und Sauerstoffschläuche auf Undichtigkeit prüfen. 2. Den technischen Service anrufen.
 <p>→ Sensor-Alarm (Code_SE)</p>	<p><i>Der Multifunktionssensor kann die produzierte Sauerstoffmenge und Sauerstoffkonzentration nicht bestimmen.</i> <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vorübergehend die Reserveflasche verwenden. 2. Den technischen Service anrufen.
 <p>→ System-Alarm (Code_ERR)</p>	<p><i>Allgemeine Fehlfunktion des Gerätes. Die Sauerstoffzufuhr ist unterbrochen.</i> <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät sofort ausschalten. 2. Den technischen Service anrufen.
 <p>→ Ende der Betriebsreserve.</p>	<p>Ende der Betriebsreserve von 50 Stunden. <u>Zu ergreifende Maßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Das Gerät (Kompressor) durch Drücken des An-/Aus-Schalters abschalten. 2. Rufen Sie dringend den Bereitschaftsdienst an.

12. ANDERE OXYCURE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

▪ Das Pulsoximeter

Das Pulsoximeter ist ein Messgerät für die Sauerstoffsättigung des Blutes. Das Pulsoximeter ermöglicht die Bestimmung der Notwendigkeit einer Sauerstofftherapie und die Kontrolle Ihrer Effizienz.

Modelle.

MD300 C13, zur persönlichen Verwendung
MD300 C63, zur beruflichen Nutzung
MD300 C5, zur pädiatrischen Verwendung

- ➔ Bitte wenden Sie sich zu diesem Thema an Ihren Arzt oder Apotheker oder verlangen Sie unsere Informationsbroschüre.
Konsultieren Sie unsere Website www.oxycure.be.



MD300 C63

▪ Die kleine Oxycure-Flasche als Reserveflasche oder zur ambulanten Verwendung



Die Oxycure-Flasche als Reserveflasche oder zur ambulanten Verwendung (Herumlaufen usw.), die mit einem Ventil mit eingebautem Druckminderer ausgestattet ist, ist DIE Lösung bei Stromausfall. Ein m³ gewährt eine Autonomie von 9 Stunden zu 2 LPM.

Modelle.

B5	1,0 m ³
B2	0,4 m ³

- ➔ Wenden Sie sich zu diesem Thema an Ihren Arzt oder Apotheker oder verlangen Sie unsere Informationsbroschüre.
Konsultieren Sie unsere Website www.oxycure.be.

Der portable Konzentrator Oxycure – Inogen

Der portable Oxycure-Konzentrator ist ein portables und autonomes medizinisches Gerät, welches das Äquivalent von 1 bis 5 Liter Sauerstoff pro Minute erzeugt. Kompakt und leicht, bietet der portable Oxycure-Konzentrator eine fast unbegrenzte „effektive“ Autonomie. Er funktioniert sowohl mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus) als auch am Netz (110-240 Volt Wechselstrom) oder in einem Fahrzeug (12 Volt Gleichstrom), und zwar ohne Unterbrechung bei Wechsel der Energiequelle.

Der portable Oxycure-Konzentrator ist mit einem OCD-Sparventil ausgestattet).

Der Oxycure – Inogen ist im Allgemeinen nicht für eine Verwendung beim Schlafen geeignet.






➔ Weitere Informationen unter www.oxycure.be
oder bei unserem Kundendienst



14. PERIODISCHE WARTUNG DURCH DEN BENUTZER

Ihr Reservegerät wird spätestens nach 50 Betriebsstunden ersetzt. Es ist keine periodische Wartung erforderlich.

Zur Information: Die Wartung eines Oxycure-Konzentrators für den Dauerbetrieb ist die folgende:

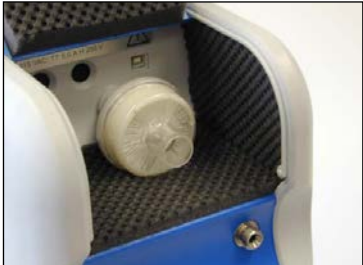Intervall	Reinigungsarbeiten
<p><i>Täglich</i> <i>(sehr zu empfehlen)</i></p>	<p>Der Befeuchter ist täglich mit einem Desinfektionsmittel (im Handel erhältlich) oder einer Lösung von 10% Essig auf 90% Wasser zu reinigen. Das Wasser des Befeuchters ersetzen.</p>
<p><i>Täglich</i> <i>(sehr zu empfehlen)</i></p>	<p>Die Nasenbrille (Öffnung nach unten) mit warmem Seifenwasser oder einer Lösung von 10% Essig in 90% Wasser reinigen. Gut spülen und vor der Wiederverwendung trocknen lassen.</p>
<p>Am 1. Tag des Monats Jeden Monat (obligatorisch)</p>	<p>Den Grobstaubfilter (Kühlung) ersetzen. Den schmutzigen Filter mit warmem Wasser, das mit wenig Seife versetzt wurde, reinigen, gut spülen und trocknen lassen. Der so gereinigte Filter kann im folgenden Monat wiederverwendet werden.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>Am 1. Tag des Monats Jeden Monat (obligatorisch)</p>	<p>Ersetzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Nasenbrille (Kanüle) oder die Maske; ▪ Den Befeuchter.
<p>Am 1. Tag des Monats Jeden Monat (obligatorisch)</p>	<p>Das Gerät mit einem nebelfeuchten Lappen reinigen (mildes Haushaltspflegeprodukt).</p>
<p>Alle 6 Monate Maximal alle 5.000 Stunden (obligatorisch)</p> <p>Auf ausdrücklichen Wunsch von Oxycure (obligatorisch)</p>	<p>GeräteeingangsfILTER (Ansaugung) ersetzen. (von Oxycure automatisch alle 6 Monate geliefert).</p> <p>Den Filter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abziehen. Den neuen Filter wieder auf den Stützen setzen.</p> 

NOTIZEN.
