




Oxycure Concentrator Kröber O2 - Kröber O2 v4.0

Gebruiksaanwijzing

Het toestel aanschakelen : samengevatte instructies.

1. Aan/Uit knop indrukken I/O
2. Aantal liters instellen met tweede knop 
 - 1- Knop ingedrukt houden tot de gegevens op het scherm knipperen;
 - 2- Knop loslaten;
 - 3- Knop draaien tot het gewenste aantal liters bereikt is;
 - 4- Knop opnieuw indrukken ter bevestiging van het debiet.
3. Voor meer details, zie gebruiksaanwijzing op keerzijde.

Periodiek onderhoud.

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Elke dag: | 1- Voor behandelingen met luchtbevochtiger: de luchtbevochtiger reinigen en ontsmetten en het water vervangen (leidingwater) |
| 2. Eerste dag van de maand: | 1- Stoffilter vervangen (afkoeling);
2- Toestel schoonmaken met een licht bevochtigde doek;
3- Neusbril (neuscanule) vervangen;
4- Bevochtiger volledig vervangen. |
| 3. Om de 6 maanden: | 1- Ingangfilter vervangen + de handelingen onder punt 2 hierboven. |

Wij danken u dat u voor een Oxycure concentrator gekozen heeft.



Gamma Oxycure, van links naar rechts.

Draagbare Oxycure Concentratoren.

Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G4
Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G3
Draagbare Oxycure Concentrator – Zen-O lite
Draagbare Oxycure Concentrator – SimplyGo Mini
Draagbare Oxycure Concentrator – SimplyGo
Draagbare Oxycure Concentrator – eQuinox

Oxycure Concentratoren.

Oxycure Concentrator - Kröber

Oxycure flessen (gasvormige medische zuurstof).

Oxycure fles B2 – 0,4 m³
Oxycure fles B5 – 1,0 m³

Oxycure Eenheid (vloeibare zuurstof).

Oxycure eenheid met vloeibare zuurstof - 25,6 m³
Draagbare Oxycure eenheid met vloeibare zuurstof (1,0 m³)

Meer informatie op www.oxycure.be



OXYCURE : BESTELLINGEN

081 22 15 90

Oxycure Belgium nv.

Business Park Fernelmont

L. Genicot, 9

B-5380 Fernelmont

Belgium

Tel. + 32 081 22 15 90

Fax + 32 081 22 15 99

<http://www.oxycure.be>

e-mail: oxycure@oxycure.be

OPENINGSUREN

Maandag tot en met vrijdag

09.00 – 12.30 en 13.30 – 18.00

WACHTDIENST

0800 980 68

U kunt ons 7 dagen op 7, 24 uren op 24 contacteren.

Deze dienst is uitsluitend voorbehouden voor dringende installaties van toestellen en voor herstellingen van onze toestellen.

Wanneer u de wachtdienst oproept:

1. Spreek uw naam, telefoonnummer en een korte boodschap (reden van uw oproep) in;
2. De wachtdienst belt u binnen de 20 minuten terug;
3. Indien u geen bericht van de wachtdienst zou hebben gekregen na 20 minuten, gelieve een nieuwe boodschap achter te laten.

Opmerkingen

1. De technische tussenkomsten (herstellingen) zijn inbegrepen in de prijs van de bijstand en de huur.
2. Leveringen van goederen buiten de kantooruren zijn betalend.

TERUGBETALING VAN DE OXYCURE CONCENTRATOR

De Oxycure concentrator is beschikbaar :

1. Bij uw apotheker, op voorschrift van een huisarts of een specialist.

Op grond van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2002, gewijzigd op 01 juli 2012, is de Oxycure concentrator terug betaalbaar op voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist voor :

- **de behandeling van een acute hypoxemie.**
Maximale duur:3 maanden op 12, opeenvolgend of niet (van datum tot datum).
Met de machtiging van de adviserende geneesheer.
- **palliatieve zorgen.**
Onbepaalde duur
Met de machtiging van de adviserende geneesheer.

→ UW ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN :

Om de vergoeding van het RIZIV te krijgen moet u met uw ziekenfonds of verzekering in orde zijn en :

- De machtiging van de adviserende geneesheer aan uw apotheker geven.
- In het begin van elke maand een voorschrift aan uw apotheker bezorgen.
- Het voorschrift met volgende gegevens afleveren :

Oxycure	<u>Voorbeeld</u>	Oxycure
Startdatum van de behandeling	JJ/MM/AA	10/10/2014
Debiet en dagelijkse duur		2 LPM / 12 uren
Bevochtiger		Bevochtiger
Derdebetalersregeling toepasbaar (voor palliatieve zorgen)		

→ DE OXYCURE BEHANDELING OMVAT :

Benaming	Publieke prijs/maand	Bedrag ten laste van de patiënt
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving. Het afhalen van het materiaal op het einde van de behandeling.	31,80	0,00
De Oxycure concentrator De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling. De Oxycure 24u/24 – 7d/7 wachtdienst in geval van technische storingen.	90,10	0,00
De bevochtiger	5,51	0,00
Een draagbare reservefles (max. 1 m ³)	0,00	0,00
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door uw apotheker		0,00

→ DE VERVANGING VAN DE ZUURSTOFFLES(SEN) gebeurt op medisch voorschrift, zonder vergoeding, zoals voorzien door het K.B. van 21/01/2001 (wijzigingen op 01/07/2012).

Benaming	Publieke prijs/maand	Bedrag ten laste van de patiënt
Medische zuurstof (prijs/m ³)	5,55	5,55
Huur van de flessen (forfait)	26,60	26,60
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door uw apotheker	-	-

2. Op een dienst pneumologie op voorschrift van een longarts of kinderarts.

In het kader van de "Overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis voor ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie" is de Oxycure concentrator volledig vergoed voor een vernieuwbare periode van een jaar.

→ UW ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN :

- Bewijskrachtig onderzoek op een dienst pneumologie met de machtiging van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.
- Stoppen met roken.

→ DE OXYCURE BEHANDELING OMVAT :

Benaming	Bedrag ten laste van de patiënt
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving. Het afhalen van het materiaal op het einde van de behandeling.	0,00
De Oxycure concentrator De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling. De Oxycure 24u/24 – 7d/7 wachtdienst in geval van technische storingen.	0,00
De bevochtiger (1 per maand)	0,00
Een draagbare reservefles (stroomonderbreking)	0,00
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling	0,00

3. Bij uw apotheker voor een "Oxycure Prepaid 3" behandeling op voorschrift van een huisarts of een specialist.

Indien u geen recht (meer) heeft op de vergoeding van uw behandeling maar toch nog zuurstof nodig heeft volgens advies van de behandelende geneesheer, stellen we u onze formule '**Concentrator Oxycure Prepaid 3**' voor, zonder terugbetaling.

Het gebruik van de "**Oxycure Prepaid 3**" is elektronisch beperkt tot drie maanden en 999 uren. Om de drie maanden of wanneer het tijdskrediet opgebruikt is, laden wij de teller van de « **Concentrator Oxycure Prepaid 3** » weer op, tenzij anders geadviseerd door uw arts of apotheker. Deze formule staat garant voor de kwaliteit van de behandeling die identiek is aan degene met een Oxycure concentrator.

Omschrijving	Bedrag ten laste van de patiënt
Oxycure Concentrator Prepaid 3	192,93
Bevochtiging	11,02
Installatie	31,80

1. WAARSCHUWINGEN

De Oxycore concentrator mag enkel op doktersvoorschrift gebruikt worden.

De zuurstof geproduceerd door dit toestel, is een geneesmiddel. Mochten er zich tijdens de therapie neveneffecten voordoen of mocht het welzijn sterk beperkt worden, raadpleeg onmiddellijk een arts.

Opgelet.

Dit document is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Deze gebruiksaanwijzing is beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits. Hij is beschikbaar op onze website www.oxycore.be of kan aangevraagd worden bij onze klantendienst.

2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

De OXYCURE concentrator draagt het CE-keurmerk en voldoet aan alle normen die opgelegd zijn door de Europese Unie.

Dit toestel produceert zuurstof. Zuurstof versnelt de verbranding en veroorzaakt onmiddellijk brandwonden indien deze in contact wordt gebracht met oliën of vetten, zelfs met verzorgingscrèmes. Gelieve tijdens het gebruik van dit toestel, voor uw eigen veiligheid en deze van uw omgeving, volgende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven:

- 1. Niet roken.**
- 2. Het toestel buiten bereik van elke warmtebron, blote vlam of vonk gebruiken. Een afstand van minimum 2 meter is aangeraden.**
- 3. Het toestel, de toebehoren en uw gezicht moeten vetvrij zijn (geen zalven, crèmes, olie, enz.)**
- 4. Het toestel nooit opendoen, demonteren (risico op elektrocutie) of de etiketten nooit verwijderen**
- 5. Het toestel nooit afdekken**
- 6. Het toestel droog houden**

3. INCIDENTEN

Wat moet ik doen als mijn neusbril of zuurstofslang vuur vat?

Dit kan gebeuren telkens wanneer zuurstof gebruikt wordt (gasvormige zuurstof in flessen, vloeibare zuurstof), als de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden.

1. Verwijder de zuurstofslang van het toestel.
2. Schakel het toestel uit.
3. Doof de vlammen, met een deken bijvoorbeeld.
4. Verlucht de kamer tot alle rook en geuren verdwenen zijn.


4. TECHNISCHE GEGEVENS

Oxycure – Kröber concentrator


Fabrikant	Kröber Medizintechnik GmbH. D-56332 Dieblich - Tel. +49 2607 9404	
Model	Kröber O²	Kröber O² v4.0
MPG classificatie	IIa	IIa
Beveiligingsklasse	II	II
Spanning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Zekeringen : net : kaart	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V
Werkings temperatuur	10° à 40 ° C	10° à 40 ° C
Werkingsdruk (atmosferisch)	700 à 1060 mbar	700 à 1060 mbar
Afmetingen (H x P x L, in cm)	53,5 x 20,3 x 52 cm (zonder wielen)	53,5 x 20,3 x 52 cm (zonder wielen)
Gewicht	19,8 kg	16,0 Kg
Volumetrisch debiet	1 à 6 lpm (liters/min)	1 à 5lpm (liters/min)
Nominale concentratie (Versie N51)	0,1 - 4 l/min 95% ±3% >4 - 5 l/min 85% ±3% 5 - 6 l/min 75% ±3%	0,1 - 4 l/min 95% ±3% >4 - 5 l/min 85%±3% ¹ -
Alarmen (sonorisch et visueel)	Hoge temperatuur Stroomonderbreking Debiet Zuurstofconcentratie Systeem	Hoge temperatuur Stroomonderbreking Debiet Zuurstofconcentratie Systeem
Statusdisplay	Zuurstofdebiet	Zuurstofdebiet
Geluidsterkte	35 dB(A)	31,1 dB(A)
Verbruik	307 – max. 350 W	Max. 280 W
Keuringen	CE 0197	CE0197

¹ O2-alarm mogelijk vanaf 4,5 LPM
v. 13/08/2019


5. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

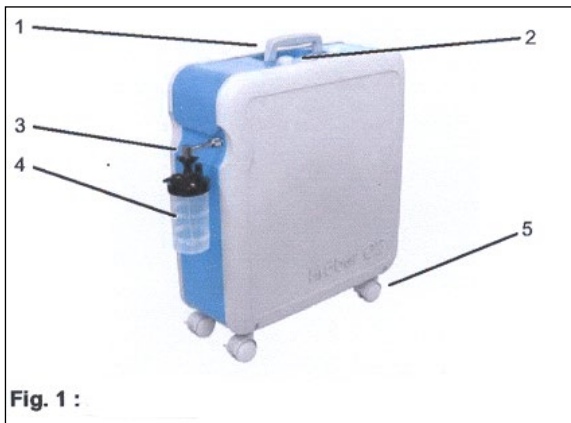


1. Handgreep
2. Bedieningspaneel (scherm en knoppen)
3. Zuurstofuitgang en hoekstuk
4. Bevochtiger
5. Wielen

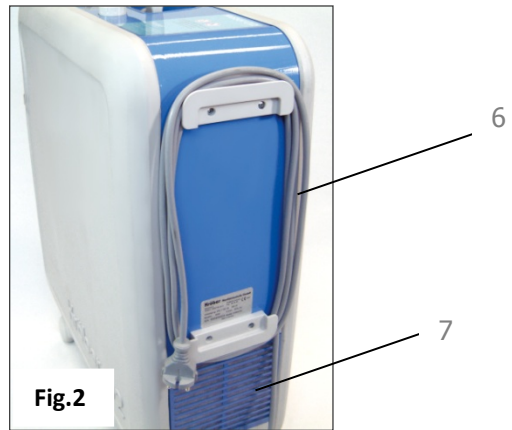

6. Stroomkabel
7. Afneembaar rooster en stoffilter (afkoeling)

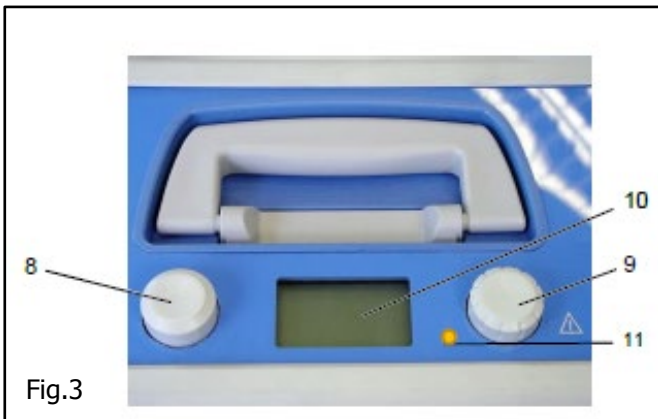

8. Aan/uit knop
9. Debietknop (lang indrukken) en op sommige modellen alarmonderdrukkingsknop (kort indrukken)
10. Scherm
11. Op sommige modellen: LED stroomonderbreking

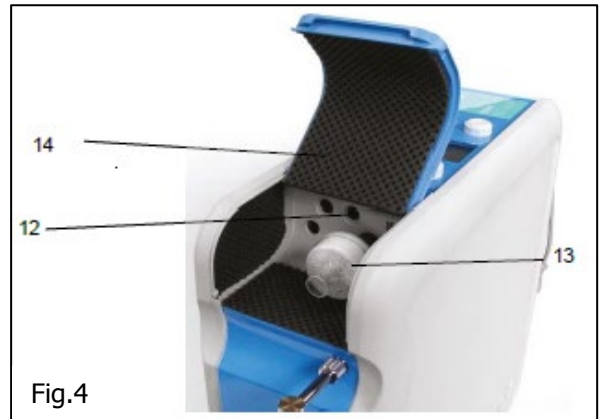

12. Zekeringen
13. IngangsfILTER
14. Deksel onderhoudscompartiment

6. NODIGE TOEBEHOREN

De onderstaande toebehoren moeten of kunnen met de Oxycure concentrator gebruikt worden. Uw assistent zal u helpen om ze te kiezen naargelang uw behoeften en wensen.

Filters en toebehoren voor de Oxycure concentrator		Publieke prijs
0305	Ingangsfiler Kröber	7,87
0303	Stoffilter (afkoeling, 6 stks.)	7,26
0132	CPAP aansluiting 22F/22M/6mm	10,89
Canules en maskers		
0253	Neuscanule volwassenen SP (+2 m tube)	2,54
0259	Neuscanule volwassenen CP (+2 m tube)	2,54
0257	Neuscanule K pediatrisch (+2 m slang)	2,54
0258	Neuscanule KK neonatal (+2 m slang)	2,54
0261	Zuurstofmasker volwassenen	2,54
0262	Zuurstofmasker pediatrisch	2,54
0288	Zuurstofmasker tracheotomie volwassenen	2,54
0289	Zuurstofmasker tracheotomie pediatrisch	2,54
0263	Zuurstofmasker HC100% High Concentration	2,54
Verlengslangen en toebehoren		
0279	Zuurstofveiligheidsslang - 3,0 m	1,70
0254	Zuurstofveiligheidsslang - 10,0 m	1,70
4004-917	Water trap	5,00
0163	Verbindingsstuk slang recht 5/5 mm	5,00
0390	Verbindingsstuk slang recht 5/5 mm 360° draaiend	5,00
0172	Verbindingsstuk slang T 6 mm	5,00
Bevochtigers en toebehoren		
0310	Aansluiting RVS 90° voor bevochtiging	35,70
0302	Homecare bevochtiger 100 ml	5,51
0212	Homecare bevochtiger 350 ml	5,51

De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling (zuurstofbrillen of zuurstofmaskers, bevochtigers, stoffilters, ingangsfiler) worden geleverd bij de installatie en worden terugbetaald tot een aantal van één stuk per maand.

Oxycure levert de toebehoren bij de installatie voor een behandeling van 3 maanden. Na deze periode stuurt Oxycure u automatisch en gratis de nodige toebehoren voor de behandeling voor de 6 volgende maanden. Aan het einde van de behandeling moeten de ongebruikte toebehoren worden teruggegeven aan Oxycure. Indien niet worden ze gefactureerd aan hierboven vermelde prijzen.

Voor een optimale toepassing van de therapie en een perfecte werking van het toestel adviseren wij de toebehoren maandelijks te vervangen. Zie punt 14.

7. PLAATS VAN HET TOESTEL

De optimale werking van de Oxycure concentrator is enkel mogelijk wanneer het toestel geïnstalleerd wordt op een plaats dat aan de volgende punten voldoet :

Het toestel dient geplaatst te worden:

- Op een stevige en vlakke ondergrond, in een droge en goed verluchte omgeving.
→ Vermijd kleine ruimten, badkamers.
- Beschut van warme of koude luchtstromen, beschut van directe zonnestralen.
→ Vermijd het toestel achter een raam of glazen deur te plaatsen.
- Het toestel NOOIT afdekken.
- Op minimaal 30 cm afstand van de muur, gordijnen of andere grote voorwerpen (bv. meubels), om een normale luchtinlaat te waarborgen.
- Op een redelijke afstand van een warmtebron (2 meter).


8. HET TOESTEL OPSTARTEN

De Oxycure – Kröber concentrator heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren. Het scherm kan gedurende deze periode een alarm tonen.

Indien het alarm na 10 minuten aanhoudt, contacteer Oxycure.


Indien u gebruik maakt van een bevochtiger

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan (Beschrijving p. 8, Fig.2, 6) en sluit aan op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het hoekstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (zie foto 2).
3. Schroef de beker van de bevochtiger los en vul hem met water (stadswater), tussen het minimum en het maximum niveau.
4. Schroef de beker weer op de houder. Zorg dat hij niet lekt. Indien er hier een lek is, zal de gebruiker geen zuurstof krijgen.
5. Schroef de bevochtiger op het hoekstuk.
6. Koppel de neusbriil (canule) of de zuurstofslang (verlengslang) aan de uitlaat van de bevochtiger.
7. Druk op de knop Aan / Uit (Fig. 3, 8 pagina 8).
8. Regel het debiet. Zie § 9 pagina 11.

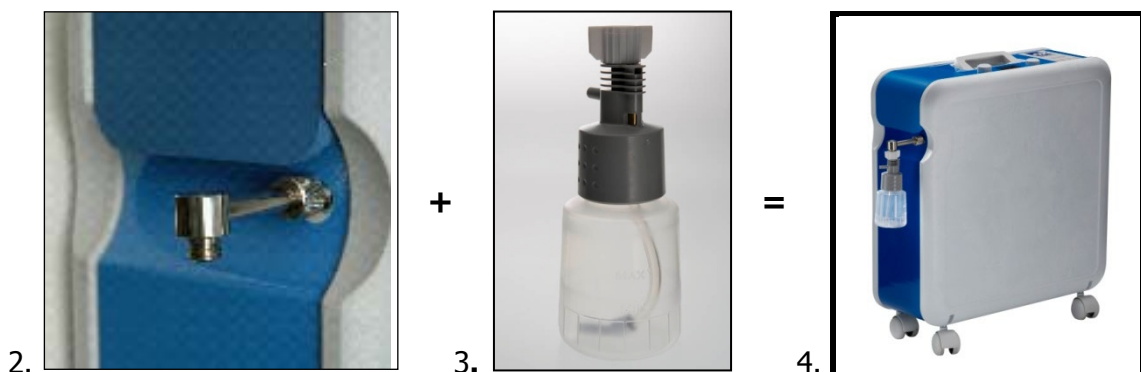

Indien u geen gebruik maakt van een bevochtiger

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan (Beschrijving p. 8, Fig.2, 6) en sluit aan op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het hoekstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (foto 2 hieronder).
3. Schroef het conisch tussenstuk op het hoekstuk (foto 5 hieronder)
4. Sluit de zuurstofslang aan op het conisch tussenstuk.
5. Sluit de neusbril aan op de zuurstofslang door middel van het bijgeleverd aansluitstuk.
6. Schakel het toestel aan (Fig. 3, 8 pagina 8).
7. Regel het debiet. Zie § 9 pagina 11.

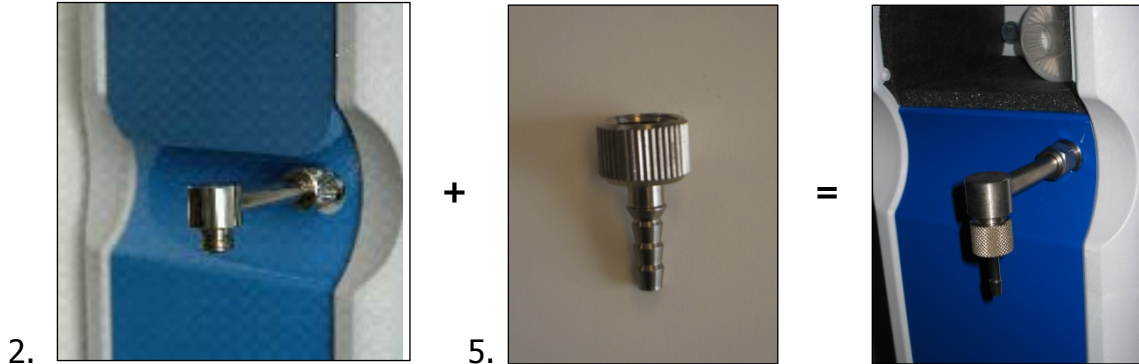

9. HET DEBIET INSTELLEN

1. Duw enkele seconden op de debietknop (Fig. 3, 9 pagina 8) tot de aanduiding van het debiet (de cijfers) knippert.
2. Wanneer de cijfers op het scherm beginnen te knipperen (Fig. 3, 10 pagina 8), de knop loslaten.
3. Draai de knop naar links om het debiet te verminderen, naar rechts om het debiet te verhogen.
4. Wanneer de gewenste waarde verschijnt, de debietknop kort indrukken om uw keuze te bevestigen.
5. De gevraagde waarde is geregistreerd op het scherm. Het toestel zal het debiet aan de gewenste waarde aanpassen.

10. MELDING OP HET SCHERM


Na de automatische testprocedure verschijnt het afgestelde debiet (voorbeeld: "2,0 lpm" voor 2 liter per minuut) en het aantal werkuren van het toestel.

Wanneer de controlemodule een alarm detecteert, verschijnt het type gedetecteerde probleem knipperend op het scherm, met de melding "ERROR".





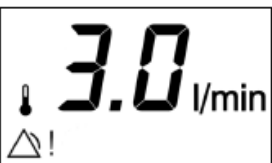

Zie in dat verband de volgende paragrafen








8. "Toestel opstarten".
- 11.A "Handige weetjes voor het gebruik".
- 11.B "Maatregelen indien een alarm aanhoudt".

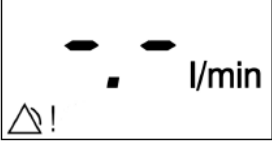11. A. HANDIGE WEETJES VOOR HET GEBRUIK

<p>Het toestel geeft een alarmsignaal bij het opstarten.</p>	<p>Dit is normaal.</p> <p>Het toestel heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren.</p> <p>Indien het alarm na 10 minuten aanhoudt, contacteer Oxycure.</p>
<p>Het toestel draait normaal, zonder alarm, produceert luchtbelletjes in de bevochtiger, maar u krijgt geen zuurstof.</p>	<p>Dit is te wijten aan een lekkage in het geheel 'bevochtiger-zuurstofslang-zuurstofbril'.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ga na of het hoekstuk (foto 2, p. 10) goed vastgeschroefd is. 2. Ga na of de bevochtiger goed vastgeschroefd is op het hoekstuk. 3. Ga na of de beker van de bevochtiger goed en volledig vastgeschroefd is. <p>De zuurstof kan enkel uit de bevochtiger door de aangesloten neusbril of zuurstofslang als de bevochtiger juist en hermetisch afgesloten is.</p>
<p>U krijgt water in de neusbril.</p>	<p>Dit is een probleem van condensatie van warme en bevochtigde zuurstof (20-25°) in een zuurstofslang die op een koude vloer loopt. Oplossingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vermijd dat de zuurstofslang in contact is met een koude vloer. 2. Gebruik het toestel enige tijd zonder water in de bevochtiger. 3. Bestel een «Water trap» die het probleem vermijdt door het water in een kleine buis op te vangen.
<p>Het toestel geeft een zuurstofalarm vanaf 4,5 LPM</p>	<p>Sommige toestellen KRO2.V4 geven een zuurstofalarm vanaf 4,5 LPM. Dit is normaal.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de bevochtiger en de zuurstofslang op eventuele lekken. 2. Contacteer Oxycure (Het oproepnummer bevindt zich op het toestel).
<p>Sommige modellen zijn voorzien van een alarmonderdrukkingsknop (debietknop kort indrukken)</p> 	<p>Wanneer u de debietknop kort indrukt, verschijnt het symbool « alarmonderdrukking » op het scherm: in geval van alarm, wordt het sonorisches alarmsignaal gedurende 120 seconden onderdrukt. Na deze tijdspanne zal het sonorisches alarmsignaal opnieuw klinken en het symbool « alarmonderdrukking » verdwijnt van het scherm.</p> <p>Nota: Deze status kan onmiddellijk omgekeerd worden door de debietknop opnieuw kort in te drukken. Het symbool "alarmonderdrukking" wordt verborgen.</p>

11. B. MAATREGELEN INDIEN EEN ALARM AANHOUDT

MELDING OP HET SCHERM → ALARM TYPE	TE TREFFEN MAATREGELEN
 <p>Of</p>   <p>→ Debietalarm (Code_LPM)</p>	<p>De geproduceerde zuurstof kan niet tot bij de gebruiker omdat één van de toebehoren fout aangesloten is of defect is.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laat het toestel draaien om de volgende testprocedure uit te voeren. 2. De bevochtiger loskoppelen van het toestel (hoekstuk van roestvrij staal). Indien het alarm stopt, weet u zeker dat het probleem te zoeken is bij de toebehoren <u>NA</u> het toestel en <u>ga naar punt 3</u>. Indien het alarm aanhoudt, contacteer Oxycure (het nummer is vermeld op het toestel). 3. Koppel alle toebehoren los. Verwijder de neusbril (canule), de zuurstofslang en de bevochtiger van het toestel. 4. Schakel ze dan weer één na één aan in de volgende volgorde: <ul style="list-style-type: none"> . Bevochtiger . Slang (verlengslang) . Neusbril <p>Op die manier kunt u bepalen welk toebehoren problemen stelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> . Zo nodig de bevochtiger vervangen. . Nagaan of de zuurstofbril (canule) of de zuurstofslang niet verstopt of geplooid is, of vastzit tussen een deur of onder de poot van een stoel. Maak de toebehoren vrij of vervang ze zo nodig. Als het alarm aanhoudt, teruggaan naar punt 3. 5. Contacteer Oxycure.
 <p>Of</p>  <p>→ Temperatuuralarm (Code_T°)</p>	<p>De werkingstemperatuur van het toestel is te hoog.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schakel het toestel uit om beschadiging te voorkomen. 2. Ga na of het toestel op een correcte plaats staat en of er ongehinderd lucht in het toestel kan. 3. Controleer de stoffilter. Vervang zo nodig. 4. Controleer de ingangsfiler. Vervang zo nodig. 5. Het toestel weer aanschakelen. 6. Indien het alarm aanhoudt, het toestel uitschakelen om beschadiging te voorkomen. 7. Tijdelijk de reservefles gebruiken die Oxycure leverde. 8. Contacteer Oxycure.
 <p>→ Onderdruk op het electriciteitsnet (Code_U)</p>	<p>Onvoldoende stroomtoevoer</p> <p><u>Maatregelen:</u> Gebruik een spanningsstabilisator.</p>

 <p>Of</p> <p>Er verschijnt niets meer op het scherm, de concentrator draait niet meer en het oranje LED lampje brandt</p> <p>→ Stroomonderbreking (Code_AC)</p>	<p>Stroom onderbroken.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ga na of de stroomkabel wel goed aangesloten is op een stopcontact. 2. Controleer de zekeringen in uw woning, en of er geen stroomstoring is. 3. Test een ander elektrisch toestel op hetzelfde stopcontact. 4. Indien het alarm aanhoudt, tijdelijk de reservefles gebruiken. 5. Contacteer Oxycure.
 <p>Of</p>  <p>→ Zuurstofalarm (O₂ is het symbool voor zuurstof) (Code_O2)</p>	<p>De multifunctionele sensor detecteerde een lage zuurstofconcentratie (< 82%).</p> <p>Uw toestel geeft nog altijd zuurstof af, maar in een lagere concentratie.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer de bevochtiger en de zuurstofslangen op lekken. 2. Contacteer Oxycure.
 <p>Of</p>  <p>→ Sensoralarm (Code_SE)</p>	<p>De multifunctionele sensor kan het debiet en de zuurstofconcentratie niet bepalen.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tijdelijk de reservefles gebruiken. 2. Contacteer Oxycure.
 <p>Of</p>  <p>→ Algemeen alarm (Code_ERR)</p>	<p>Algemene storing van het toestel. De zuurstoftoediening is onderbroken.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Het toestel onmiddellijk uitschakelen, zelfs indien het toestel minder dan 10 minuten aangeschakeld was. Tijdelijk de reservefles gebruiken. 2. Contacteer Oxycure.

12. ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN OXYCURE

▪ De saturatiemeter

De saturatiemeter is een toestel dat het zuurstofgehalte in het bloed meet. De saturatiemeter helpt te bepalen of een zuurstoftherapie nodig of efficiënt is.

Modellen.

- MD300 C15, voor individueel gebruik.
- MD300 C63, voor professioneel gebruik.
- MD300 C53, voor pediatrisch gebruik.



MD300 C63

→ Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan.

Raadpleeg onze website www.oxycure.be

▪ De kleine Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen



De Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen, met ingebouwde ontspanner, is DE oplossing bij een stroomonderbreking. Eén m³ geeft een autonomie van 8 uren 20 minuten op 2 LPM.

Modellen.

- | | |
|----|--------------------|
| B5 | 1,0 m ³ |
| B2 | 0,4 m ³ |

→ Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan.

Raadpleeg onze website www.oxycure.be

▪ De draagbare Oxycure concentrators

De draagbare Oxycure concentrators zijn draagbare en autonome medische hulpmiddelen. Ze zijn compact en licht en bieden een quasi onbeperkte "effectieve" autonomie. Ze werken zowel met een oplaadbare batterij als op stroom (wisselstroom 110-240 volt), of in een auto (gelijkstroom 12 volt), zonder enige onderbreking wanneer men van energiebron wisselt.

De draagbare Oxycure concentrators zijn uitgerust met een spaarventiel

De draagbare Oxycure concentrators zijn over het algemeen niet geschikt voor gebruik tijdens de slaap.



→ Meer informatie op www.oxycure.be of bij onze klantendienst

13. OPVOLGING VAN UW THERAPIE




Uw Oxycure assistent

Vraag uw arts om hieronder de opeenvolgende voorgeschreven doseringen/behandelingen te noteren.

Datum	Liters per minuut (LPM)	Uren per dag	Opmerkingen

Opmerkingen.

14. PERIODIEK ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER

PERIODICITEIT	ACTIES
<p>Elke dag (verplicht)</p>	<p>De bevochtiger schoonmaken en ontsmetten met een ontsmettingsproduct (te koop in de handel) of met een oplossing van 10% azijn en 90% water. Het water van de bevochtiger vervangen.</p>
<p>Elke dag (Sterk aangeraden)</p>	<p>De neuscanule reinigen (met de opening naar onder): met warm zeepwater of met een oplossing van water (90%) en azijn (10%). Zorgvuldig spoelen en laten drogen vóór hergebruik.</p>
<p>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</p>	<p>De stoffilter vervangen (afkoeling)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>
<p>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</p>	<p>Neuscanule (of bril) of masker vervangen. Bevochtiger vervangen.</p>
<p>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</p>	<p>Onderhoud van het toestel met een licht bevochtigde doek (mild huishoudelijk onderhoudsproduct).</p>
<p>Elke 6 maanden of om de 5.000 uren maximum (Verplicht)</p> <p>Op uitdrukkelijk verzoek van Oxycure (Verplicht)</p>	<p>Inlaatfilter vervangen (automatisch door Oxycure om de 6 maanden geleverd). De filter lichtjes tegenwijzerzin draaien en trekken. De nieuwe filter op de greep vervangen.</p> 

VERPLICHT PROGRAMMA VOOR DE VERVANGING VAN DE TOEBEHOREN

Gelieve het onderstaand programma voor de vervanging van de toebehoren te volgen en het aantal uren van de concentrator Oxycure op die datum te vermelden.

Met deze gegevens kan uw arts de loop van uw behandeling opvolgen.

Naam patiënt :

Kamernummer patiënt :

Maand	Acties op de eerste dag van de maand	Aantal uren van de concentrator Oxycure
1	INSTALLATIE OP	
2	<u>Vervangen:</u> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken	
3		

In de loop van de 4^{de} maand bezorgt Oxycure de toebehoren voor de behandeling van de 6 volgende maanden.

4	<u>Vervangen:</u> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken	
5		
6		
7	INGANGSFILTER EN TOEBEHOREN VERVANGEN	
8	<u>Vervangen:</u> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken	
9		
10		
11		
12		

▪ **Toebehoren voor een bijkomende behandeling van 6 maanden.**

Na de eerste drie maanden krijgt u een doos met de toebehoren voor een bijkomende behandeling van zes maanden. Deze dienst is in de terugbetaling inbegrepen.