



Concentrateur Oxycure Prepaid 3 Kröber O2

Mode d'emploi

USAGE LIMITÉ : 3 mois - 999 heures

Mise en service : instructions résumées.

1. Appuyer sur le bouton marche/arrêt I/O
2. Régler le débit au moyen du deuxième bouton !
 - 1- Maintenir le bouton enfoncé jusqu'à ce que les données de l'écran clignotent ;
 - 2- Relâcher la pression ;
 - 3- Tourner le bouton jusqu'à l'obtention du débit souhaité ;
 - 4- Appuyer une nouvelle fois sur le bouton pour confirmer votre réglage ;
3. Pour plus de détails, voir mode d'emploi au verso.

Entretien périodique.

1. Tous les jours
 - 1- Pour les traitements avec humidificateur : Nettoyer et désinfecter l'humidificateur et en remplacer l'eau (eau du robinet)
2. Le 1^{er} jour du mois :
 - 1- Remplacer le filtre mousse (refroidissement) ;
 - 2- Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux légèrement humide ;
 - 3- Remplacer la lunette à oxygène ;
 - 4- Remplacer l'humidificateur.
2. Tous les 6 mois :
 - 1- Remplacer le filtre d'entrée + les opérations du point 2 ci-dessus.

Nous vous remercions d'avoir opté pour un concentrateur Oxycure.



Gamme Oxycure, de Gauche à Droite.

Concentrateurs portables Oxycure.

- Concentrateur portable Oxycure – Inogen G4
- Concentrateur portable Oxycure – Inogen G3
- Concentrateur portable Oxycure – Zen-O lite
- Concentrateur portable Oxycure – Simply Go Mini
- Concentrateur portable Oxycure – SimplyGo
- Concentrateur portable Oxycure – eQuinox

Concentrateurs Oxycure.

Concentrateur Oxycure - Kröber

Bouteilles Oxycure (oxygène gazeux).

Bouteille Oxycure B2 – 0,4 m³

Bouteille Oxycure B5 – 1,0 m³

Réservoirs Oxycure (oxygène liquide).

Réservoir Oxycure d'oxygène liquide - 25,6 m³

Réservoir portable Oxycure d'oxygène liquide (1,0 m³)

Plus d'informations sur www.oxycure.be



OXYCURE : COMMANDES

15 90

081 22

Oxycure Belgium sa.

Business Park
L. Génicot, 9
B-5380 Fernelmont
Belgium
Tel + 32 (0)81 22 15 90
Fax + 32 (0)81 22 15 99

<http://www.oxycure.be>
e-mail : oxycure@oxycure.be

HEURES D'OUVERTURE

Du lundi au vendredi

09.00 – 12.30 et 13.30 – 18.00

SERVICE DE GARDE

0800 98 0 68

Notre service de garde est un service permanent (7 jours/7 – 24 heures /24).

Il est exclusivement réservé aux installations urgentes d'appareils et dépannages de nos appareils.

Appel au service de garde

- Laisser un message sur le répondeur avec votre nom et numéro de téléphone et indiquer brièvement la raison de votre appel ;
- La permanence vous rappellera endéans les 20 minutes ;
- Si la permanence ne vous a pas rappelé endéans les 20 minutes, laisser un nouveau message.

Notes

1. Les interventions techniques (dépannages) sont incluses dans le prix de l'assistance et de la location.
2. Les livraisons de marchandises, en dehors des heures de bureaux, sont payantes.

REMBOURSEMENT DU CONCENTRATEUR OXYCURE

Le concentrateur Oxycure est disponible :

1. EN PHARMACIE, SUR PRESCRIPTION DU MÉDECIN GÉNÉRALISTE OU SPÉCIALISTE.

En vertu de l'Arrêté Royal du 24 octobre 2002, le concentrateur Oxycure est remboursable sur prescription du médecin généraliste ou spécialiste déposée dans une pharmacie ouverte au public pour :

- **le traitement de l'hypoxémie aiguë.**
Durée maximale : 3 mois consécutifs.
Accord du médecin conseil nécessaire.
- **les soins en palliatif.**
Durée illimitée.
Statut palliatif reconnu avec hypoxémie.

→ **OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DE L'UTILISATEUR**

Pour pouvoir bénéficier du remboursement des Soins de Santé en Belgique, vous devez être en ordre de mutuelle ou d'assurance et :

- Remettre à votre pharmacien l'autorisation du médecin conseil ;
- Remettre à votre pharmacien une prescription par mois en début de mois ;
- La prescription doit comporter les mentions suivantes :

Oxycure	<u>Exemple</u>	Oxycure
Le mois		Septembre 2010
Le débit et la durée journalière		2 LPM / 12 heures
Humidificateur		Humidificateur
Tiers payant applicable (en soins palliatifs)		

→ **LE TRAITEMENT OXYCURE COUVRE LES PRESTATIONS SUIVANTES :**

Libellé	Prix public par mois	Montant à votre charge
L'installation et formation de l'utilisateur et de son entourage. La reprise en fin de traitement	31,80	0,00
Le concentrateur Oxycure Les accessoires nécessaires à la thérapie Le service de garde Oxycure 24h/24, 7j/7 en cas de problème technique	90,10	0,00
L'humidification mensuelle (1 pièce / mois)	5,51	0,00
Une bouteille de réserve (panne électrique)	0,00	0,00
L'honoraire de coordination du traitement		0,00

→ **LE REMPLACEMENT DE LA/DES BOUTEILLE(S)** se fait sur prescription médicale aux conditions prévues par l'A.R. du 21/12/2001.

Libellé	Prix public par mois	Montant à votre charge
Prix public de l'oxygène médical (/m ³)	5,55	5,55
Location des bouteilles (forfait)	26,60	26,60
L'honoraire de coordination du traitement par votre pharmacien	-	-

2. DANS UN CENTRE DE PNEUMOLOGIE, SUR PRESCRIPTION D'UN MEDECIN SPECIALISTE EN PNEUMOLOGIE OU PEDIATRIE.

Dans le cadre de « La Convention en matière d'oxygénothérapie de longue durée à domicile en cas d'insuffisance chronique grave », le concentrateur Oxycure est entièrement remboursable pour une durée d'un an renouvelable.

→ **Vos obligations administratives de l'utilisateur :**

- Répondre aux conditions fixées par la convention (examens dans un centre de pneumologie) et obtenir l'accord du médecin conseil de la mutuelle.
- Arrêt tabagique.

→ La « convention en matière d'oxygénothérapie de longue durée à domicile en cas d'insuffisance respiratoire chronique grave » couvre les prestations suivantes :

Libellé	Montant à votre charge
Installation et formation de l'utilisateur et de son entourage Reprise en fin de traitement	0,00
Le concentrateur Oxycure Les accessoires nécessaires à la thérapie (une pièce/mois) Le service de garde Oxycure 24h/24, 7j/7 en cas de problème technique	0,00
L'humidification (1 pièce / mois)	0,00
Les frais d'électricité (1,00 €/jour de traitement, payable par votre mutualité)	0,00
Une bouteille d'oxygène de réserve (panne d'électricité)	0,00
L'honoraire de coordination du traitement	0,00

3. UN TRAITEMENT « OXYCURE PREPAID 3 », DANS UNE PHARMACIE SUR PRESCRIPTION D'UN MEDECIN GENERALISTE OU SPECIALISTE

Au cas où vous ne bénéficiez plus du droit au remboursement, mais que votre état de santé nécessite la poursuite d'une oxygénothérapie suyvant l'avis du médecin traitant, nous vous proposons notre formule « Oxycure Prepaid 3 », hors remboursement.

L'utilisation de « l'Oxycure Prepaid 3 » est limitée de manière électronique à trois mois et 999 heures. Tous les trois mois, ou dès que le solde horaire est épuisé, nous « rechargeons » le compteur, sauf avis contraire de votre médecin ou pharmacien.

Cette formule vous garantit une qualité de traitement identique à celle dont vous bénéficiez avec le concentrateur Oxycure.

Libellé	Montant à votre charge
Oxycure « Prepaid 3 »	192,93
Humidification	11,02
Installation	31,80

1. AVERTISSEMENTS

L'utilisation du « concentrateur Oxycure Prepaid 3 » ne peut se faire que sur avis médical autorisé.

L'oxygène produit par cet appareil est un médicament. Au cas où, en cours de thérapie, des effets secondaires ou des restrictions fortes du bien-être se manifestent, veuillez consulter immédiatement un médecin.

L'usage de ce concentrateur Oxycure Prepaid 3 est limité électroniquement à 999 heures.

Veuillez appeler Oxycure dès que le compteur affiche 50 heures. (9h00-18h00)

Oxycure décline toute responsabilité en cas de non respect de cette procédure.

Dès votre appel, Oxycure organise, à votre meilleure convenance, le remplacement de votre concentrateur Oxycure Prepaid par un concentrateur Oxycure Prepaid 3 identique.

Attention.

Ce document fait référence au manuel de l'utilisateur du fabricant. Ce manuel est disponible en français, anglais et allemand ; il est consultable sur notre site www.oxycure.be ou sur demande à notre service clientèle.

2. CONSIGNES DE SECURITE

Le concentrateur Oxycure porte la marque CE et satisfait à toutes les normes en vigueur dans l'Union Européenne.

Cet appareil produit de l'oxygène. L'oxygène accélère la combustion et peut provoquer l'inflammation instantanée des graisses et des corps gras, même des pommades ou onguents. Pendant l'utilisation de cet appareil, pour votre sécurité et celle de votre entourage, il est impératif de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- 1. Ne pas fumer**
- 2. Maintenir l'appareil éloigné (2 mètres) de toute source de chaleur, de toute flamme nue ou étincelle**
- 3. L'appareil, les accessoires et le visage doivent être exempts de graisses, huiles, corps gras (pommade ou onguent)**
- 4. Ne jamais ouvrir, démonter l'appareil (risque d'électrocution) ou enlever l'étiquetage de l'appareil**
- 5. Ne jamais couvrir l'appareil**
- 6. Maintenir l'appareil au sec**

3. INCIDENTS

Que faire si ma canule nasale ou mon tuyau d'oxygène prend feu ?

Cet incident peut arriver avec toute utilisation d'oxygène (oxygène gazeux en bouteilles, oxygène liquide) si les consignes de sécurité ne sont pas respectées.

1. Déconnecter le tuyau de l'appareil.
2. Eteindre l'appareil.
3. Etouffer les flammes avec une couverture, par exemple.
4. Aérer la pièce jusqu'à disparition de la fumée et des odeurs.

4. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Concentrateur Oxycure–Kröber Prepaid

Fabricant	Kröber Medizintechnik GmbH. D-56332 Dieblich Tel. +49 2607 9404	
Modèle	Kröber O²/Prepaid 3	Kröber O², v4.0/ Prepaid 3
Utilisation limitée	999 heures ou 3 mois (Premier terme atteint)	999 heures ou 3 mois (Premier terme atteint)
Classification MEDDEV	IIa	IIa
Classe de protection	II	II
Tension nominale	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Fusibles : secteur : carte	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V
Température ambiante d'utilisation	10° à 40 ° C	10° à 40 ° C
Pression atmosphérique d'utilisation	700 à 1060 mbar	700 à 1060 mbar
Dimensions (H x P x L, en cm)	53,5 x 20,3 x 52 cm (sans les roulettes)	53,5 x 20,3 x 52 cm (sans les roulettes)
Masse	19,8 kg	16,0 Kg
Débit volumétrique	1 à 6 lpm (litres/min)	1 à 5 lpm (litres/min)
Concentrations nominales (Version N51)	0,1 à 4 l/min 95% -3% >4 à 5 l/min 85% ±3% 5 à 6 l/min 75% ±3%	0,1 à 4 l/min 95% -3% >4 à 5 l/min 85% ±3% ¹ -
Alarmes (acoustiques et visuelles)	Température élevée Panne de secteur Débit Concentration oxygène Système	Température élevée Panne de secteur Débit Concentration oxygène Système
Affichage d'état	Débit d'oxygène	Débit d'oxygène
Puissance acoustique	35 dB(A)	31,1 dB(A)
Consommation	307 – max. 350 W	Max. 280 W
Agréations	CE 0197	CE 0197

¹ Alarme O2 probable à partir de 4,5 LPM

5. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

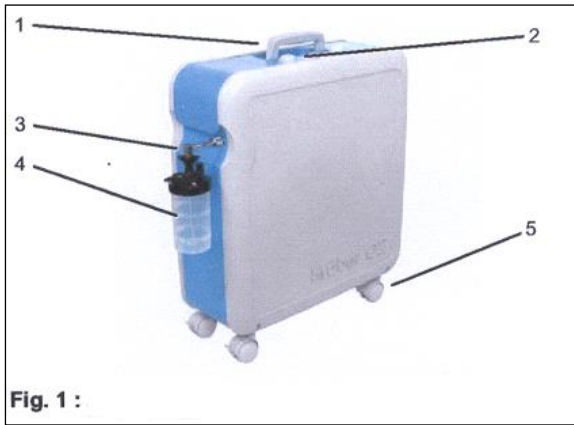


Fig. 1 :

1. Poignée
2. Champ de commande et écran
3. Sortie d'oxygène et raccord angulaire
4. Humidificateur
5. Roulettes



Fig.2

6. Cordon d'alimentation
7. Grille amovible et filtre mousse (refroidissement)

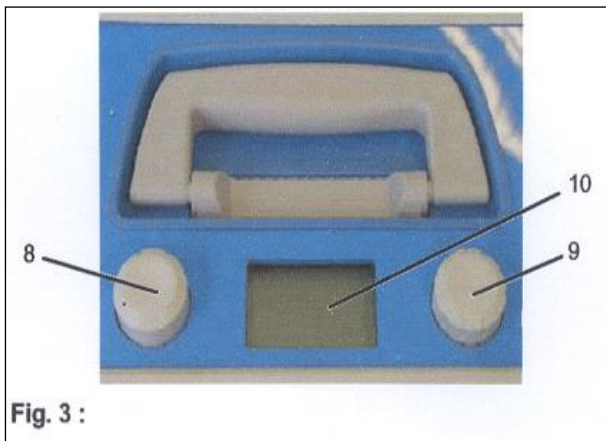


Fig. 3 :

8. Commutateur Marche/Arrêt
9. Bouton de réglage de débit
10. Ecran

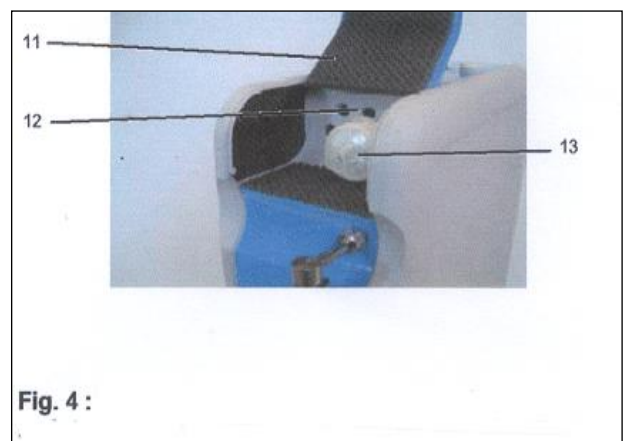



Fig. 4 :

11. Couvercle du compartiment de maintenance
12. Fusibles
13. Filtre d'entrée (aspiration)

Le concentrateur Oxycure Prepaid 3 se distingue par deux autocollants bleus sur les côtés:



Ou :

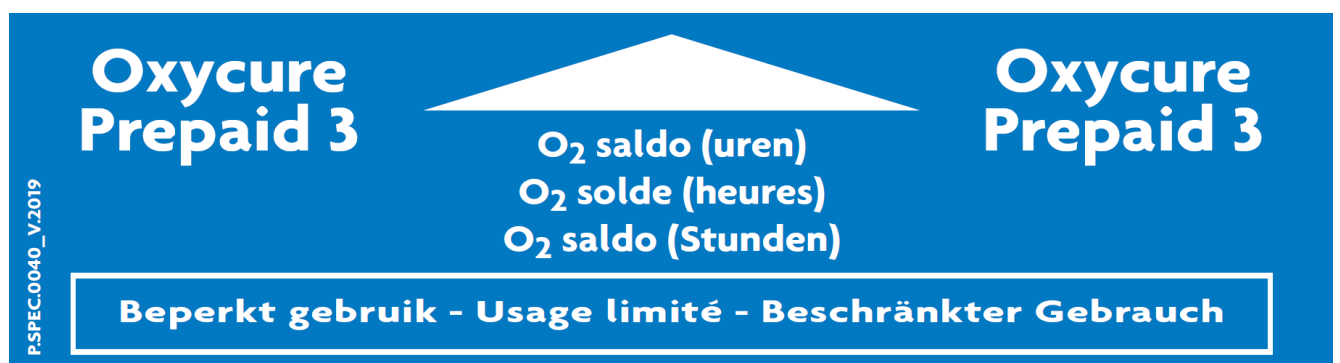

6. ACCESSOIRES NÉCESSAIRES

Les accessoires ci-dessous doivent ou peuvent être utilisés avec le concentrateur Oxycure Prepaid 3. Votre assistant vous aidera à les choisir en fonction de vos désidératas et de vos besoins.

Filtres et accessoires pour le concentrateur Oxycure		Prix public
0305	Filtre entrée Kröber	7,87
0303	Filtre « mousse » de refroidissement (6 pces.)	7,26
0132	Connecteur CPAP 22F/22M/6mm	10,89
Canules et masques		
0253	Canule nasale adulte SP (+2 m tuyau)	2,54
0259	Canule nasale adulte CP (+2 m tuyau)	2,54
0257	Canule nasale K pédiatrique (+2 m tuyau)	2,54
0258	Canule nasale KK neonatal (+2 m tuyau)	2,54
0261	Masque oxygène adulte (+1,8 m tuyau)	2,54
0262	Masque oxygène pédiatrique (+1,8 m tuyau)	2,54
0288	Masque oxygène trachéotomie adulte	2,54
0289	Masque oxygène trachéotomie enfant	2,54
0263	Masque oxygène HC100% High Concentration	2,54
Tuyaux et accessoires pour tuyaux		
0279	Tuyau de sécurité - 3,0 m	1,70
0254	Tuyau de sécurité - 10,0 m	1,70
4004-917	Water trap	5,00
0163	Connecteur tuyau droit 5/5 mm	5,00
0390	Connecteur tuyau droit 5/5 mm rotatif 360°	5,00
0172	Connecteur tuyau T 6/6/6 mm	5,00
Humidificateurs et accessoires		
0310	Raccord Inox 90° pour humidification	35,70
0302	Humidificateur réutilisable Homecare 100 ml	5,51
0212	Humidificateur réutilisable 350 ml	5,51

Les accessoires nécessaires à l'application de votre thérapie (lunettes ou masques à oxygène) sont fournis à l'installation de cet appareil.

Oxycure vous remet à l'installation de l'appareil une boîte d'accessoires pour un traitement de 3 mois. A l'issue de cette période, Oxycure vous enverra automatiquement et sans frais, une nouvelle caisse contenant les accessoires pour 6 mois de traitement supplémentaires. A l'issue de votre thérapie, les accessoires non utilisés doivent être remis à Oxycure.

A défaut, ceux-ci seront facturés aux prix indiqués ci-dessus.

Pour une application parfaite de la thérapie et un fonctionnement optimal de l'appareil, Oxycure recommande de remplacer les accessoires une fois par mois.

Voir également le point 14.

7. EMPLACEMENT DE L'APPAREIL

Le bon fonctionnement de l'appareil n'est possible que si l'appareil est placé à un endroit correspondant à tous les points repris ci-dessous.

L'appareil doit être placé :

- Sur un sol ferme et plane, dans un endroit sec et bien aéré.
→ éviter les petits réduits, les salles de bains.
- A l'abri des courants d'air chauds ou froids, des rayons directs du soleil.
→ éviter de placer l'appareil devant une fenêtre ou une porte vitrée.
- Ne JAMAIS couvrir l'appareil.
- A une distance minimale de 30 cm des murs, des rideaux et d'autres grands objets (p. ex. meubles), afin de garantir une aspiration normale de l'air ambiant par l'appareil.
- A distance respectable d'une source de chauffage (2 mètres).

8. MISE EN SERVICE

Le concentrateur Oxycure – Kröber a besoin d'approximativement 10 minutes pour stabiliser l'ensemble de ses paramètres. Une alarme peut s'afficher à l'écran pendant cette période.

Si cette alarme perdure après 10 minutes, appelez notre service support.


▪ Si vous utilisez un humidificateur

1. Brancher le câble d'alimentation à l'arrière de l'appareil (Fig.2, 6 page 8) au réseau électrique (230 Volts, 50 Hz).
2. Visser le raccord d'angle sur la sortie oxygène de l'appareil (photo 2 ci-dessous).
3. Dévisser le gobelet de l'humidificateur et le remplir avec de l'eau (eau de ville) entre niveau minimum et maximum ;
4. Revisser le gobelet au support en veillant à l'étanchéité. En cas de fuite à ce niveau, l'oxygène ne parviendra pas à l'utilisateur.
5. Visser l'humidificateur sur le raccord angulaire.
6. Connecter la canule nasale ou le tube d'oxygène (rallonge) sur la sortie de l'humidificateur.
7. Pousser sur le bouton de marche / Arrêt (Fig.3, 8 page 8).
8. Régler le débit. Voir § 9 page 11.



▪ **Si vous n'utilisez pas d'humidificateur :**

1. Brancher le câble d'alimentation fourni à l'arrière de l'appareil (Description p.8, Fig.2,6) au réseau électrique (230 Volts, 50 Hz).
2. Visser le raccord d'angle sur la sortie oxygène de l'appareil (photo 2 ci-dessous).
3. Visser l'embout conique sur le raccord d'angle (photo 5 ci-dessous).
4. Connecter le tuyau d'oxygène sur l'embout conique.
5. Connecter la canule nasale sur le tuyau d'oxygène au moyen du connecteur de tuyau fourni.
6. Mettre l'appareil en marche (Fig.3, 8 page 8)
7. Régler le débit.

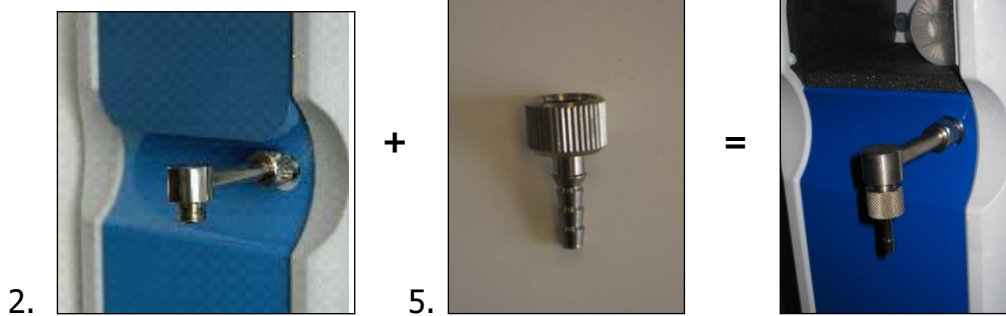


9. REGLAGE DU DEBIT

1. Appuyer quelques secondes sur le bouton de réglage de débit (Fig.3, 9 page 8) jusqu'à ce que l'indication du débit (les chiffres) clignote ;
2. Quand l'indication du débit clignote à l'écran (Fig.3, 10 page 8), relâcher la pression sur le bouton ;
3. Tourner le bouton de réglage vers la gauche pour diminuer le débit, vers la droite pour augmenter le débit ;
4. Une fois la valeur souhaitée atteinte, appuyer brièvement sur le bouton de réglage de débit pour confirmer votre choix ; la valeur demandée s'inscrit sur l'écran. L'appareil adaptera le débit à la valeur souhaitée.


10.A. AFFICHAGE SUR L'ECRAN (concentrateur Prepaid 3 uniquement).

Après sa procédure de test, l'écran indique successivement :

1. Le débit réglé (par exemple : « 2,0 lpm » pour 2 litres par minute).
2. Le nombre total d'heures de fonctionnement de l'appareil.
3. Sur certains modèles, le solde du nombre d'heures d'utilisation et le débit réglé, comme suit :

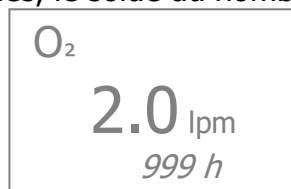

4. Lorsque la réserve de fonctionnement de l'appareil de 999 heures est épuisée, le concentrateur Oxycure Prepaid ne délivrera plus d'oxygène. L'écran de contrôle affichera :

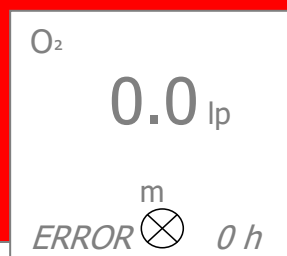

Note Importante :

L'écran n'affiche pas les minutes. Lorsque l'écran affiche 0 heure (0 h), la réserve effective de fonctionnement de l'appareil est de 1 à 59 minutes.

10.B. AUTRES AFFICHAGES SUR L'ÉCRAN.

En cas d'alarme détectée par le module de contrôle, le type de problème détecté apparaît sur l'écran en clignotant avec la mention "ERROR".



Voir également à ce sujet les paragraphes :






- 8. "Mise en service",
- 11.A "Astuces d'utilisation",
- 11.B. "Mesures à prendre si une alarme perdure".

11.A. ASTUCES D'UTILISATION

<p>L'appareil se met en alarme à sa mise en marche</p>	<p>Ceci est normal. L'appareil a besoin de 10 minutes pour stabiliser l'ensemble de ses paramètres.</p> <p>Si cette alarme perdure après 10 minutes, appeler Oxycure</p>
<p>L'appareil fonctionne normalement sans alarme, produit « des bulles dans l'humidificateur », mais vous ne recevez pas d'oxygène.</p>	<p>Ceci est dû à un problème d'étanchéité de l'ensemble « humidificateur – tube d'oxygène – lunette à oxygène ».</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Contrôler si le raccord d'angle (photo 2 p.10) est correctement vissé sur l'appareil ; 2. Contrôler si l'humidificateur est bien vissé sur cette tige ; 3. Contrôler si l'humidificateur est correctement vissé et que le gobelet est bien fermé. L'oxygène ne pourra sortir de l'humidificateur par le tube d'oxygène ou la lunette à oxygène que si l'humidificateur est correctement et hermétiquement fermé.
<p>De l'eau arrive dans la lunette à oxygène.</p>	<p>Ceci est un problème de condensation de l'oxygène humidifié et chaud (20-25°C) dans un tube à oxygène froid car posé sur un sol froid. <u>Solutions</u> :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eviter que le tube à oxygène soit en contact avec le sol froid ; 2. Essayer d'utiliser l'appareil quelque temps sans eau dans l'humidificateur 3. Commander l'accessoire pour tuyau « Water trap » qui évitera ce problème.
<p>L'appareil se met en alarme O2 à 4,5 LPM</p>	<p>Certains appareils KRO2.V4 se mettent en alarme dès 4,5 LPM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier s'il y a des fuites au niveau de l'humidificateur ou des tuyaux d'oxygène. 2. Appeler Oxycure (Le numéro se trouve sur l'appareil).

11.B. MESURES A PRENDRE SI UNE ALARME PERDURE

AFFICHAGE SUR L'ECRAN TYPE D'ALARME	MESURES A PRENDRE
 <p>→ Alarme débit</p> <p>(code_LPM)</p>	<p>L'oxygène produit ne parvient pas à l'utilisateur suite à un accessoire mal positionné ou défectueux.</p> <p>Mesures à prendre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laisser l'appareil en marche afin d'exécuter la procédure de contrôle ci-dessous ; 2. Déconnecter (dévisser) l'humidificateur de l'appareil (raccord angulaire en acier inoxydable). Si l'alarme s'arrête, le problème se situe au niveau des accessoires situés <u>APRES</u> l'appareil et <u>passer au point 3.</u> Si l'alarme continue, appeler Oxycure (Le numéro se trouve sur l'appareil). 3. Démontez tous les accessoires. Enlever la lunette à oxygène (canule), le tuyau d'oxygène et l'humidificateur de l'appareil 4. Remonter les accessoires un à un dans l'ordre suivant : <ul style="list-style-type: none"> . Humidificateur . Tube (rallonge) . Lunette à oxygène Ceci vous permettra de déterminer quel accessoire pose problème. <ul style="list-style-type: none"> . Remplacer l'humidificateur si nécessaire. . Vérifier si la canule (lunette) à oxygène ou le tuyau d'oxygène n'est pas bouché, plié, coincé dans une porte, sous un pied de chaise. Libérer les accessoires ou les remplacer si nécessaire. Si l'alarme persiste, retourner au point 3. 5. Appeler Oxycure.
 <p>→ Alarme de température</p> <p>(code_T°)</p>	<p>La température intérieure de l'appareil est trop élevée.</p> <p>Mesures à prendre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eteindre l'appareil pour éviter de l'endommager. 2. Vérifier si l'emplacement de l'appareil est correct et si l'air peut entrer dans l'appareil sans obstacle. 3. Vérifier le filtre mousse. Le remplacer au besoin. 4. Vérifier le filtre d'entrée. Le remplacer au besoin. 5. Remettre l'appareil en fonctionnement. 6. Si l'alarme persiste, éteindre l'appareil pour éviter de l'endommager. 7. Utiliser temporairement la bouteille de réserve fournie par Oxycure. 8. Appeler Oxycure.

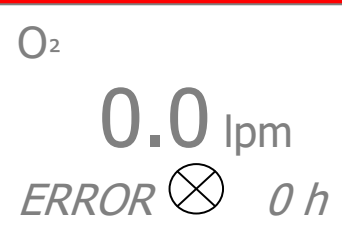 <p>→ Panne de secteur</p> <p>(code_AC)</p>	<p>L'alimentation en électricité est interrompue.</p> <p><u>Mesures à prendre :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier si le cordon d'alimentation est bien connecté à une prise murale. 2. Contrôler des fusibles de votre logement ou qu'il n'y a pas de panne de courant. 3. Essayer un autre appareil électrique dans la même prise. 4. Si l'alarme persiste, utiliser temporairement la bouteille de réserve. 5. Appeler Oxycure.
 <p>→ Alarme oxygène (O₂)</p> <p>(code_O2)</p>	<p>Le capteur multifonction a détecté une concentration d'oxygène inférieure à 82%.</p> <p>Votre appareil délivre toujours de l'oxygène mais sa concentration a diminué.</p> <p><u>Mesures à prendre :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifier s'il y a des fuites au niveau de l'humidificateur ou des tuyaux d'oxygène. 2. Appeler Oxycure.
 <p>→ Alarme capteur</p> <p>(code_SE)</p>	<p>Le capteur multifonction ne peut pas déterminer la quantité et la concentration de l'oxygène produit.</p> <p><u>Mesures à prendre :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Utiliser temporairement la bouteille de réserve. 2. Appeler Oxycure.
 <p>→ Alarme générale</p> <p>(code_ERR)</p>	<p>Dysfonctionnement général de l'appareil. La fourniture d'oxygène est interrompue.</p> <p><u>Mesures à prendre :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Eteindre immédiatement l'appareil, même si l'appareil est allumé depuis moins de 10 minutes et utiliser temporairement la bouteille de réserve. 2. Appeler Oxycure.
 <p>→ Fin de la réserve de fonctionnement.</p>	<p>Fin de la réserve de fonctionnement.</p> <p><u>Mesures à prendre :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrêter l'appareil (compresseur) en appuyant sur le bouton marche/arrêt. 2. Appeler d'urgence Oxycure

12. AUTRES PRODUITS ET SERVICES OXYCURE

▪ Le pulse oxymètre

Le pulse Oxymètre est un appareil de mesure de la saturation du sang en oxygène. Le pulse Oxymètre permet de déterminer la nécessité d'une oxygénothérapie ou de contrôler son efficacité.

Modèles.

- MD300 C15, pour usage personnel
- MD300 C63, pour usage professionnel
- MD300 C53, pour usage pédiatrique



MD300 C63

- Contacter votre médecin ou votre pharmacien à ce sujet ou demander notre brochure informative.
Consulter notre site www.oxycure.be.

▪ La petite bouteille Oxycure de réserve ou de déambulation



La bouteille de réserve ou de déambulation Oxycure, munie d'une vanne à détenteur intégré, est LA solution en cas de panne d'électricité. Un m³ procure une autonomie de 8 heures et 20 minutes à 2 LPM.

Modèles.

B5	1,0 m ³
B2	0,4 m ³

- Contacter votre médecin ou votre pharmacien à ce sujet ou demander notre brochure informative.
Consulter notre site www.oxycure.be.

▪ Le concentrateur portable Oxycure – Inogen

Le concentrateur portable Oxycure est un dispositif médical portable et autonome. Compact et léger, le concentrateur portable Oxycure offre une autonomie « effective » quasi illimitée. Il fonctionne aussi bien sur batterie rechargeable, sur le secteur (courant alternatif 110-240 volt) ou dans un véhicule (courant continu 12 volt) sans aucune interruption en cas de changement de source d'énergie. Le concentrateur portable Oxycure est équipé d'une valve économiseuse (OCD).

Le concentrateur portable Oxycure ne convient généralement pas pour une utilisation pendant le sommeil.



→ Plus d'information sur www.oxycure.be ou auprès de notre service clients

13. SUIVI DE VOTRE TRAITEMENT.

Votre assistant Oxycure

Demandez à votre médecin d'inscrire ci-dessous les doses successives prescrites.




Date	Litres par minute (LPM)	Heures par jour	Remarques
			INSTALLATION

Notes.

14. ENTRETIEN PERIODIQUE PAR L'UTILISATEUR

Votre appareil de réserve sera remplacé toutes les 999 heures de fonctionnement sur prescription de votre médecin et avec l'accord de votre pharmacien.

A titre d'information, l'entretien d'un concentrateur Oxycure, pour une utilisation continue, est le suivant :

Périodicité	Actions
Tous les jours (Obligatoire)	Nettoyer l'humidificateur avec un désinfectant (vendu dans le commerce) ou une solution de 10% de vinaigre et 90% d'eau. Remplacer l'eau de l'humidificateur.
Tous les jours (fortement conseillé)	Nettoyer la canule nasale (orifice vers le bas) avec de l'eau chaude savonnée ou une solution de 10% de vinaigre et 90% d'eau. Rincer abondamment et faire sécher avant réutilisation.
Le 1^{er} jour du mois Tous les mois (Obligatoire)	Remplacer le filtre mousse (refroidissement).  
Le 1^{er} jour du mois Tous les mois (Obligatoire)	Remplacer : <ul style="list-style-type: none"> ▪ La canule nasale (ou lunette) ou le masque ; ▪ L'humidificateur.
Le 1^{er} jour du mois Tous les mois (Obligatoire)	Nettoyer l'appareil avec un chiffon légèrement humide (produit d'entretien de ménage doux).
Tous les 6 mois Toutes les 5.000 heures maximum Sur demande expresse d'Oxycure (Obligatoire)	Remplacer le filtre d'entrée (aspiration). (fourni automatiquement par Oxycure tous les 6 mois). Tourner le filtre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et tirer. Remplacer le nouveau filtre sur le manchon. 

PROGRAMME OBLIGATOIRE DE REMPLACEMENT DES ACCESSOIRES

Veillez suivre le programme de remplacement des accessoires ci-dessous et indiquer le nombre d'heures du concentrateur Oxycure à cette date.

Ces données permettent à votre médecin de suivre de votre traitement.

Nom du patient :

Numéro de chambre du patient :

Mois	Actions à entreprendre le 1er jour du mois
INSTALLATION LE	
1	<u>Remplacer</u> : 1. La lunette ou le masque à oxygène 2. L'humidificateur 3. Le filtre mousse Nettoyer l'appareil
2	
3	

Au cours du 4^{ème} mois d'utilisation du concentrateur Oxycure, Oxycure vous fait parvenir les accessoires pour 6 mois de traitement supplémentaires.

4	<u>Remplacer</u> : 1. La lunette ou le masque à oxygène 2. L'humidificateur 3. Le filtre mousse Nettoyer l'appareil
5	
6	
6	REEMPLACER LE FILTRE D'ENTRÉE ET LES ACCESSOIRES HABITUELS
7	<u>Remplacer</u> : 1. La lunette ou le masque à oxygène 2. L'humidificateur 3. Le filtre mousse Nettoyer l'appareil
8	
9	
10	
11	
12	

▪ **Accessoires pour un traitement supplémentaire de 6 mois**

Après les 3 premiers mois de traitement, vous recevrez tous les six mois une boîte d'accessoires contenant les accessoires pour six mois de traitement supplémentaires. Ce service est inclus dans le prix.