



## Oxycure Reserve-Konzentrator Kröber O2 - R

### Gebrauchsanweisung



### **BESCHRÄNKTE NUTZUNG: 50 Stunden**

#### Inbetriebnahme: Zusammengefasste Anweisungen.

Bei der Inbetriebnahme dieses Reservegerätes rufen Sie bitte Oxycure an, um einen rückerstattungsfähigen Oxycure-Konzentrator im Namen des Patienten zu bestellen. (9.00U - 18.00U außer Notfall)

1. Ein/Aus-Schalter drücken I/O
2. Den Durchfluss mit dem zweiten Schalter einstellen !
  - 1- Den Schalter/Regler gedrückt halten, bis die Daten auf dem Bildschirm blinken;
  - 2- Den Druck nachlassen;
  - 3- Den Regler bis zum Erhalt des gewünschten Durchflusses drehen;
  - 4- Erneut auf den Regler drücken, um Ihre Einstellung zu bestätigen;
3. Für weitere Details siehe Gebrauchsanweisung auf der Rückseite.

#### Periodische Wartung.

1. Täglich
  - 1- Wenn Sie einen Befeuchter verwenden: den Befeuchter reinigen und desinfizieren und das Wasser im Luftbefeuchter ersetzen (Leitungswasser)
1. Am 1. Tag des Monats:
  - 1- Den Grobstaubfilter (Schaumgummifilter, zur Abkühlung) ersetzen;
  - 2- Das Gerät mit einem leicht feuchten, weichen Tuch reinigen;
  - 3- Die Nasenbrille (Sauerstoffbrille) ersetzen;
  - 4- Den Befeuchter ersetzen.
2. Alle 6 Monate:
  - 1- Den Eingangsfilter ersetzen + die Tätigkeiten des Punktes 2 oben.

**Wir danken Ihnen dafür, dass Sie sich für einen Oxycure-Konzentrator entschieden haben.**



## **Sauerstofftherapie**

### Tragbare und portable Oxycure-Konzentratoren

- Tragbarer Konzentrator Oxycure – Inogen G3
- Tragbarer Konzentrator Oxycure – Inogen G4
- Tragbarer Konzentrator Oxycure – Inogen G5
- Tragbarer Konzentrator Oxycure – SimplyGo Mini
- Tragbarer Konzentrator Oxycure – SimplyGo
- Tragbarer Konzentrator Oxycure – Eclipse 5
- Tragbarer Konzentrator Oxycure – Zen-O-Lite
- Tragbarer Konzentrator Oxycure – Zen-O (nicht auf dem Foto)

### Oxycure-Konzentrator

Oxycure Konzentrator – Kröber

### Oxycure-Flaschen (gasförmiger Sauerstoff)

- Oxycure-Flasche B2 – 0,4 m<sup>3</sup>
- Oxycure-Flasche B5 – 1,0 m<sup>3</sup>
- Oxycure-Flasche B10 – 2,1 m<sup>3</sup> (nicht auf dem Foto)

### Oxycure-Tanks (flüssiger Sauerstoff)

- Oxycure-Tank für flüssigen Sauerstoff - 26 m<sup>3</sup>
- Portabler Oxycure-Tank für flüssigen Sauerstoff (1,0 m<sup>3</sup>)

## **Schlafapnoe**

SBox - Sefam

*Weitere Informationen unter [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)*



Oxycure AG

Business Park

L. Génicot, 9

B-5380 Fernelmont

Belgien

Tel. + 32 (0)81 22 15 90

Fax + 32 (0)81 22 15 99

<http://www.oxycure.be>

E-Mail: [oxycure@oxycure.be](mailto:oxycure@oxycure.be)

## **ÖFFNUNGSZEITEN**

---

Montag bis Freitag

09.00 – 12.30 und 13.30 – 18.00 Uhr

## **BEREITSCHAFTSDIENST**

---

**0800 98 0 68**

Unser Bereitschaftsdienst ist ein Dauerdienst (die ganze Woche lang – rund um die Uhr).

Er ist ausschließlich der dringenden Aufstellung von Geräten und der Reparatur unserer Geräte vorbehalten.

### **Anruf an den Bereitschaftsdienst**

1. Lassen Sie eine Nachricht mit Ihrem Namen und Ihrer Telefonnummer auf dem Anrufbeantworter und geben Sie kurz den Grund für Ihren Anruf an;
2. Die Bereitschaft wird Sie innerhalb von 20 Minuten wieder anrufen;
3. Wenn Sie die Bereitschaft nicht innerhalb von 20 Minuten wieder anruft, hinterlassen Sie eine weitere Nachricht.

### **Anmerkungen**

1. Die technischen Eingriffe (Reparaturen) sind im Preis für Unterstützung und in der Leihgebühr enthalten.
2. Die Lieferungen von Artikeln außerhalb der Geschäftszeiten sind kostenpflichtig.

# 1. WARNHINWEISE

---

Die Verwendung des Oxycure-Konzentrators darf nur auf Anweisung des zuständigen Arztes erfolgen.

Der von diesem Gerät erzeugte Sauerstoff ist ein Medikament. Falls während der Therapie Nebenwirkungen oder starke Einschränkungen des Wohlbefindens auftreten, suchen Sie bitte sofort einen Arzt auf.

**Die Verwendung dieses Oxycure-Reserve-Konzentrators ist elektronisch auf 50 Stunden beschränkt.**

**Rufen Sie Oxycure schon ab der Inbetriebnahme dieses Reservegerätes an, um einen Oxycure-Konzentrator im Namen des Patienten zu bestellen. (9.00 - 18.00 Uhr außer Notfall)**

**Oxycure lehnt bei Nichteinhaltung dieses Verfahrens jede Haftung ab.**

Nach Ihrem Anruf organisiert Oxycure zu Ihrem Besten und je nach der Dringlichkeit:

1. Die Lieferung und den Einbau des rückerstattungsfähigen Oxycure-Konzentrators im Namen Ihres Patienten oder Residenten (Bewohners).
2. Den Ersatz Ihres Reservekonzentrators durch einen Reservekonzentrator mit einer Funktionsautonomie von 50 Stunden.

Dieses Dokument bezieht sich auf das Bedienerhandbuch des Herstellers. Dieses Handbuch steht in deutscher, englischer und französischer Sprache zur Verfügung; Sie können es auf unserer Website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be) oder auf Nachfrage bei unserem Kundendienst konsultieren.

## 2. SICHERHEITSANWEISUNGEN

---

Der Oxycure-Konzentrator trägt die Marke CE und erfüllt alle in der Europäischen Union geltenden Normen.

Dieses Gerät erzeugt Sauerstoff. Sauerstoff beschleunigt die Verbrennung und kann die augenblickliche Entzündung von Fetten, sogar von Salben und Pomaden hervorrufen! Während der Verwendung dieses Gerätes ist es für Ihre Sicherheit und die Ihrer Umgebung zwingend erforderlich, die folgenden Sicherheitsanweisungen zu beachten:

- 1. Nicht rauchen**
- 2. Das Gerät von allen Wärmequellen, offenem Feuer und Funken fernhalten (2 Meter)**
- 3. Das Gerät, die Zubehörteile und das Gesicht müssen frei von Fetten, Ölen, usw. (Pomade, Salbe) sein**
- 4. Das Gerät niemals öffnen, auseinanderbauen (Gefahr des Stromschlags oder die Etikettierung des Gerätes abnehmen)**
- 5. Das Gerät niemals abdecken**
- 6. Das Gerät trocken halten**

### 3. ZWISCHENFÄLLE

#### Was soll ich tun, wenn meine Nasenkanüle oder mein Sauerstoffschlauch Feuer fängt?

Dieser Zwischenfall kann bei jeder Verwendung von Sauerstoff passieren (gasförmiger Sauerstoff in Flaschen, flüssiger Sauerstoff), wenn die Sicherheitsanweisungen nicht eingehalten werden.


1. Den Schlauch von der Flasche abziehen.
2. Das Gerät ausschalten.
3. Die Flammen zum Beispiel mit einer Decke ersticken.
4. Das Zimmer bis zum Verschwinden des Rauches oder des Geruchs lüften.

### 4. TECHNISCHE DATEN


Oxycure–Kröber Reserve-Konzentrator.

Hersteller	<b>Kröber Medizintechnik GmbH</b> D-56332 Dieblich Tel. +49 2607 9404
Modell	<b>O2 / R</b>
<b>Beschränkte Nutzung</b>	<b>50 Stunden</b>
Klassifizierung MEDDEV	Iia
Schutzklasse	II
Nennspannung	230 V, 50 Hz
Sicherungen netzseitig : Karte (intern)	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V
Betriebstemperatur	10° bis 40 ° C
Atmosphärischer Betriebsdruck	700 bis 1060 mbar
Abmessungen (H x P x L, in cm)	53,5 x 20,3 x 52 cm (ohne die Lenkrollen)
Gewicht	19,8 kg
Volumenstrom	1 à 5 lpm (Liter/min)
Nennkonzentrationen (Version N51)	0,1 bis 4 l/min 95% -3% >4 bis 5 l/min 85% ±3% 5 bis 6 l/min 75% ±3%
Alarme (akustische und optische)	Hohe Temperatur Stromunterbrechung Durchfluss Sauerstoffkonzentration System
Statusanzeige	Sauerstoffdurchfluss
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>35 dB(A)</b>
Leistungsaufnahme	307 – max. 350 W
Zulassungen	CE 0197


## 5. BESCHREIBUNG DES GERÄTS

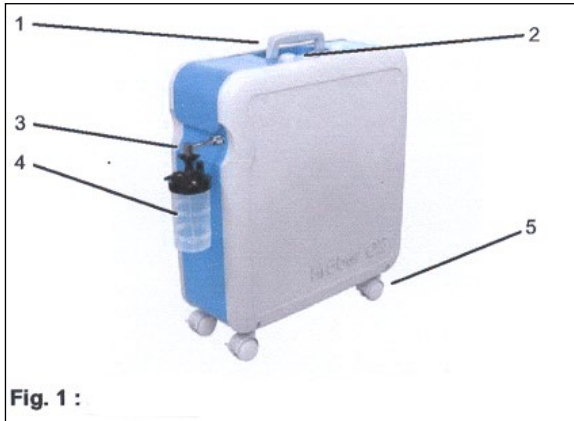


1. Tragegriff
2. Bedienfeld und LC-Display
3. Sauerstoffausgang und Winkelanschluss
4. Befeuchter
5. Lenkrollen

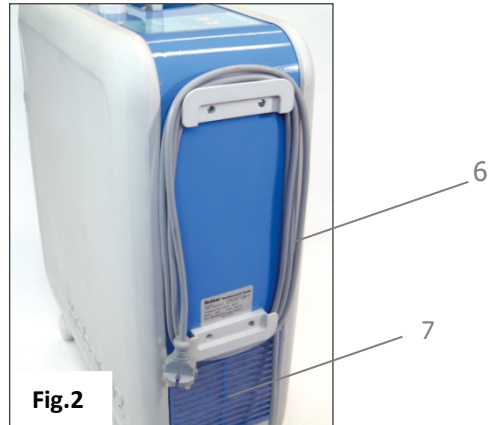

6. Netzkabel
7. Festes Gitter und Grobstaubfilter (Kühlung)

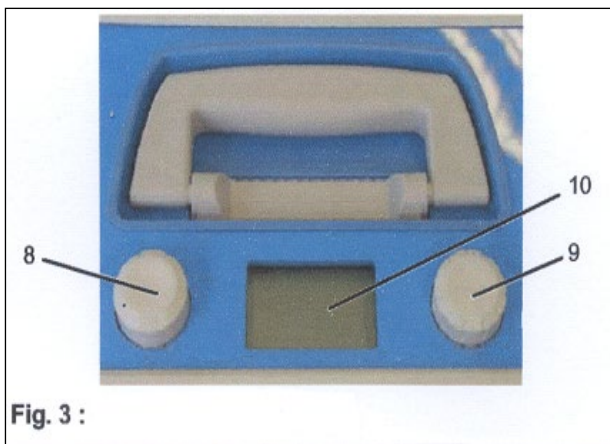


8. Ein/Aus-Schalter
9. Volumenstrom-Einstellregler
10. LC-Display

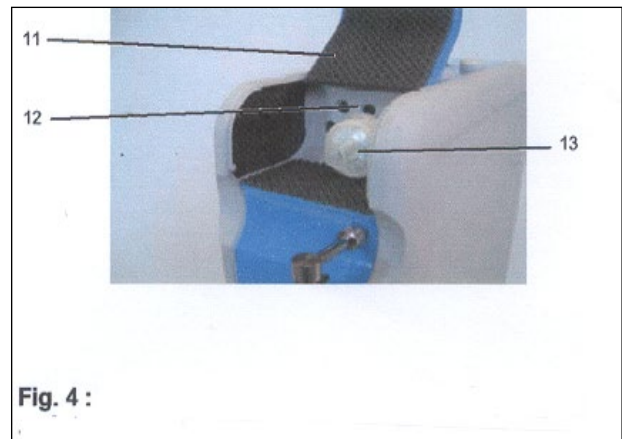

11. Service-Klappe
12. Sicherungen
13. EingangsfILTER (Ansaugen)

Der Oxycure-Reserve-Konzentrator unterscheidet sich durch :

<b>RESERVE</b> Beperkt gebruik Usage limité Beschränkter Gebrauch	 O <sub>2</sub> saldo (uren) O <sub>2</sub> solde (heures) O <sub>2</sub> saldo (Stunden)	<b>RESERVE</b> Beperkt gebruik Usage limité Beschränkter Gebrauch
Bij het opstarten Oxycure verwittigen (09.00u - 18.00u behalve noodgevallen) - Prévenir Oxycure à la mise en service (9.00h - 18.00h sauf urgence) Bei der Inbetriebnahme Oxycure benachrichtigen (9.00U - 18.00U außer Notfall)		



- Ein Aufkleber unter der Haube und dem O2-Ausgang des Geräts, der darauf hinweist, dass das Gerät ohne Luftbefeuchter verwendet werden muss



## 6. ERFORDERLICHES ZUBEHÖR

Die unten aufgeführten Zubehörteile müssen oder können mit dem Oxycure-Konzentrator verwendet werden.

Filter und Zubehör für den Oxycure-Konzentrator		Endverkaufspreis
0305	Kröber-EingangsfILTER	7,87
0303	Grobstaub-KühlfILTER (6 Stück)	7,26
Nasenbrillen (Kanülen und Masken)		
0253	Nasenbrille (Kanüle) für Erwachsene SP (+2 m Schlauch)	2,54
0261	Sauerstoffmaske für Erwachsene (+1,8 m Schlauch)	2,54
0279	Sicherheitsschlauch - 3,0 m	1,70
0254	Sicherheitsschlauch - 10,0 m	1,70
0163	Schlauchanschluss, gerade 5/5 mm	5,00

Das zur Durchführung Ihrer Therapie erforderliche Zubehör (Brillen oder Sauerstoffmasken, Befeuchter, Grobstaubfilter) werden bei der Aufstellung dieses Reservegerätes geliefert, mit Ausnahme des Befeuchters.

Für eine perfekte Anwendung der Therapie und ein optimales Funktionieren des Gerätes empfiehlt Oxycure, die Zubehörteile bei jedem Patientenwechsel auszutauschen.

Siehe auch Punkt 13.

## 7. STANDORT DES GERÄTS

**Das gute Funktionieren (Funktionstüchtigkeit) des Gerätes ist nur möglich, wenn das Gerät an einer Stelle aufgestellt wird, die allen unten aufgeführten Punkten entspricht.**

Das Gerät muss aufgestellt werden:

- Auf einem festen und ebenen Untergrund, an einer trockenen und gut belüfteten Stelle.  
→ kleine Abstellräume und Badezimmer vermeiden!
- Vor warmen oder kalten Luftströmungen und direkter Sonneneinstrahlung geschützt.  
→ die Aufstellung des Gerätes vor einem Fenster oder einer Glastür vermeiden.
- Das Gerät NIEMALS abdecken.
- Mit einem Mindestabstand von 30 cm von Mauern, Wänden, Vorhängen und anderen größeren Gegenständen (z.B. Möbeln) aufstellen, um ein normales Ansaugen der Umgebungsluft durch das Gerät zu gewährleisten.
- Mit entsprechendem Abstand von Heizquellen (2 Meter).



## 8. INBETRIEBNAHME

Der Oxycure–Konzentrator von Kröber benötigt ca. 10 Minuten, um die Gesamtheit seiner Parameter zu stabilisieren. In dieser Zeit kann ein Alarm auf dem Bildschirm erscheinen.

Bleibt dieser Alarm nach 10 Minuten bestehen, rufen Sie bitte Oxycure (Support Service) an.

### Nur ohne Befeuchter verwenden:

1. Das mitgelieferte Netzkabel an der Rückseite des Gerätes (Beschreibung S.6, Abbildung 2, 6) ans Netz anschließen (230 Volt, 50 Hz).
2. Den Winkelanschluss an den Sauerstoffauslass des Gerätes schrauben (Foto 2 unten).
3. Konischen Anschluss an den Winkelanschluss schrauben (Foto 5 unten).
4. Den Sauerstoffschlauch mit dem konischen Anschluss verbinden.
5. Nasenbrille mit der mitgelieferten Anschlussstülle an den Sauerstoffschlauch anschließen.
6. Das Gerät in Betrieb setzen (Abbildung 3, 8 Seite 6)
7. Den Durchfluss einstellen.



## 9. EINSTELLUNG DES SAUERSTOFF-VOLUMENSTROMS


1. Einige Sekunden lang auf den Durchflusseinstellknopf (Abbildung 3, 9 Seite 6) drücken, bis die Volumenstromangabe (die Ziffern) blinkt;
2. Wenn die Volumenstromangabe auf dem LC-Display blinkt (Abbildung 3, 10 Seite 6), den Druck auf dem Knopf zurücknehmen;
3. Den Durchflusseinstellknopf zur Verminderung des Volumenstrom nach links, zur Erhöhung nach rechts drehen;
4. Ist der gewünschte Wert erreicht, kurz einmal auf den Durchflusseinstellknopf drücken, um Ihre Auswahl zu bestätigen; der gewünschte Wert wird auf dem Display angezeigt werden. Das Gerät passt den Durchfluss an den gewünschten Wert an.




## 10.A. ANZEIGE AUF DEM DISPLAY (nur Reserve-Konzentrator).

Nach seinem Testverfahren wird auf dem Bildschirm nacheinander Folgendes angezeigt:

1. Der eingestellte Durchfluss (zum Beispiel: „2,0 lpm“ für 2 Liter pro Minute).
2. Die Gesamtzahl der Betriebsstunden des Gerätes.
3. Der Saldo der Zahl der Betriebsstunden und der eingestellte Durchfluss, wie folgt:

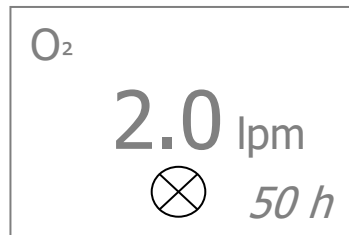

4. Wenn die Funktionsreserve des Gerätes erschöpft ist, liefert der Reserve-Konzentrator keinen Sauerstoff mehr. Der Kontroll-Bildschirm zeigt dann Folgendes an:

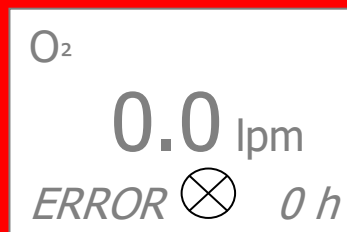

### **Wichtige Anmerkung:**

**Der Bildschirm zeigt nicht die Minuten an. Wenn der Bildschirm 0 Stunden (0 h) anzeigt, beträgt die effektive Betriebsreserve des Gerätes 1 bis 59 Minuten.**

## 10.B. ANDERE ANZEIGEN AUF DEM BILDSCHIRM.

Bei einem vom Kontrollmodul entdeckten Alarm erscheint die Art des entdeckten Problems auf dem Bildschirm mit der Angabe "ERROR" blinkend auf dem LC-Display.

Lesen Sie dazu die Abschnitte 8. "Inbetriebnahme",



11.A. "Tipps und Tricks zur Verwendung",






11.B. "Im Alarmfall zu ergreifenden Maßnahmen".

## 11.A. TIPPS UND TRICKS ZUR VERWENDUNG

<p><b>Das Gerät löst bei seiner Inbetriebnahme Alarm aus</b></p>	<p>Das ist normal. Das Gerät benötigt 10 Minuten, um die Gesamtheit seiner Parameter zu stabilisieren.</p> <p>Wenn dieser Alarm nach 10 Minuten bleibt, rufen Sie bitte Oxycure (Support Service) an.</p>
<p><b>Das Gerät funktioniert normal ohne Alarm, aber Sie erhalten keinen Sauerstoff.</b></p>	<p>Das ist auf ein Problem der Dichtigkeit der Gruppe „Sauerstoffschlauch – Nasenbrille“ zurückzuführen.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrollieren, ob der Winkelanschluss (Abbildung 2, S. 8) korrekt auf das Gerät geschraubt wurde;</li> <li>2. Sauerstoffschläuche auf Undichtigkeit prüfen.</li> </ol>

## 11.B. IM ALARMFALL ZU ERGREIFENDEN MASSNAHMEN

ANZEIGE AUF DEM DISPLAY ALARMTYP	GEGENMASSNAHMEN
 <p>→ Sauerstoffmangel-Alarm</p> <p style="text-align: right;">(Code_LPM)</p>	<p>Der erzeugte Sauerstoff gelangt nicht zum Benutzer, nachdem ein Zubehörteil falsch positioniert wurde oder fehlerhaft ist.</p> <p><u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Gerät in Betrieb lassen, um das unten aufgeführte Kontrollverfahren durchzuführen;</li> <li>2. Alle Zubehörteile abbauen. Die Nasenbrille (Kanüle), den Sauerstoffschlauch des Gerätes abnehmen. Wenn der Alarm weitergeht, Oxycure anrufen (die Nummer befindet sich auf dem Gerät).</li> <li>3. Die Zubehörteile eines nach dem anderen in der folgenden Reihenfolge wieder anbringen:             <ul style="list-style-type: none"> <li>. Schlauch (Verlängerung)</li> <li>. Nasenbrille</li> </ul> <p>Das wird es Ihnen erlauben, festzustellen, welches Zubehörteil Probleme macht.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Den Befeuchter erforderlichenfalls ersetzen.</li> <li>. Überprüfen, dass die Kanüle (Nasenbrille) oder der Sauerstoffschlauch nicht verstopft, geknickt, in einer Tür oder unter einem Stuhlbein festgeklemmt ist. Die Zubehörteile befreien oder erforderlichenfalls ersetzen. Bleibt der Alarm bestehen, kehren Sie zum Punkt 3 zurück.</li> </ul> </li> <li>4. Oxycure anrufen.</li> </ol>
 <p>→ Temperatur-Alarm</p> <p style="text-align: right;">(Code_T°)</p>	<p>Die Temperatur im Innenraum des Gerätes ist zu hoch.</p> <p><u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Gerät ist sofort auszuschalten, um seine Beschädigung zu vermeiden.</li> <li>2. Es ist zu kontrollieren, ob der Standort richtig ist und ein ungehinderter Lufteintritt in das Gerät möglich ist.</li> <li>3. Grobstaubfilter überprüfen, nötigenfalls ersetzen.</li> <li>4. EingangsfILTER überprüfen, nötigenfalls ersetzen</li> <li>5. Das Gerät wieder in Betrieb nehmen.</li> <li>6. Bleibt der Alarm bestehen, Gerät ausschalten, um seine Beschädigung zu vermeiden.</li> <li>7. Vorübergehend die von Oxycure gelieferte Reserveflasche verwenden.</li> <li>8. Oxycure anrufen.</li> </ol>

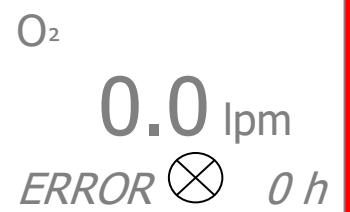 <p>→ Netzausfall-Alarm (Code_AC)</p>	<p>Die Stromversorgung des Gerätes ist unterbrochen. <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prüfen, ob das Netzkabel sicher in der Steckdose steckt.</li> <li>2. Die Sicherungen Ihrer Wohnung kontrollieren.</li> <li>3. Ein anderes elektrisches Gerät in derselben Steckdose ausprobieren.</li> <li>4. Bleibt der Alarm bestehen, vorübergehend die Reserveflasche verwenden.</li> <li>5. Oxycure anrufen.</li> </ol>
 <p>→ Sauerstoff-Alarm (O<sup>2</sup>) (Code_O2)</p>	<p>Der Multifunktionssensor hat eine Sauerstoffkonzentration unter 82% entdeckt. <b>Ihr Gerät liefert immer noch Sauerstoff, aber dessen Konzentration hat abgenommen.</b> <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sauerstoffschläuche auf Undichtigkeit prüfen.</li> <li>2. Oxycure anrufen.</li> </ol>
 <p>→ Sensor-Alarm (Code_SE)</p>	<p>Der Multifunktionssensor kann die produzierte Sauerstoffmenge und Sauerstoffkonzentration nicht bestimmen. <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vorübergehend die Reserveflasche verwenden.</li> <li>2. Oxycure anrufen.</li> </ol>
 <p>→ System-Alarm (Code_ERR)</p>	<p>Allgemeine Fehlfunktion des Gerätes. Die Sauerstoffzufuhr ist unterbrochen. <u>Gegenmaßnahmen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Gerät sofort ausschalten.</li> <li>2. Oxycure anrufen.</li> </ol>
 <p>→ Ende der Betriebsreserve.</p>	<p><b>Ende der Betriebsreserve von 50 Stunden.</b> <b><u>Zu ergreifende Maßnahmen:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Das Gerät (Kompressor) durch Drücken des An-/Aus-Schalters abschalten.</li> <li>2. Rufen Sie dringend den Bereitschaftsdienst an.</li> </ol>

## 12. ANDERE OXYCURE PRODUKTE UND DIENSTLEISTUNGEN

### ▪ Das Pulsoximeter

Das Pulsoximeter ist ein Messgerät für die Sauerstoffsättigung des Blutes. Das Pulsoximeter ermöglicht die Bestimmung der Notwendigkeit einer Sauerstofftherapie und die Kontrolle Ihrer Effizienz.



MD300 C63

#### Modelle.

- MD300 C15, zur persönlichen Verwendung
- MD300 C63, zur beruflichen Nutzung
- MD300 C53, zur pädiatrischen Verwendung

- ➔ Bitte wenden Sie sich zu diesem Thema an Ihren Arzt oder Apotheker oder verlangen Sie unsere Informationsbroschüre.
- Konsultieren Sie unsere Website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be).

### ▪ Die kleine Oxycure-Flasche als Reserveflasche oder zur ambulanten Verwendung



Die Oxycure-Flasche als Reserveflasche oder zur ambulanten Verwendung (Herumlaufen usw.), die mit einem Ventil mit eingebautem Druckminderer ausgestattet ist, ist DIE Lösung bei Stromausfall. Ein m<sup>3</sup> gewährt eine Autonomie von 8 Stunden und 20 Minuten zu 2 LPM.

#### Modelle.

B5	1,0 m <sup>3</sup>
B2	0,4 m <sup>3</sup>

- ➔ Wenden Sie sich zu diesem Thema an Ihren Arzt oder Apotheker oder verlangen Sie unsere Informationsbroschüre.
- ➔ Konsultieren Sie unsere Website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be).

### Oxycure portable Konzentratoren

Die Oxycure portable Konzentratoren sind autonome medizinische Geräte. Kompakt und leicht, bieten die Oxycure portable Konzentratoren eine fast unbegrenzte „effektive“ Autonomie. Sie funktionieren sowohl mit wiederaufladbaren Batterien (Akkus) als am Netz (110-240 Volt Wechselstrom) oder in einem Fahrzeug (12 Volt Gleichstrom), und zwar ohne Unterbrechung bei Wechsel der Energiequelle.

Die Oxycure portable Konzentratoren sind mit einem Economizer-Ventil ausgestattet.

Die Oxycure portable Konzentratoren sind in der Regel nicht für eine Verwendung beim Schlafen geeignet.





➔ Weitere Informationen unter [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)  
oder bei unserem Kundendienst

## 13. PERIODISCHE WARTUNG DURCH DEN BENUTZER

Ihr Reservegerät wird spätestens nach 50 Betriebsstunden ersetzt. Es ist keine periodische Wartung erforderlich.

Zur Information: Die Wartung eines Oxycure-Konzentrators für den Dauerbetrieb ist die folgende:

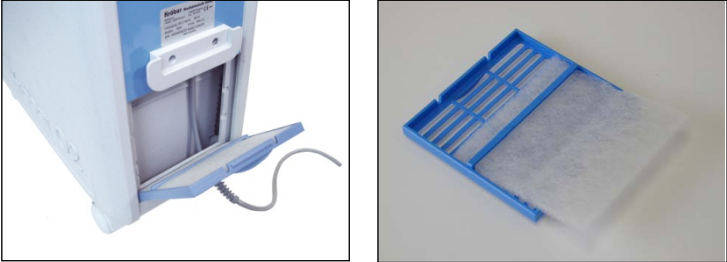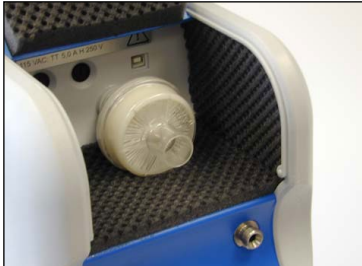Intervall	Reinigungsarbeiten
Täglich <b>-(obligatorisch)</b>	Der Befeuchter ist täglich mit einem Desinfektionsmittel (im Handel erhältlich) oder einer Lösung von 10% Essig auf 90% Wasser zu reinigen. Das Wasser des Befeuchters ersetzen.
Täglich (sehr zu empfehlen)	Die Nasenbrille (Öffnung nach unten) mit warmem Seifenwasser oder einer Lösung von 10% Essig in 90% Wasser reinigen. Gut spülen und vor der Wiederverwendung trocknen lassen.
<b>Am 1. Tag des Monats Jeden Monat (obligatorisch)</b>	<p><b>Den Grobstaubfilter (Kühlung) ersetzen.</b></p> 
<b>Am 1. Tag des Monats Jeden Monat (obligatorisch)</b>	<p>Ersetzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Die Nasenbrille (Kanüle) oder die Maske;</li> <li>▪ Den Befeuchter.</li> </ul>
<b>Am 1. Tag des Monats Jeden Monat (obligatorisch)</b>	Das Gerät mit einem nebelfeuchten Lappen reinigen (mildes Haushaltspflegeprodukt).
<p><b>Alle 6 Monate Maximal alle 5.000 Stunden (obligatorisch)</b></p> <p><b>Auf ausdrücklichen Wunsch von Oxycure (obligatorisch)</b></p>	<p><b>Geräteeingangsfiler (Ansaugung) ersetzen.</b> (von Oxycure automatisch alle 6 Monate geliefert).</p> <p>Den Filter entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und abziehen. Den neuen Filter wieder auf den Stützen setzen.</p> 

## 14. BETREUUNG IHRES GERÄTES

Name des MRS: \_\_\_\_\_

Sektion: \_\_\_\_\_

Datum der Aufstellung	Ihr Oxycure-Assistent

Datum	Resident (Bewohner)	Betriebsstunden	Saldo

### NOTIZEN.