



## Oxycure concentrator Prepaid 3 Kröber O2

---

### Gebruiksaanwijzing

#### **BEPERKT GEBRUIK : 3 maanden - 999 uren**

##### **Het toestel aanschakelen : samengevatte instructies.**

1. Aan/Uit knop indrukken I/O
2. Aantal liters instellen met tweede knop !
  - 1- Knop ingedrukt houden tot de gegevens op het scherm knipperen;
  - 2- Knop loslaten;
  - 3- Knop draaien tot het gewenste aantal liters bereikt is;
  - 4- Knop opnieuw indrukken ter bevestiging van het debiet;
3. Voor meer details, zie gebruiksaanwijzing op keerzijde.

##### **Periodiek onderhoud**

1. Elke dag :
  - 1- Voor behandelingen met luchtbevochtiger: de luchtbevochtiger reinigen en ontsmetten en het water vervangen (leidingwater)
2. Eerste dag van de maand:
  - 1- Stoffilter vervangen (afkoeling);
  - 2- Toestel schoonmaken met een licht bevochtigde doek;
  - 3- Neusbril (neuscanule) vervangen;
  - 4- Bevochtiger volledig vervangen.
3. Om de 6 maanden:
  - 1- IngangsfILTER vervangen + de handelingen onder punt 2.

**Wij danken u dat u voor een Oxycure concentrator gekozen heeft.**



## **Zuurstoftherapie**

### Draagbare Oxycure Concentratoren

- Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G3
- Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G4
- Draagbare Oxycure Concentrator – Inogen G5
- Draagbare Oxycure Concentrator – SimplyGo Mini
- Draagbare Oxycure Concentrator – SimplyGo
- Draagbare Oxycure Concentrator – Eclipse 5
- Draagbare Oxycure Concentrator – Zen-O-Lite
- Draagbare Oxycure Concentrator – Zen-O (niet op foto)

### Oxycure Concentrator

Oxycure Concentrator – Kröber

### Oxycure flessen (zuurstofgas)

- Oxycure fles B2 – 0,4 m<sup>3</sup>
- Oxycure fles B5 – 1,0 m<sup>3</sup>
- Oxycure fles B10 – 2,1 m<sup>3</sup> (niet op foto)

### Oxycure Eenheid (vloeibare zuurstof)

- Oxycure eenheid met vloeibare zuurstof - 26 m<sup>3</sup>
- Draagbare Oxycure eenheid met vloeibare zuurstof (1,0 m<sup>3</sup>)

## **Slaapapneu**

S.Box - Sefam

**Meer informatie op [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)**



## **OXYCURE : BESTELLINGEN**

**081 22 15 90**

---

Oxycure nv.

Business Park Fernelmont

L. Genicot, 9

B-5380 Fernelmont

Belgium

Tel. + 32 081 22 15 90

Fax + 32 081 22 15 99

<http://www.oxycure.be>

e-mail: [oxycure@oxycure.be](mailto:oxycure@oxycure.be)

## **OPENINGSUREN**

---

Maandag tot en met vrijdag

09.00 – 12.30 en 13.30 – 18.00

## **WACHTDIENST**

**0800 98 0 68**

---

U kunt ons 7 dagen op 7, 24 uren op 24 contacteren.

Deze dienst is uitsluitend voorbehouden voor de dringende installatie van toestellen en voor de herstelling van onze toestellen.

### **Wanneer u de wachtdienst oproept:**

1. Spreek uw naam, telefoonnummer en een korte boodschap (reden van uw oproep) in;
2. De wachtdienst belt u binnen de 20 minuten terug;
3. Indien u geen bericht van de wachtdienst zou hebben gekregen na 20 minuten, gelieve een nieuwe boodschap achter te laten.

### **Opmerkingen**

1. De technische tussenkomsten (herstellingen) zijn inbegrepen in de prijs van de bijstand en van de huur.
2. Leveringen van goederen buiten de kantooruren zijn betalend.

## TERUGBETALING VAN DE OXYCURE CONCENTRATOR

De Oxycure concentrator is beschikbaar:

### 1. Bij uw apotheker, op voorschrift van een huisarts of een specialist.

Op grond van het Koninklijk Besluit van 24 oktober 2002, gewijzigd op 01 juli 2012, is de Oxycure concentrator terug betaalbaar op voorschrift van een huisarts of geneesheer-specialist voor:

- **de behandeling van een acute hypoxemie.**  
Maximale duur van 3 (opeenvolgende) maanden.  
Met de machtiging van de adviserende geneesheer.
- **palliatieve zorgen.**  
Onbepaalde duur  
Palliatief statuut herkent met hypoxmie.

### → UW ADMINISTRatieve VERPLICHTINGEN :

Om de vergoeding van het RIZIV te krijgen moet u met uw ziekenfonds of verzekering in orde zijn en :

- De machtiging van de adviserende geneesheer aan uw apotheker geven.
- In het begin van elke maand een voorschrift aan uw apotheker bezorgen.
- Het voorschrift met volgende gegevens afleveren:

Oxycure	<u>Voorbeeld</u>	Oxycure concentrator
De maand		11 Juli 2011
Debiet en dagelijkse duur		2 LPM / 12 uren
Bevochtiger		Bevochtiger

Derdebetalersregeling toepasbaar (voor palliatieve zorgen)

### → DE OXYCURE BEHANDELING BEVAT :

Benaming	Publieke prijs/maand	Bedrag ten laste van de patiënt
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving. Het afhalen van het materiaal op het einde van de behandeling.	31,80	0,00
De Oxycure concentrator De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling. De Oxycure 24u/24 – 7d/7 wachtdienst in geval van technische storingen.	90,10	0,00
De bevochtiger	5,51	0,00
Een draagbare reservefles (max. 1 m <sup>3</sup> )	0,00	0,00
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door uw apotheker		0,00

→ DE VERVANGING VAN DE ZUURSTOFFLES(SEN) gebeurt op medisch voorschrift, zonder vergoeding, zoals voorzien door het K.B. van 21/01/2001 (wijzigingen op 01/07/2012).

Benaming	Publieke prijs/maand	Bedrag ten laste van de patiënt
Medische zuurstof (/m <sup>3</sup> )	5,55	5,55
Huur van de flessen (maandelijks forfait)	22,17	22,17
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling door uw apotheker	-	-

## 2. Op een dienst pneumologie op voorschrift van een longarts of kinderarts.

In het kader van de "Overeenkomst betreffende langdurige zuurstoftherapie thuis voor ernstige chronische ademhalingsinsufficiëntie" is de Oxycure concentrator volledig vergoed voor een vernieuwbare periode van een jaar.

### → UW ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN:

- Bewijskrachtig onderzoek in een dienst pneumologie met de machtiging van de adviserende geneesheer van uw ziekenfonds.
- Stoppen met roken.

### → DE OXYCURE BEHANDELING BEVAT:

Benaming	Bedrag ten laste van de patiënt
Installatie en opleiding van de gebruiker en zijn omgeving. Het afhalen van het materiaal op het einde van de behandeling.	0,00
De Oxycure concentrator De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling. De Oxycure 24u/24 – 7d/7 wachtdienst in geval van technische storingen.	0,00
De bevochtiger	0,00
Een draagbare reservefles	0,00
Honoraria voor de coördinatie van de behandeling	0,00
Electriciteitskosten (1,00€/dag behandeling, vergoedbaar door uw mutualiteit)	0,00

## 3. Bij uw apotheker voor een "Oxycure Prepaid 3" behandeling op voorschrift van een huisarts of een specialist.

Indien u geen recht (meer) heeft op de vergoeding van uw behandeling maar toch nog zuurstof nodig heeft volgens advies van de behandelende geneesheer, stellen we u onze formule '**Concentrator Oxycure Prepaid 3**' voor, zonder terugbetaling.

Het gebruik van de "**Oxycure Prepaid 3**" is elektronisch beperkt tot drie maanden en 999 uren. Om de drie maanden of wanneer het tijdskrediet opgebruikt is, laden wij de teller van de « **Concentrator Oxycure Prepaid 3** » weer op, tenzij anders geadviseerd door uw arts of apotheker. Deze formule staat garant voor de kwaliteit van de behandeling die identiek is aan degene met een Oxycure concentrator.

Omschrijving	Bedrag ten laste van de patiënt
Oxycure Concentrator Prepaid 3	193,31
Bevochtiging	11,02
Installatie	31,80

## 1. WAARSCHUWINGEN

---

De concentrator "Oxycure Prepaid 3" mag enkel op doktersvoorschrift gebruikt worden.

De zuurstof geproduceerd door dit toestel, is een geneesmiddel. Mochten er zich tijdens de therapie neveneffecten voordoen of mocht het welzijn sterk beperkt worden, raadpleeg onmiddellijk een arts.

**Het gebruik van deze Oxycure Prepaid 3 concentrator is elektronisch beperkt tot 3 maanden en 999 uren.**

**Gelieve Oxycure te contacteren van zodra de urenteller op 50 uren staat. (9h00-18h00)**

**Oxycure wijst elke verantwoordelijkheid af indien deze procedure niet wordt gevolgd.**

Na uw oproep organiseert Oxycure op het moment dat u het best past : de vervanging van uw Oxycure Prepaid door een identieke Oxycure Prepaid.

Opgelet

Dit document is gebaseerd op de gebruiksaanwijzing van de fabrikant. Deze gebruiksaanwijzing is beschikbaar in het Frans, het Engels en het Duits. Hij is beschikbaar op onze website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be) of kan aangevraagd worden bij onze klantendienst.

## 2. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

---

De OXYCURE concentrator draagt het CE-keurmerk en voldoet aan alle normen die opgelegd zijn door de Europese Unie.

Dit toestel produceert zuurstof. Zuurstof versnelt de verbranding en veroorzaakt onmiddellijk brandwonden indien deze in contact wordt gebracht met oliën of vetten, zelfs met verzorgingscrèmes. Gelieve tijdens het gebruik van dit toestel, voor uw eigen veiligheid en deze van uw omgeving, volgende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven:

- 1. Niet roken.**
- 2. Het toestel gebruiken buiten bereik van elke warmtebron, blote vlam of vonk. Een afstand van minimum 2 meter is aangeraden.**
- 3. Het toestel, de toebehoren en uw gezicht moeten vetvrij zijn (geen zalven, crèmes, olie, enz.).**
- 4. Het toestel nooit opendoen, demonteren (risico op elektrocutie) of de etiketten nooit verwijderen.**
- 5. Het toestel nooit afdekken.**
- 6. Het toestel droog houden.**

### 3. INCIDENTEN

Wat moet ik doen als mijn neusbril of zuurstofslang vuur vat?

Dit kan gebeuren telkens wanneer zuurstof gebruikt wordt (gasvormige zuurstof in flessen, vloeibare zuurstof), als de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd worden.

1. Verwijder de zuurstofslang van het toestel.
2. Schakel het toestel uit.
3. Doof de vlammen, met een deken bijvoorbeeld.
4. Verlucht de kamer tot alle rook en geuren verdwenen zijn.

### 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Oxycure – Kröber Prepaid concentrator

Fabrikant	Kröber Medizintechnik GmbH. D-56332 Dieblich - Tel. +49 2607 9404	
Model	Kröber O <sup>2</sup> /Prepaid 3	Kröber O <sup>2</sup> v4.0/ Prepaid 3
<b>BEPERKT GEBRUIK</b>	<b>999 Uren – 3 maanden (Eerste termijn bereikt)</b>	<b>999 Uren – 3 maanden (Eerste termijn bereikt)</b>
MPG classificatie	IIa	IIa
Beveiligingsklasse	II	II
Spanning	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Zekeringen : net : kaart	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V	2 x TT2,5A H 250 V 1 x T1,0A L 250 V
Werkings temperatuur	10° tot 40 ° C	10° tot 40 ° C
Werkingsdruk (atmosferisch)	700 tot 1060 mbar	700 tot 1060 mbar
Afmetingen (H x P x L, in cm)	53,5 x 20,3 x 52 cm (zonder wielen)	53,5 x 20,3 x 52 cm (zonder wielen)
Gewicht	19,8 kg	16,0 Kg
Volumetrisch debiet	1 tot 6 lpm (liters/min)	1 tot 5lpm (liters/min)
Nominale concentratie (Versie N51)	0,1 - 4 l/min 95% ±3% >4 - 5 l/min 85% ±3% 5 - 6 l/min 75% ±3%	0,1 - 4 l/min 95% ±3% >4 - 5 l/min 85% ±3% <sup>1</sup> -
Alarmen (akoestisch et visueel)	Hoge temperatuur Stroomonderbreking Debiet Zuurstofconcentratie Systeem	Hoge temperatuur Stroomonderbreking Debiet Zuurstofconcentratie Systeem
Statusdisplay	Zuurstofdebiet	Zuurstofdebiet
Geluidsterkte	35 dB(A)	31,1 dB(A)
Verbruik	307 – max. 350 W	Max. 280 W
Keuringen	CE 0197	CE0197

<sup>1</sup> O2-alarm mogelijk vanaf 4,5 LPM  
v. 04/02/2022

## 5. BESCHRIJVING VAN HET TOESTEL

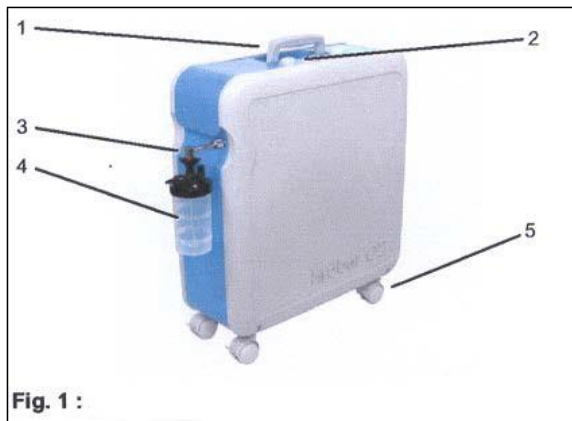


Fig. 1 :

1. Handgreep
2. Bedieningspaneel (scherm en knoppen)
3. Zuurstofuitgang en hoekstuk
4. Bevochtiger
5. Wielen



6. Stroomkabel
7. Afneembaar rooster en stoffilter (afkoeling)

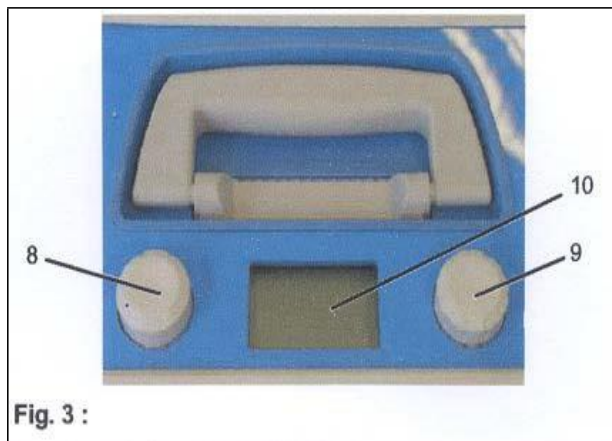


Fig. 3 :

8. Schakelaar aan / uit
9. Debietknop
10. Scherm

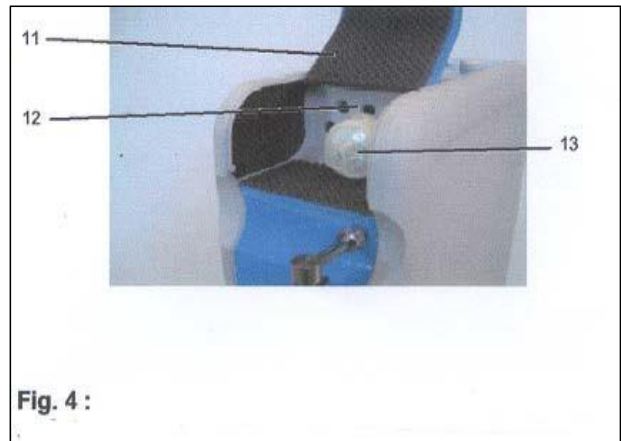



Fig. 4 :

11. Deksel voor onderhoudsvak
12. Zekeringen
13. IngangsfILTER (inlaat)

De Oxycore Prepaid 3 is voorzien van twee blauwe stickers op de zijkanten.



Of :

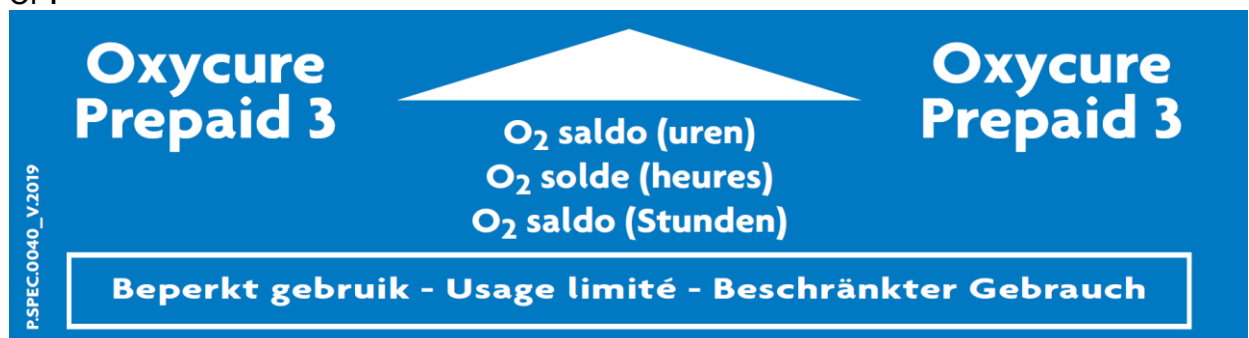



## 6. NODIGE TOEBEHOREN

De onderstaande toebehoren moeten of kunnen met de concentrator Oxycure Prepaid 3 gebruikt worden. Uw assistent zal u helpen om ze te kiezen naargelang uw behoeften en wensen.

<b>Filters en toebehoren voor de Oxycure concentrator</b>		<b>Publieke prijs</b>
0305	Ingangfilter Kröber	7,87
0303	Stoffilter (afkoeling, 6 stks.)	7,26
0132	CPAP aansluiting 22F/22M/6mm	10,89
<b>Canules et maskers</b>		
0253	Neuscanule volwassenen SP (+2 m tube)	2,54
0259	Neuscanule volwassenen CP (+2 m tube)	2,54
0257	Neuscanule K pediatriesch (+2 m darm)	2,54
0258	Neuscanule KK neonatal (+2 m darm)	2,54
0261	Zuurstofmasker volwassenen	2,54
0262	Zuurstofmasker pediatriesch	2,54
0288	Zuurstofmasker tracheotomie volwassenen	2,54
0289	Zuurstofmasker tracheotomie pediatriesch	2,54
0263	Zuurstofmasker HC100% High Concentration	2,54
<b>Verlengslangen en toebehoren</b>		
0279	Zuurstofveiligheidsslang - 3,0 m	6,00
4004-891	Zuurstofveiligheidsslang - 10,0 m	6,00
4004-917	Water trap	5,00
0163	Verbindingsstuk tube recht 5/5 mm	5,00
0390	Verbindingsstuk tube recht 5/5 mm 360° draaiend	5,00
0172	Verbindingsstuk darm T 6 mm	5,00
<b>Bevochtigers en toebehoren</b>		
0310	Aansluiting RVS 90° voor bevochtiging	35,70
0302	Homecare bevochtiger 100 ml	5,51
0212	Homecare Bevochtiger 350 ml	5,51

De nodige toebehoren voor de toepassing van de behandeling (brillen of zuurstofmaskers) worden meegeleverd bij de installatie van dit toestel.

Oxycure levert de toebehoren bij de installatie voor een behandeling van 3 maanden. Na deze periode stuurt Oxycure u automatisch en gratis de nodige toebehoren voor de behandeling voor de 6 volgende maanden. Aan het einde van de behandeling moeten de ongebruikte toebehoren worden teruggegeven aan Oxycure. Indien niet worden ze gefactureerd aan hierboven vermelde prijzen.

Voor een optimale toepassing van de therapie en een perfecte werking van het toestel adviseren wij de toebehoren maandelijks te vervangen. Zie eveneens punt 14.

## 7. PLAATS VAN HET TOESTEL

**De optimale werking van de Oxycure concentrator is enkel mogelijk wanneer het toestel geïnstalleerd wordt op een plaats die aan de volgende punten voldoet:**

Het toestel dient te worden geplaatst:

- Op een stevige en vlakke vloer, in een droge en goed verluchte omgeving.  
→ Vermijd kleine ruimten of een badkamer.
- Beschut van warme of koude luchtstromen, beschut van directe zonnestralen.  
→ Vermijd het toestel achter een raam of glazen deur te plaatsen.
- Het toestel NOOIT afdekken.
- Op minimaal 30 cm afstand van de muur, gordijnen of andere grote voorwerpen (bv. meubels), om een normale luchtinlaat te waarborgen.
- Op een redelijke afstand van een warmtebron (2 meter).

## 8. HET TOESTEL OPSTARTEN

**De Oxycure – Kröber concentrator heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren. Het scherm kan gedurende deze periode een alarm tonen.**

**Indien het alarm na 10 minuten aanhoudt, contacteer Oxycure.**


### **Indien u gebruik maakt van een bevochtiger**

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan en sluit aan (Beschrijving p. 8, Fig.2, 6) op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het hoekstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (zie foto 2).
3. Schroef de beker van de bevochtiger los en vul hem met water (stadswater), tussen het minimum en het maximum.
4. Schroef de beker weer op de houder. Zorg dat hij niet lekt. Als er hier een lek is, zal de gebruiker geen zuurstof krijgen.
5. Bevestig de bevochtiger aan het hoekstuk.
6. Koppel de neusbril (canule) of de zuurstofslang (verlengslang) aan de uitlaat van de bevochtiger.
7. Druk op de knop Aan / Uit (Fig. 3, 8 pagina 8).
8. Regel het debiet. Zie § 9 pagina 11.



**Indien u geen gebruik maakt van een bevochtiger**

1. Sluit de voedingskabel aan de achterkant van het toestel aan (Beschrijving p. 8, Fig.2,6) en sluit aan op het elektriciteitsnet. (230 V, 50Hz).
2. Schroef het hoekstuk op de zuurstofuitgang van het toestel (foto 2 hieronder).
3. Schroef het conisch tussenstuk op het hoekstuk (foto 5 hieronder)
4. Sluit de zuurstofslang aan op het conisch tussenstuk.
5. Sluit de neusbril aan op de zuurstofslang met het bijgeleverd aansluitstuk.
6. Schakel het toestel aan (Fig. 3, 8).
7. Regel het debiet.

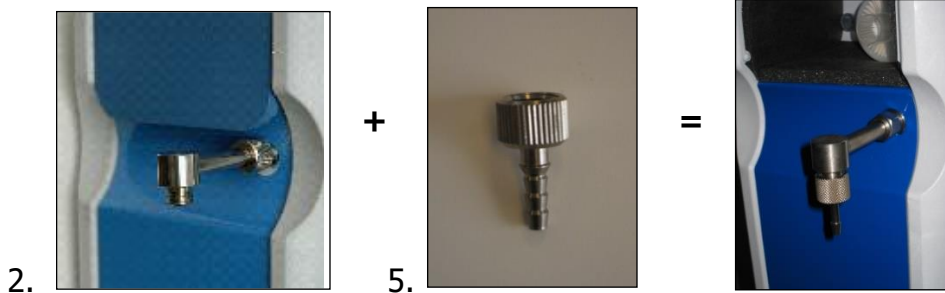**9. HET DEBIET INSTELLEN.**

1. Duw enkele seconden op de debietknop (Fig. 3, 9 pagina 8) tot de aanduiding van het debiet (de cijfers) knippert.
2. Wanneer de cijfers op het scherm beginnen te knipperen (Fig. 3, 10 pagina 8), de knop loslaten.
3. Draai de knop naar links om het debiet te verminderen, naar rechts om het debiet te verhogen.
4. Wanneer de gewenste instelling verschijnt, druk de debietknop kort in om uw keuze te bevestigen. De gevraagde waarde verschijnt op het scherm. Het toestel zal het debiet aan de gewenste waarde aanpassen.

**10.A. MELDINGEN OP HET SCHERM (uitsluitend voor de concentrator Prepaid 3).**

Na de automatische testprocedure (diverse weergaves - test gedurende 20 tot 30 seconden) verschijnt (achtereenvolgens):

1. Het ingestelde debiet (bijvoorbeeld: « 2,0 lpm » voor 2 liter per minuut).
2. Het totale aantal werkingsuren van het apparaat.
3. Op sommige modellen, het saldo van het aantal gebruiksuren en het ingestelde debiet, als volgt :

O<sub>2</sub>  
2.0 lpm  
999 h

4. Wanneer de 999 reserve-werkingsuren opgebruikt zijn, zal de Prepaid concentrator geen zuurstof meer leveren. Op het controlescherm verschijnt:

O<sub>2</sub>  
0.0 lpm  
ERROR ⊗ 0 h

**Belangrijke nota:**

**Het scherm toont geen minuten.  
Wanneer het scherm 0 uur toont (0 h),  
ligt de effectieve verwerkingsreserve van  
het toestel tussen 1 en 59 minuten.**

## 10.B. ANDERE MELDINGEN OP HET SCHERM.

Wanneer de controlemodule een alarm detecteert, verschijnt het type gedetecteerde probleem op het scherm, met de knipperende melding "ERROR".



Zie in dat verband de volgende paragrafen:






- 8. "Toestel opstarten",
- 11.A "Handige tips voor het gebruik",
- 11.B "Maatregelen indien een alarm aanhoudt".

## 11. A. HANDIGE TIPS VOOR HET GEBRUIK.

<p><b>Het toestel geeft een alarmsignaal bij het opstarten.</b></p>	<p>Dit is normaal.</p> <p>Het toestel heeft ongeveer 10 minuten nodig om al zijn parameters te stabiliseren.-</p> <p>Indien het alarm na 10 minuten aanhoudt, contacteer Oxycure.</p>
<p><b>Het toestel draait normaal, zonder alarm, produceert belletjes in de bevochtiger, maar u krijgt geen zuurstof.</b></p>	<p>De oorzaak hiervan is lekkage aan het geheel 'bevochtiger-zuurstofslang-zuurstofbril'.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ga na of het hoekstuk (foto 2, p. 10) goed vastgeschroefd is.</li> <li>2. Ga na of de bevochtiger goed vastgeschroefd is op het hoekstuk.</li> <li>3. Ga na of de beker van de bevochtiger goed en volledig vastgeschroefd is.</li> </ol> <p><b>De zuurstof kan enkel uit de bevochtiger door de aangesloten neusbril of zuurstofslang als de bevochtiger juist en hermetisch afgesloten is.</b></p>
<p><b>U krijgt water in de neusbril.</b></p>	<p>Dit is condensatie: de verwarmde en bevochtigde zuurstof (20-25°) gaat in een zuurstofslang die op een koude vloer loopt. Oplossingen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vermijd dat de zuurstofslang over de koude vloer loopt.</li> <li>2. Gebruik het toestel enige tijd zonder water in de bevochtiger.</li> <li>3. Bestel een «Water trap» die het probleem gaat oplossen door het water in een kleine buis op te vangen.</li> </ol>
<p><b>Het toestel geeft een zuurstofalarm vanaf 4,5 LPM</b></p>	<p>Sommige toestellen KRO2.V4 geven een zuurstofalarm vanaf 4,5 LPM</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de bevochtiger en de zuurstofslangen op lekken.</li> <li>2. Contacteer Oxycure.</li> </ol>

## 11. B. MAATREGELEN INDIEN EEN ALARM AANHOUDT

MELDING OP HET SCHERM → ALARM TYPE	TE TREFFEN MAATREGELEN
 <p>→ Debietalarm</p> <p>(Code_LPM)</p>	<p>De geproduceerde zuurstof kan niet tot bij de gebruiker omdat een van de toebehoren fout aangesloten is of niet meer werkt. <u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laat het toestel draaien om de volgende testprocedure uit te voeren.</li> <li>2. De bevochtiger loskoppelen van het toestel (hoekstuk van roestvrij staal). Indien het alarm stopt, weet u zeker dat het probleem te zoeken is bij de toebehoren <u>NA</u> het toestel en <u>ga naar punt 3.</u> Indient het alarm aanhoudt, contacteer Oxycure (het nummer staat op het toestel).</li> <li>3. Koppel alle toebehoren los. Verwijder de neusbriil (canule), de zuurstofslang en de bevochtiger van het toestel.</li> <li>4. Schakel ze dan weer één na één aan in de volgende volgorde: <ul style="list-style-type: none"> <li>. Bevochtiger</li> <li>. Slang (verlengslang)</li> <li>. Neusbriil</li> </ul> <p>Op die manier kunt u bepalen welk toebehoren problemen stelt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Zo nodig de bevochtiger vervangen.</li> <li>. Nagaan of de zuurstofbriil (canule) of de zuurstofslang niet verstopt of geplooid is, of vastzit tussen een deur of onder de poot van een stoel. Maak de toebehoren vrij of vervang ze zo nodig. Als het alarm aanhoudt, teruggaan naar punt 3.</li> </ul> </li> <li>5. Contacteer Oxycure.</li> </ol>
 <p>→ Temperatuuralarm</p> <p>(Code_T°)</p>	<p>De werkingstemperatuur van het toestel is te hoog. <u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Schakel het toestel uit om beschadiging te voorkomen.</li> <li>2. Ga na of het toestel staat waar en zoals het hoort en of er ongehinderd lucht in het toestel kan.</li> <li>3. Controleer de stoffilter, vervang zo nodig.</li> <li>4. Controleer de ingangfilter. Vervang zo nodig.</li> <li>5. Het toestel weer aanschakelen.</li> <li>6. Indien het alarm aanhoudt, het toestel uitschakelen om het niet te beschadigen.</li> <li>7. Tijdelijk de reservefles gebruiken die Oxycure leverde.</li> <li>8. Contacteer Oxycure.</li> </ol>

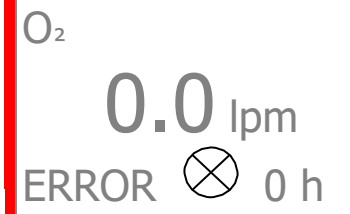 <p>→ Stroomonderbreking</p> <p>Code_AC</p>	<p>Er is geen stroom meer.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ga na of de stroomkabel wel goed aangesloten is op een stopcontact.</li> <li>2. Controleer de zekeringen van uw woning, en of geen stroomstoring is.</li> <li>3. Test een ander elektrisch toestel op hetzelfde stopcontact.</li> <li>4. Indien het alarm aanhoudt, tijdelijk de reservefles gebruiken.</li> <li>6. Contacteer Oxycure.</li> </ol>
 <p>→ Zuurstofalarm (O<sup>2</sup> is het symbool voor zuurstof) (Code_O2)</p>	<p>De multifunctionele sensor detecteerde een lage zuurstofconcentratie (&lt; 82%). Uw toestel geeft nog altijd zuurstof af, maar in een lagere concentratie.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Controleer de bevochtiger en de zuurstofslangen op lekken.</li> <li>2. Contacteer Oxycure.</li> </ol>
 <p>→ Sensoralarm (Code_SE)</p>	<p>De multifunctionele sensor kan het debiet en de zuurstofconcentratie niet bepalen.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tijdelijk de reservefles gebruiken.</li> <li>2. Contacteer Oxycure.</li> </ol>
 <p>→ Algemeen alarm (Code_ERR)</p>	<p>Toestel defect. De productie van zuurstof is onderbroken.</p> <p><u>Maatregelen:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Het toestel onmiddellijk uitschakelen, zelfs indien het toestel minder dan 10 minuten aangeschakeld was. Tijdelijk de reservefles gebruiken.</li> <li>2. Contacteer Oxycure.</li> </ol>
 <p>→ Einde van de reserve-werkingsuren.</p>	<p><b>Einde van de 999 reserve- werkingsuren.</b></p> <p><u>Maatregelen :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Het toestel (compressor) uitschakelen door op de aan/uit-knop te duwen.</b></li> <li>2. <b>Contacteer onmiddellijk Oxycure.</b></li> </ol>

## 12. ANDERE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN OXYCURE.

### ▪ De saturatiemeter

De saturatiemeter is een toestel dat het zuurstofgehalte in het bloed meet. De saturatiemeter helpt te bepalen of een zuurstoftherapie nodig of efficiënt is.

#### Modellen.

- MD300 C15, voor individueel gebruik.
- MD300 C63, voor professioneel gebruik.
- MD300 C53, voor pediatrisch gebruik



MD300 C63

→ Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan. Raadpleeg onze website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)

### ▪ De kleine Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen



De Oxycure reservefles of fles voor verplaatsingen, met ingebouwde ontspanner, is DE oplossing bij een stroomonderbreking. Eén m<sup>3</sup> geeft een autonomie van 8 uren 20 minuten op 2 LPM.

#### Modellen.

B5	1,0 m <sup>3</sup>
B2	0,4 m <sup>3</sup>

→Neem in dat verband contact op met uw arts of apotheker of vraag onze informatiebrochure aan.  
Raadpleeg onze website [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)

### De Oxycure draagbare concentrators

De draagbare Oxycure concentrators zijn draagbare en autonome medische hulpmiddelen. Ze zijn compact en licht en bieden een quasi onbeperkte autonomie. Ze werken zowel met een oplaadbare batterij als op stroom (wisselstroom 110-240 volt) of in een auto (gelijkstroom 12 volt), zonder enige onderbreking wanneer men van energiebron wisselt.

De Oxycure draagbare concentrators zijn uitgerust met een spaarventiel

De Oxycure draagbare concentrators zijn over het algemeen niet geschikt voor gebruik tijdens de slaap.



→ Meer informatie op [www.oxycure.be](http://www.oxycure.be)  
of bij onze klantendienst

## 13. OPVOLGING VAN UW THERAPIE

---

<b>Uw Oxycure assistent</b>

Vraag uw arts om hieronder de opeenvolgende voorgeschreven doseringen/behandelingen te noteren.

Datum	Liters per minuut (LPM)	Uren per dag	Opmerkingen
			INSTALLATIE



**Opmerkingen.**



## 14. PERIODIEK ONDERHOUD DOOR DE GEBRUIKER

Uw toestel zal om de 999 werkingsuren vervangen worden op voorschrijving van uw arts en met de goedkeuring van uw apotheker.

Ter informatie vindt u hieronder het onderhoud van een Oxycure concentrator, voor een continu gebruik:

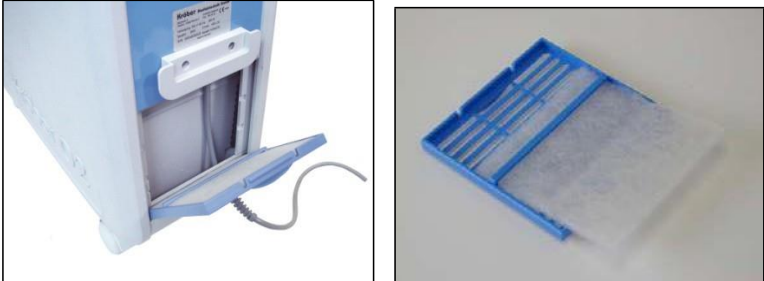PERIODICITEIT	ACTIES
Elke dag <b>(verplicht)</b>	De bevochtiger schoonmaken en ontsmetten met een ontsmettingsproduct (te koop in de handel) of met een oplossing van 10% azijn en 90% water. Het water van de bevochtiger vervangen.
Elke dag (Sterk aangeraden)	De neuscanule reinigen (met de opening naar onder): met warm zeepwater of met een oplossing van water (90%) en azijn (10%). Zorgvuldig spoelen en laten drogen vóór hergebruik.
<b>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</b>	<b>De stoffilter vervangen (afkoeling)</b>  
<b>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</b>	Neuscanule (of bril) of masker vervangen. Bevochtiger vervangen.
<b>Elke eerste dag van de maand (verplicht)</b>	Onderhoud van het toestel met een licht bevochtigde doek (mild huishoudelijk onderhproduct).
<b>Elke 6 maanden of om de 5.000 uren maximum</b>  <b>Op uitdrukkelijk verzoek van Oxycure (Verplicht)</b>	<b>Inlaatfilter vervangen</b> (automatisch geleverd door Oxycure om de 6 maanden). De filter lichtjes tegenwijzerzin draaien en trekken. De nieuwe filter op de greep vervangen.  

**VERPLICHT PROGRAMMA VOOR DE VERVANGING VAN DE TOEBEHOREN**

**Gelieve het onderstaand programma voor de vervanging van de toebehoren te volgen en het aantal uren van de concentrator Oxycure op die datum te vermelden.**

Met deze gegevens kan uw arts de loop van uw behandeling opvolgen.

Naam patiënt :

Kamernummer patiënt :

<b>Maand</b>	<b>Acties op de eerste dag van de maand</b>	<b>Aantal uren van de concentrator Oxycure</b>
INSTALLATIE OP      __ / __ / ____		
1 __ / __ / ____	<b>Vervangen:</b> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken	
2 __ / __ / ____		
3 __ / __ / ____		

**In de loop van de 4<sup>de</sup> maand bezorgt Oxycure de toebehoren voor de behandeling van de 6 volgende maanden.**

4 __ / __ / ____	<b>Vervangen:</b> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter 4. Het toestel schoonmaken		
5 __ / __ / ____			
6 __ / __ / ____		<b>INGANGSFILTER EN TOEBEHOREN VERVANGEN</b>	
7 __ / __ / ____			
8 __ / __ / ____	<b>Vervangen:</b> 1. De zuurstofbril of masker 2. De bevochtiger 3. De stoffilter Het toestel schoonmaken		
9 __ / __ / ____			
10 __ / __ / ____			
11 __ / __ / ____			
12 __ / __ / ____			

▪ **Toebehoren voor een bijkomende behandeling van 6 maanden.**

Na de eerste drie maanden krijgt u een doos met de toebehoren voor een bijkomende behandeling van zes maanden. Deze dienst is in de terugbetaling inbegrepen.